

グリッターは、
飛び散らず、歯を素早く研磨し、
輝くような光沢を与える
歯面研磨用ペーストです。

TAKE OFF WITH

Glitter!

- ✦ スケーリング後、ご使用ください。歯面を滑沢にし、プラーク、歯石をつきにくくします。
- ✦ 1回の分量がカップ入りで使いやすく、患者さんごとの使い切りタイプですから、とても衛生的です。
- ✦ すっきりとしたミント味です。

使用方法

1. グリッターを1つ取り出し、ふたの銀紙を取り除きます。プラスチック製のホルダーに入れて固定します。
2. 操作しやすい指にホルダーをはさみ込みます。
3. 歯面清掃専用ブラシ（プロフィブラシ、プロフィカップ等）を低速で回転させながらグリッターペーストに押しつけて、ブラシに十分ペーストを付けます。
4. 歯面全体に軽く押しつけて研磨します。回転数については各ブラシメーカーの最大回転数の範囲内で使用してください。出来るだけ低速で歯面を加熱しないように注意してご使用下さい。

使用上の注意

- グリッターは、飲み込まないようにしてください。使用中に飲み込んだりするのを防ぐために排唾管の併用をお薦めします。
- 使用中は、ブラシに十分なペーストを補充し、歯面の加熱を防いでください。
- ペーストが乾燥している場合は、水を1～2滴加えて柔らかくしてからご使用ください。

PROPHY PASTE グリッター 歯面研磨用ペースト



グリッターのふたの銀紙を取り除きます。付属のプラスチック製ホルダーにはめ込み指の間で保持して使用します。

グリッター

プラスチック製ホルダー付
ミント味
容量/2g×200個入

