

Miele

HAKUSUI

ミーレ ジェットウォッシャーで

# 手洗いよりもラクに、 歯科用医療機器を洗浄・消毒

ミーレジェット  
ウォッシャーを使う

4つのメリット

歯科衛生士  
本来の業務に  
集中できる!



時間を効率的に  
使える。

約25人分の基本セットの  
洗浄と消毒が可能

環境にも  
やさしいね!



節水できて  
さらに経済的。

使用水量が手洗いの約1/6  
コストは手洗いの約1/7



スタッフの  
感染リスクを低減。

洗浄前の予備洗浄が不要



ケガも防げるね!

清潔だから  
患者さんも安心!



見えない汚れも  
隅々まで洗浄・消毒。

毎分500Lのお水を  
循環させて強力洗浄  
93℃の熱湯で高水準の消毒





## 節水できてさらに経済的。

手洗い洗浄はすすぎの際に多量の水が必要ですが、ミーレ ジェットウォッシャーは高性能の洗浄プログラムを採用しているため、高い節水効果を実現しました。また、ミーレ ジェットウォッシャーのランニングコストは1サイクル当たり約240円と経済的です。

### ミーレ ジェットウォッシャーを使用した場合

手洗いの約 **1/6** の水で洗えます。



ミーレ ジェットウォッシャー  
1回分の使用量 約 **69** L/回

### ミーレ ジェットウォッシャーなら /


トータルコスト

約 **¥240**

### コスト内訳

上下水道料金… ¥50  
洗剤…………… ¥114  
すすぎ剤………… ¥10  
電気代…………… ¥60～¥70

### 手洗いの場合

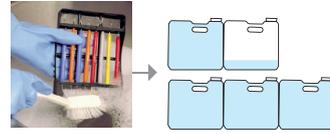

手洗い  
1回分の使用量 約 **420** L/回

### 上下水道の価格

水道料金… ¥0.2/L ※3  
水道使用量… 12～40L/分 ※4  
下水道料金… ¥0.56/L ※5

### トータルコスト

手洗いなら… 約 **¥1,678**

歯科衛生士が手洗いを35分間行った場合

### コスト内訳

人件費…………… ¥959 ※1  
上下水道料金… ¥319  
その他…………… ¥400 ※2  
(洗浄剤等)

※1：厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」を元に計算  
※2：メーカーカタログを元に計算  
※3：厚生労働省「知りたい水道-日本の水道を考える」より抜粋  
※4：厚生労働省「給水装置標準計画-施工方法」より抜粋  
※5：東京都の水道基本料金を元に計算

(2023年12月現在)



## スタッフの感染リスクを低減。

手洗い洗浄には何かとリスクを伴います。先端が尖っている物が多い歯科用医療機器で誤って負傷する危険も…  
ミーレ ジェットウォッシャーは、自動で洗浄と消毒を行います。洗浄後の拭き上げ作業が不要なため、乾燥の手間を省くことができます。



## 時間を効率的に使える。

大容量のミーレ ジェットウォッシャーでは、約25人分の診療セット(トレー・バキューム・ミラーなど)をまとめて洗浄・消毒が可能です。歯科用医療機器を本体にセットしてスイッチを押すだけ。洗浄にかかる時間を有効活用いただけます。

### ▶手洗い

浸漬 / 超音波洗浄 / すすぎ / 消毒 / すすぎ / 乾燥

### ▶ミーレ ジェットウォッシャー


本体にセット 洗浄・消毒・乾燥まで  
ミーレ ジェットウォッシャーにおまかせ!

※ミーレ ジェットウォッシャーの所用時間:約1時間20分(VarioTD)



## 見えない汚れも隅々まで洗浄・消毒。

ミーレ ジェットウォッシャーは落ちにくい血液などのタンパク質の汚れもしっかり洗浄します。また、3つの洗浄ノズルで高圧洗浄を行うため、水を強い力で直接被洗浄物に当てることで優れた洗浄効果を得ることができます。  
ミーレ ジェットウォッシャーはISO15883で規定されたAo=3,000の基準をクリアした高水準消毒を実現します。

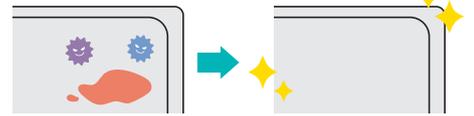

500L / 分の循環水量による  
**強力な洗浄力!**

パワフル

大容量

高性能



PG8591

ドライ  
プラス  
ホットエアー  
乾燥機能



PG8581

エコ  
ドライ  
余熱乾燥  
機能

器具除染用洗浄器  
**ミーレ ジェットウォッシャー**

医療機器届出番号 13B2X10362000016/13B2X10362000017 一般管理機器



◀製品情報はこちら

## 洗浄力

循環水量 500L / 分と様々な  
モニタリング機能による確実な洗浄

## ハンドピース内部の 洗浄・水分除去

ハンドピース内部の洗浄とホットエアー  
による乾燥機能 (PG8591)

## ISO 規格適合

ウォッシャーディズインフェクターに関する  
ISO 規格「ISO15883/1」「ISO15883/2」に適合



## 白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951  
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618  
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西蔵屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870  
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.12.P3,000 K19 Ver.1.1.1