


premier™

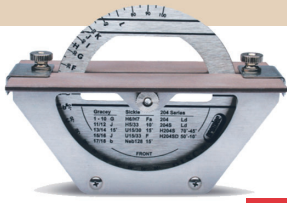

インストゥルメント角度早見表

DISC / プレミア社

グレイシー・シッケルインストゥルメント

インストゥルメント	角度設定表示	
■グレイシーキュレット		
Gracey 1-10	G	
Gracey 11/12	J	
Gracey 13/14	15°	
Gracey 15/16	J	
Gracey 17/18	b	
■シッケルスケーラー		
H6/H7	F	a
H5/33	10°	
U15/33	F	
U15/30	15°	
204S	L	d
H204S	70°	-45°
H204SD	50°	-10°
U15/Jac1	F	
Jac 1/1	F	
Jac 2/3	K	b
Jac 34/35	40°	0°
Neb 128	15°	
NV1 Scaler	15°	
NV2 Scope	G	
137 Scaler	15°	
Ball 5/6	50°	-25°
CK6	80°	-30°

ユニバーサルインストゥルメント



インストゥルメント	角度設定表示	
■ユニバーサルキュレット		
McCalls 13/14	50°	-15°
McCalls 17/18	H	b
McCalls 13S/14S	H	b
McCalls 17S/18S	H	b
Columbia 4L/4R	I	b
Columbia 13/14	J	c
Columbia 2L/2R	G	a
Langer 1/2	35°	0°
Langer 3/4	40°	-20°
Langer 5/6	20°	
Langer 17/18	40°	-20°
Barnhart 1/2	50°	-20°
Barnhart 5/6	50°	-20°
Younger Good 7/8	30°	-5°
Younger Good H-7/8	30°	-5°
137 Curette	15°	
UT 107/108	40°	0°
GF21	15°	15°
SIUFW204	40°	-15°
※シントット(215)	15° (14)	J (11)
※シントット(216)	J (12)	15° (13)

インストゥルメント
(例：シントット)
の見方



表記のある方向が指定番号です

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

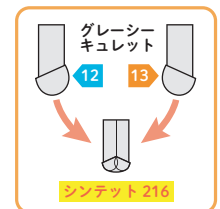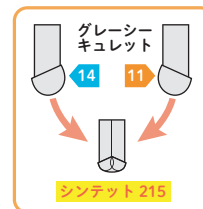

シントットはグレイシーの刃部を2つ持ったユニバーサルスケーラーです。



ご使用方法は動画をチェック！

＼簡単に速くシャープニングができます！

予防関連製品を多数取り扱っています

シャープニングセミナー・デモ・院内勉強会

随時受付中！

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中区山崎3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>