



VITAFOL H

HAKUSUI

人工歯保護分離材

ビタフォール H

「ビタフォールH」を使用すると面倒なデンチャー掘り出し作業が人工歯に傷を与えず、より簡単に効率良く行えます。

ビタフォール H を使用しないと...



歯間部に石膏が入りこみ、掘り出しが面倒で人工歯を傷つける恐れもあります。

ビタフォール H を使用すると...



歯間部に石膏が入りこまず、人工歯表面も保護されます。

歯科技工所にとって人工歯（レジン歯、陶歯）の埋没作業は、日常の仕事です。この埋没作業の過程で面倒で時間のかかる掘り出し作業をより簡単、安全、効率良く行えるようにするのが「ビタフォール H」です。「ビタフォール H」は、レジン歯や陶歯用のシリコン系分離材で、これを歯間空隙部、歯間部、人工歯表面に塗布して埋没することにより、埋没石膏が歯間部に入りこむのを防ぎ、掘り出し操作が容易に行えるようになります。又、圧入中に緩衝材の役割も果たし、損傷を防ぎます。

ビタフォール H の操作手順



1 ペーストを適量、練板紙上に取り出します。



2 硬化液を適量出します。



3 ペーストと液を約1分間スパチュラなどで練和後、付属のブラシで適用します。



4 リテンションクリスタルを振りかけ、通法どおり重合します。



ビタフォール H の被膜が付いたままの掘り出し時



ビタフォール H の被膜を取り除いた状態。きれいな面になっています。

● ビタフォールHトライアルキット(3本組)

[商品コード番号:13500500] 【標準価格】 ¥25,000

- ビタフォールH ペースト (70mL) x 3
- ビタフォールH 硬化液 (15mL) x 3
- ビタフォールH リテンションクリスタル (80g) x 3
- ビタフォールH ブラシNo.11 x 3
- ビタフォールH 練板紙 (50枚) x 3



● ビタフォールHラボラトリーキット(1本組)

[商品コード番号: 13500501] 【標準価格】 ¥8,500

- ビタフォールH ペースト (70mL) x 1
- ビタフォールH 硬化液 (15mL) x 1
- ビタフォールH リテンションクリスタル (80g) x 1
- ビタフォールH ブラシNo.11 x 1
- ビタフォールH 練板紙 (50枚) x 1



《人工歯の排列にはビタ社の硬質レジン歯を!!》

● ビタ MFT アンテリア 上顎/下顎

健保適用品



色調

- 5色
A1(2M1), A2(2M2),
A3(3M2), A3.5(3R2.5),
B3(3L2.5)

形態

上顎12形態
下顎 5形態

【標準価格】

6ソロ1枚 ¥780

● ビタ MFT ポステリア 上顎/下顎

健保適用品



色調

- 5色
A1(2M1), A2(2M2),
A3(3M2), A3.5(3R2.5),
B3(3L2.5)

形態

上顎3形態
下顎3形態

【標準価格】

8ソロ1枚 ¥1,040

● ビタパン エクセル 上顎/下顎



色調

- 5色
A1, A2, A3, A3.5,
ブリーチ(0M3)

形態

上顎17形態
下顎5形態
(ブリーチ色は9形態)

【標準価格】

6ソロ1枚 ¥3,800

● ビタ リンゴフォーム[ポステリア] 上顎/下顎



色調

- 5色
A1, A2, A3, A3.5,
ブリーチ(0M3)

形態

上顎4形態
下顎4形態

【標準価格】

8ソロ1枚 ¥3,800

医療機器製造販売認証番号 222AKBZX00050000, 222AKBZX00051000, 222AKBZX00048000, 222AKBZX00049000

標準価格は、2022年8月現在のものです。(税別)

VITA

ビタ社(ドイツ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.08.P1000 D25 Ver.2.1.1