


XPエンドシェーパの臨床ケース

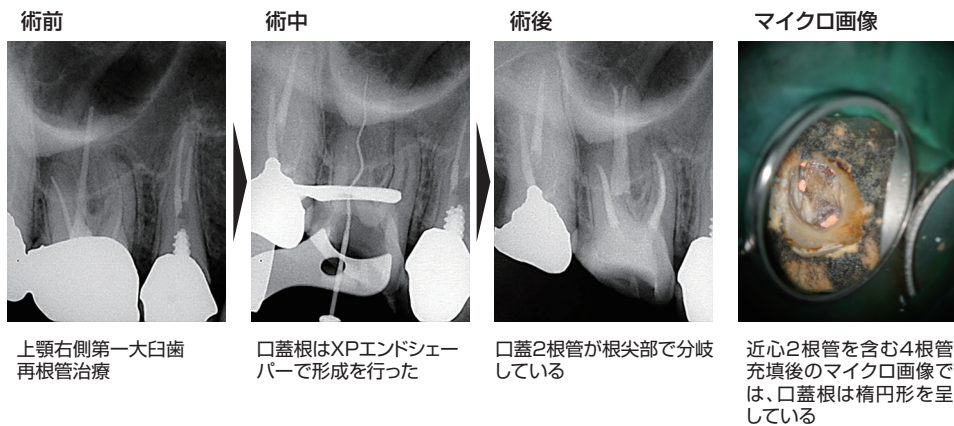

臨床写真提供: ユーズデンタルクリニック院長 牛窪 敏博 先生

包装形態



医療機器認証番号 229AKBZX00014000 管理医療機器

関連商品

XPエンドフィニッシャー 形状記憶ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号228AKBZX00040000 管理医療機器

クリーニング用



21mm/25mm
#25
#30

#30は再根管治療後
の根管に残ったガッタ
パーチャを清掃する
のに適しています。

[1箱6本入]

レイス エンジン用ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号223AKBZX00075000 管理医療機器

種類: 21mm/25mm/31mm

2%: #15, #20, #25, #30, #35,
#40, #45, #50, #55, #60
4%: #15, #20, #25, #30, #35,
#40, #50
6%: #15, #20, #25, #30, #35,
#40

[1箱5本入]



●レイスイントロセット
種類: 21mm/25mm
プリレイス :35/08 (SS)
レイス :30/06
レイス :30/04
レイス :25/04
レイス :25/02
[各1本、計5本入]

プリレイス 根管を広げる為の先端が尖ったアクティブチップ

医療機器認証番号223AKBZX00218000、223AKBZX00220000 管理医療機器



●プリレイス(ニッケルチタン)
19mm #30/ 6%
#40/ 6%
#35/ 8%
#40/10%
●プリレイス(ステンレス)
19mm #35/ 8%
#40/10%

[1箱5本入]


レイス ISO 10 手用インストルメントに代わり、グライドパス(予備拡大)を行うエンジン用ファイル

医療機器認証番号223AKBZX00215000 管理医療機器



●レイス ISO10
21mm/25mm/31mm
#10/2%
#10/4%
#10/6%

[1箱5本入]

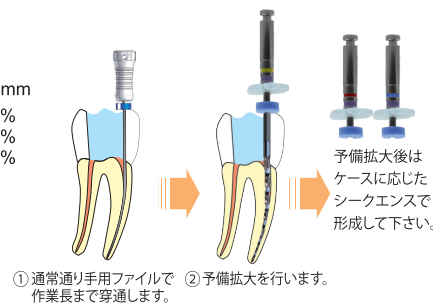

バイオレイス ISO40/04を基準に生体性と形態性を考えた根管拡大システム

医療機器認証番号223AKBZX00216000 管理医療機器

●バイオレイスベーシックセット
21mm, 25mm, 31mm BR0, 1, 2, 3, 4, 5
[1箱6本入]

●バイオレイスエクステンドセット
21mm, 25mm, 31mm BR6, 7, 4C, 5C
[1箱4本入]

●BR0(#25/8%) ●BR1(#15/5%)
[1箱6本入、19mm] [1箱6本入、21mm, 25mm, 31mm]

●BR2 (#25/4%), BR3 (#25/6%), BR4 (#35/4%), BR5 (#40/4%),
BR6 (#50/4%), BR7 (#60/2%), BR4C (#35/2%), BR5C (#40/2%)
[1箱6本入、21mm, 25mm, 31mm]

i-レイス 彎曲が強く細い根管の形成に使用

医療機器認証番号223AKBZX00219000 管理医療機器

●i-レイス 3本セット
21mm, 25mm, 31mm
#15/6%, #25/4%, #30/4%
[1箱3本入]

●i-レイスプラス 4本セット
21mm, 25mm, 31mm
#20/2%, #25/2%
[1箱4本入]

●R1 (#15/6%), R2 (#25/4%),
R3 (#30/4%), R1a (#20/2%), R1b (#25/2%)
[1箱6本入、21mm, 25mm, 31mm]




XP ENDO®
shaper
FKG
swiss endo

形状記憶 NiTi ファイル

XPエンドシェーパー
根管形成用ニッケルチタンファイル

複雑な根管は
3Dコンセプトで解決!

ワンファイルで
ストレス無く
ISO#30/.04まで
拡大します

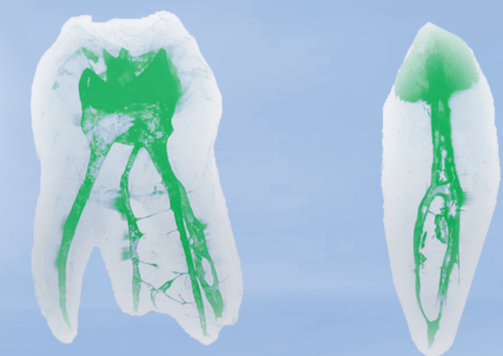

根管構造が複雑な歯の3D画像
(© FKG Dentaire SA)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048)884-3951
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2021.11.P.2000 F12 Ver.1.2.2

形状記憶効果

- ▶ 次世代型根管拡大用ニッケルチタンファイル
- ▶ 2つの特性: 超弾性&形状記憶金属
- ▶ 温度による形態の変化
- ▶ 固有の形状&高い柔軟性により根管内で拡がり、3次元的にフィット
- ▶ 繰り返し疲労への耐性を高める小さい径とテーパー(ファイルのデーパーサイズは1%)

ソフトシェーブ

形状記憶シェーブ

根管外
20℃では
Mフェーズ
[ストレート形状]

根管内
35℃では
Aフェーズ
[スネーク形状]

素材



XPエンドシェーパーはFKG社が独自に開発した金属 - NiTi Max Wire (Martensite-Austenite Electropolish Flex)- を用いて製造されています。この金属は異なる温度に反応し、非常に柔軟性があります。

特徴


- ▶ #15/2%のグライドパスまで形成した後、ワンファイルで#30/4%まで拡大できる。
- ▶ スネーク形状により3D運動で拡大する。
- ▶ ミニマルトルクでハイスピードの連続回転
- ▶ 最小のストレスで根管形成できる(アピカルサードも)
- ▶ コロナルサード部のテーパーは8%まで拡大できる。
- ▶ 安全且つ効果的な残渣の除去(時間短縮)
- ▶ 根管を傷付けず、解剖学的形態を維持

回転数: 800rpm

トルク: 1Ncm

3Dシーケンス

根管拡大形成

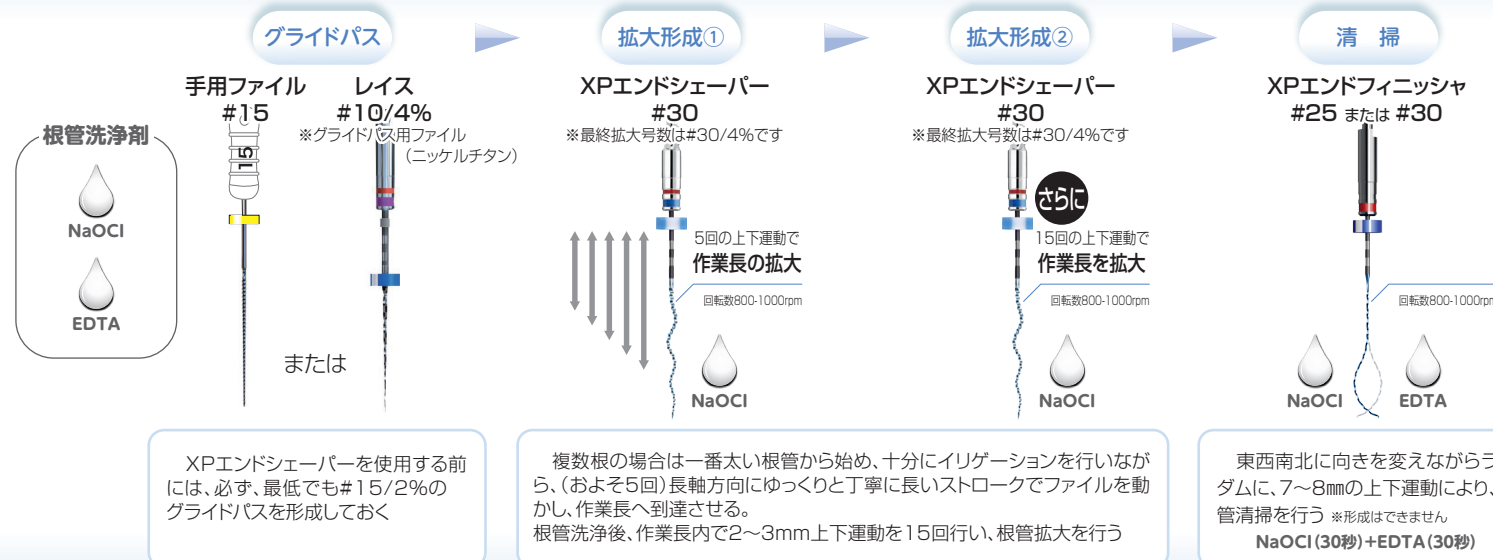


ブースターチップ(Booster Tip)

XPエンドシェーパーの特殊な先端チップ形状


- ▶ 先端サイズが#15で細い根管でもアクセスしやすい
- ▶ 根管の解剖学的形態を損なわない
- ▶ 特殊なチップ形態により6面のカッティングエッジを持たせ、切削効率を向上
- ▶ 正確に根管への挿入ができる

ブースターチップ (BTチップ)

ラウンドチップ (通常のチップ)

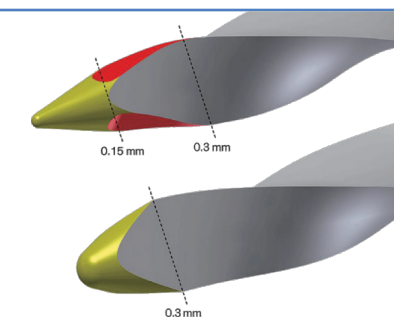


1 直径がYの根管に通常のチップを使用

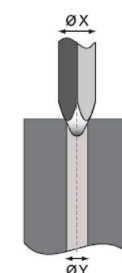


直径がXのファイルを直径がYの根管に挿入することはできません。まず最初にYと同じか小さいサイズのファイルを使用する必要があります。

2 同じ根管にBTチップを使用

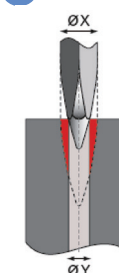

BTチップだと直径がYの根管でも直径がXのBTチップを挿入することができます。

3 彎曲の強い根管にBTチップを使用

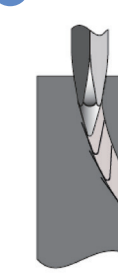

先端が細くなっているため彎曲の強い根管や狭窄した根管口でも正確にファイルを進めることができます。

確実な残渣の除去と清掃効果の向上


根尖から16mm時点での、通常のファイルとXPエンドシェーパーの比較

比較図

XPエンドシェーパーは通常のファイルよりもコア径は小さいですが、最終形は通常と同じ大きさまで拡大します。この特性により、象牙細管を傷付けることなく残渣を除去することができます。

更に、高速での連続回転により、XPエンドシェーパーは根管内で乱流を起こし、スミア層の発現を抑えることで、象牙細管全体に洗浄剤を行き渡らせることができます。

30/4%の通常のファイルでは、根尖から16mmの地点でのフリースペースは46%でしたが、XPエンドシェーパーでは84%もありました。このようにフリースペースが多いと残渣の除去が容易になり、複雑な形状の根管内に残渣が滞留して詰まったままになったり、根尖から突き抜けてしまったりすることがありません。

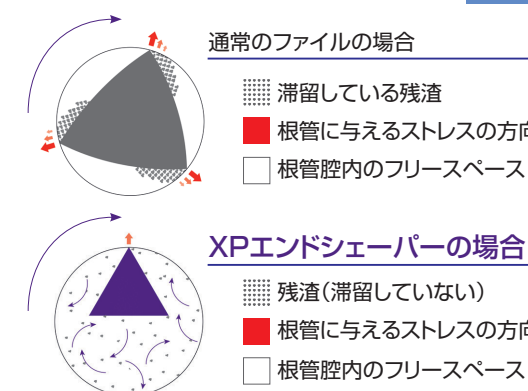

3Dシーケンス

リトリートメント(ガッタパーチャ除去)

