

SMA SMA ドイツ製のスマート型

Panasil®

initial contact
Unique initial hydrophilicity

パナシル
イニシャル コンタクト

超親水性付加重合型シリコン印象材

硬化前からの超親水性

ミキシングチップ
レッド SMA



Silginat®

Vinyl polysiloxane (VPS)
Anatomical impression material

シルジナート

高弾性付加重合型シリコン印象材

単一印象法

ミキシングチップ
ダークブルー SMA



SMA SMA

精密シリコン印象材ガンタイプの
均質練和を限りなく追求

練和チップの形状に新たなスタンダード。
しながら、コストを抑えムダを省く。

均質シリコン練和物

ラクラク操作性

コストパフォーマンス



Tetragon

より均質で高品質な印象物のための新設計!

ミキシングチップ胴体部分が新四角形構造の設計で
中の羽部も独自の形状を開発。未重合やエラーを抑制し
より安定した練和物を。

Reduction

チップ内印象材残量を最大 20%削減!

ミキシングチップのサイズをより小型化し材料のロス
を抑制。チップ1本単価は63円で従来品(1本180円)
よりも大幅コストダウン。

拡大図



check!

誤混入防止構造

より安心!

ベスト2穴出口が独立し、離れて配置されより安全。



カートリッジ接合部



ミキシングチップ接合部

赤色チップ

ライトボディ用

濃紺色チップ

トレー用

新型

短くなった

従来



新型

短くなった

従来



Panasil®

initial contact
Unique initial hydrophilicity

パナジル

イニシャル コンタクト
超親水性付加重合型シリコン印象材



SMA

SMA

それはドイツ製の
スマート型

新たなスタンダード!

ミキシングチップ
レッド SMA



Silginat®

Vinyl polysiloxane **VPS**
Anatomical impression material

シルジナート

高弾性付加重合型シリコン印象材



ミキシングチップ
ダークブルー SMA



パナジル
イニシャルコンタクト
ライト [50mL]

パナジル
トレソフト
カートリッジ [50mL]

パナジル
イニシャルコンタクト
X-ライト [50mL]

パナジル
モノフェーズ
ミディアム [50mL]



新カートリッジのご使用方法

Initial Procedure



1 大円型キャップを反時計回りに回す。

2 大円型キャップを引き外す。

3 チップを外した状態で試し出しをする。印象材のペース、カウリスト両方の出を確認。

4 新形状ミキシングチップを新カートリッジに正しく挿入し、時計回りにロック。

新しい練和赤チップ・濃紺チップには、互換性はございません

- 新包装の印象材には、新形状のミキシングチップをご使用ください。(旧チップは使用不可)
- 新包装と旧包装の印象材およびミキシングチップには、互換性はございません。
- 他社品や類似品のミキシングチップを使用しないでください。
万一、誤った組み合わせで使用されますと、練和・硬化不良等の原因となります。
- 従来のガンピストル(当社商品名「アプリフィックス4」)は、新包装にも引き続きご使用ください。

凹凸挿入

正しく奥まで挿入

捻りロック

新チップを時計回りに

使用不可

旧チップ、他社品、類似品

補充用アクセサリ包装

Refill Package



ミキシングチップ Ø4.0mm
レッド 中 SMA

ミキシングチップ ø4.0mm レッド中…100



ミキシングチップ Ø6.0mm
ダークブルー 大 SMA

ミキシングチップ ø6.0mm ダークブルー大…100



イントラオーラルチップ
トランスベアレント レッド用 中

イントラオーラルチップトランスベアレント ø0.6mm レッド用 中 SMA…100



イントラオーラルチップピュアホワイト
ダークブルー用 大

イントラオーラルチップピュアホワイト ø1mm ダークブルー用 大 SMA…100



アプリフィックス4(専用ガン)
ダークブルー用 大

アプリフィックス4 (ガンII) ……1

医療機器認証番号 224AGBZX00101000, 221AGBZX00236000, 220AGBZX00287000, 27B1X00020220062 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020220061, 27B1X00020220062, 27B1X00020224006 一般医療機器

ご用命は当社へ

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.06.P3,000 F18 Ver1.1.2