

アシスティーナTWINのオイル消費量は、 従来のサービスオイルスプレーの約1/20!!

メーカー従来品
サービスオイルスプレー

1本 5,500円

約**20**本

※1本400ml

同じハンドピース数でも
必要なのは**1**セット!

アシスティーナTWIN
ケアセット

1セット 16,500円

※1本200ml

年間パフォーマンス比較

シミュレーション条件

サービスオイルスプレーの場合…

1日42本のハンドピースを使用
(患者30名/1日×各2本使用)
稼働日数は、200日/1年とした場合
(自社調べ)

3ml/1回使用

約**35**万円

アシスティーナTWIN (ケアセット)の場合…

驚き! **0.07ml/1回使用**

約**88%**コストダウン



タービンコントラの自動洗浄/注油システム

アシスティーナTWIN

NEW TWIN チャンバータイプ 2層式

CHECK!
QRコードを読み取って
手軽に使用動画をご確認いただけます。

本体はコンパクト&お手入れ楽々!



商品コード 00660754
標準セット価格 ¥260,000

■仕様

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 機能 | : ハンドピースの洗浄および注油 |
| ハンドピースの種類 | : タービン、コントラ&ストレート、エアスケラー |
| 作業時間 | : ハンドピース1本で約10秒 |
| 電源電圧 | : 100-240VAC |
| 最大消費電力 | : 18 VA |
| エア圧 | : 5-10気圧(内部エアレギュレーターで自動調整) |
| 吐き出し空気量 | : 約40L/分 |
| 寸法 | : W297xD435xH190mm |
| 重さ | : 3.8kg |
| 標準付属品 | : 本体、エアホース(2m)、電源コード(アダプター付)、HPアダプター |

■消耗品

サービスオイル
ハンドピース 2800本分

クリーニング液
ハンドピース 2800本分

商品コード 00660792
ケアセット
標準価格: ¥16,500

セット内容
・サービスオイル 200ml
・クリーニング液 200ml
・HEPA フィルター

記載価格は2018年9月現在のものです、税別です。



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>
 2019.04.P3.000 E13 Ver.3.0.1

ハンドピースはメンテナンスが重要

1. 歯を削る際、ハンドピースに取り付けられたバーは、**18~20万回転**という高速で回転します。

2. 使用頻度の高いハンドピースは、メンテナンスをしていないと、**回転不良、注水不良**といったトラブルが発生します。

3. ハンドピースをスムーズに回転させるためには、**注油が**必要です。

4. オイルが適量でなければ、「余剰」なオイルが負荷となり、発熱トラブルが引き起こされてしまいます。

5. しかし、いくら潤滑のためとはいえ、「余剰」なオイルは排出する必要があります。

？ オイルを適量に出来るか不安…
 ？ よほど効率的でないと…
 そんな時は是非 **assistina TWIN** をご活用ください

メンテナンス…

なんと! 注油とメンテナンスが 10秒で完了

※1本10秒

assistina TWIN

使いた簡単! 3ステップ

- ①インスツルメントを装着
- ②扉を閉めて
- ③ボタンを押すだけ!

適切で、定期的な注油が大切!

洗浄・消毒には

ミーレ ジェットウォッシャー

ミーレ ジェットウォッシャーなら、自動的に洗浄から消毒を行い、最後に器具の乾燥を行うので、快適・簡便に利用できます。

製造販売元番号 1382X10362000016, 1382X10362000017
 一般医療機器



ミーレ ジェットウォッシャー



注目! 適量調整が難しい「注油」が自動で出来ます

※専用サービスオイル、クリーニング液も押し込むだけでセットが完了します

効率的な治療の為に

アシスティーナ TWIN と連携して各工程をサポートします!!

メンテナンスループ

治療



滅菌

包装

つまり! 1日分のタービンコントラを

約7分で完結

※平均的な歯科医院を仮定。ユニット3台×30分稼、午前診3時間・午後診4時間、1日7時間で42本のタービン・コントラアングル使用として

保管

滅菌には

クラスB オートクレーブ リサ
 『クラスB オートクレーブ リサ』は、ヨーロッパ規格 EN13060 に適合した高性能オートクレーブです。

医療機器認証番号 228AL8ZX00008000
 管理医療機器 特定保守管理医療機器



クラスB オートクレーブ リサ

各種コネクターを取り揃えています!

メンテナンスいただける幅が広がります!



さらに! “時短” 追求したのは だけではありません!

詳細は裏面へ