



ヒートシーラー シールツ



Seal12

シール幅

幅広
はばひろ

12 mm

「滅菌パックに関するEN規格」
滅菌シール幅は6mm以上と
規定されています

規格

ISO11607-2


適合



実際のシール幅

幅広
はばひろ
12 mm

「シンプル」で「高性能」

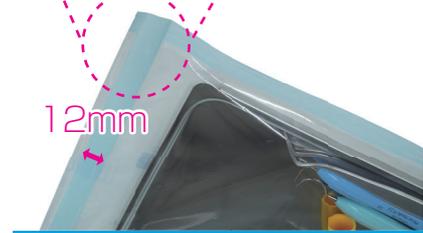

12mm



「12mm」のシール幅で
強力にシーリング

「クラスBオートクレーブ」に
おすすめ

操作が
カンタン

洗練された スタイリッシュなデザイン




壁掛け



本体取付

設置する場所によって、レイアウトを選ぶ事が可能です

分かりやすい操作法

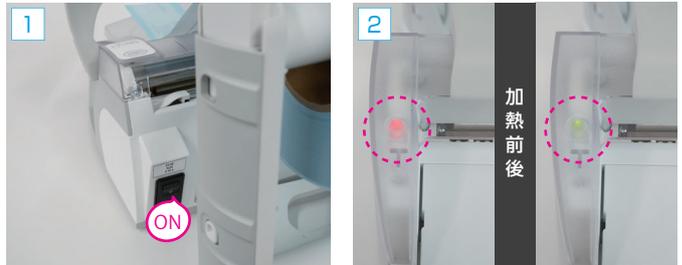


裏面のスイッチを押して、電源を入れます。

予熱中は、赤いランプ点滅します。予熱が終了すると、緑のランプが点滅します。



滅菌/パックを引き出してレバーを倒します。

緑のランプが点灯してピープ音が鳴ったら、シールが完了です。

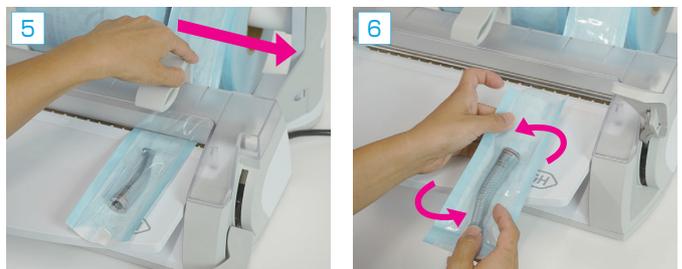

カッターをスライドさせて滅菌/パックを切ります。滅菌/パックの反対側もシールします。

〈 関連商品 〉

感染予防！

リサ・ララは減圧乾燥
器具は乾燥してサイクル完了！

必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。お急ぎサイクル(リサのみ)は乾燥しません。



小型高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ

lisa 22

大容量と時短を両立

lara 17

コストと滅菌性能を両立

販売名:クラスBオートクレーブ リサ / クラスBオートクレーブ ララ 一般名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000 / 301ALBZX00013000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ヒートシーラー Seal2

商品コード 07801100

仕様

※滅菌パックは含まれておりません

| | |
|--------|---------------------------------|
| 電源電圧 | : 100-120V |
| 最大消費電力 | : 100 W |
| 電源 | : 50/60Hz |
| シール幅 | : 12x310mm |
| 寸法 | : W452xD480xH420mm(平面設置、作業台取付時) |
| 重さ | : 7.1kg |



W&H スティライゼーション社
(イタリア)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.02.P1,000 B27 Ver1.3.3