



ヒートシーラー シールツ

ISO基準
適合

Seal12



シール幅
幅広
はばひろ
12mm

「滅菌パックに関するEN規格」
滅菌シール幅は6mm以上と
規定されています

規格

ISO11607-2
適合

実際のシール幅

幅広
はばひろ
12mm

「シンプル」で「高性能」



12mm



「12mm」のシール幅で
強力にシーリング

「クラスBオートクレーブ」に
おすすめ

操作が
カンタン

洗練されたスタイリッシュなデザイン

設置する場所によって、
レイアウトを選べる



〈関連商品〉 小型高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ

リサ・ララは減圧乾燥 感染予防
器具は乾燥してサイクル完了!

必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。お急ぎサイクル(リサのみ)は乾燥しません



lisa 22

大容量と時短を両立



lara 17

コストと滅菌性能を両立

販売名:クラスBオートクレーブ リサ / クラスBオートクレーブ ララ 一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000 / 301ALBZX00013000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ヒートシーラー Seal2 07801100

■仕様


※滅菌パックは含まれておりません

電源電圧	: 100-120V
最大消費電力	: 100 W
電源	: 50/60Hz
シール幅	: 12x310mm
寸法	: W452xD480xH420mm(平面設置、作業台取付時)
重さ	: 7.1kg

分かりやすい操作法



裏面のスイッチを押して、電源を入れます。

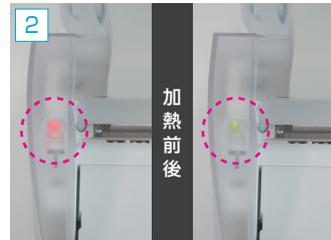

予熱中は、赤いランプ点滅します。予熱が終了すると、緑のランプが点滅します。



滅菌パックを引き出してレバーを倒します。



緑のランプが点灯してピープ音が鳴ったら、シールが完了です。



カッターをスライドさせて滅菌パックを切ります。滅菌パックの反対側もシールします。



〈関連商品〉 W&H滅菌ロール

シール性に優れ、開封時は剥がしやすい



W&Hステライゼーション社
(イタリア)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西盤屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.06.P1,000 B27 Ver1.4.1