

医薬品含有歯肉圧排材料

expasyll エキスパジル



— 簡単・明瞭で

優れた圧排を —



expasyl



20年
を超える
臨床実績

エキスパジルは、簡単に歯肉圧排効果を得ることができる歯肉圧排材料です。通常の圧排糸の圧の約1/37以下の圧力で使用されるので、上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。また、カオリン^{*1}の水分吸収作用と塩化アルミニウムを含有していることにより、歯肉圧排糸と比較し同等、それ以上の効果を得ることが出来ます。作業時間は短く、効果的、かつ安全^{*2}、是非その効果を実感してください。

^{*1} カオリナイトを主成分とし、長石類から生ずる粘土の一種

エキスパジルの効果

- ▶ 明瞭な歯肉圧排効果と乾燥作用。
- ▶ 上皮付着と歯肉線を保護します。
- ▶ 痛みを感じにくい。
- ▶ 速くて、簡潔で、優れたコストパフォーマンス。
- ▶ 20年以上に及ぶ臨床経験と多くの文献。

適用症例

エキスパジルは様々な症例に対応します。

- ▶ 従来印象
- ▶ 光学印象
- ▶ シーリング／ボンディング
- ▶ 保存症例（クラスII、V）
- ▶ インプラント症例

作用

- ▶ 効果的に歯肉圧排、乾燥を行います。
- ▶ 圧排時に他の器材と組み合わせて使用する必要はありません。
- ▶ エクスパジルの使用時の上皮付着にかかる圧力は圧排糸と比較し1/37以下。^{*2}
- ▶ 上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。
- ▶ 上皮付着が保護されるので、歯肉退縮や骨吸収のリスクが軽減されます。
- ▶ シリンジのエアーと水で簡単に除去することができます。

^{*2} Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92.


エキスパジル製品ページ▶
製品詳細はホームページより
ご覧いただけます。



エキスパジルの圧排力

市場にある様々な圧排糸、圧排材料との比較。圧排糸と比較し、上皮付着にかかる圧力は1/37以下にも関わらず、エキスパジルの圧排力そのものは、他の材料と比べて1.7~9.2倍を示している。^{*3}



Force required for movement with retraction gels and compounds (in-vitro)

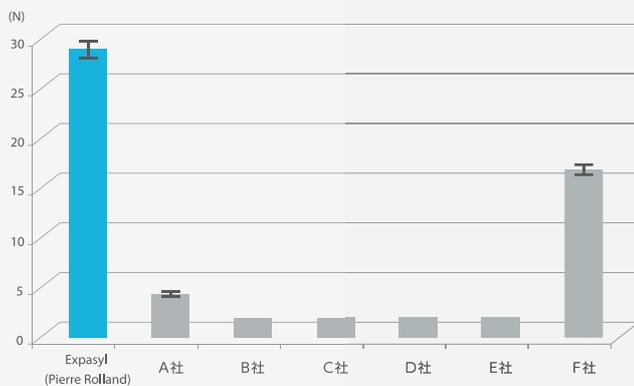

^{*3} Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.



— 症例写真 —

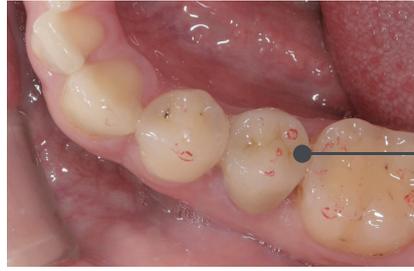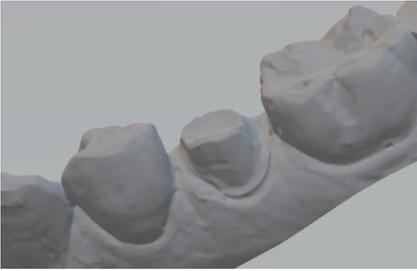


VITA社
エナミック使用

【症例写真提供】
吉岡歯科クリニック 吉岡宣史朗 先生



【症例写真提供】 Dr. G.Aldie

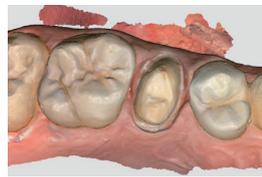

【症例写真提供】 Dr. Boulic

Q&A

Q. 時間は2分を超えて圧排しても良いでしょうか。

A. 2分を超えて圧排されると、塩化アルミニウムの影響により痛みや炎症の恐れがあるため、1~2分を目安にお使いください。

Q. カートリッジは常温で保管可能ですか。

A. 使用後は蓋をし、25℃以下の冷暗所で保管してください。25℃以上で保管されると、中身がカートリッジ内で固まってしまう恐れがございます。


Q. カニューレは使いまわし出来ますか。

A. 出来ません。カニューレは単回使用になります。


Q. カニューレがまっすぐで使いにくいのですが。

A. 指などで任意の方向に曲げてご使用いただけます。


操作手順

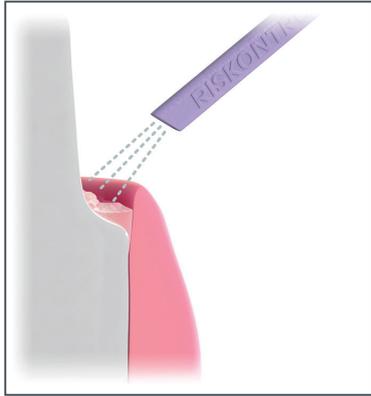


1 歯肉溝をやさしく水洗し乾燥させます。

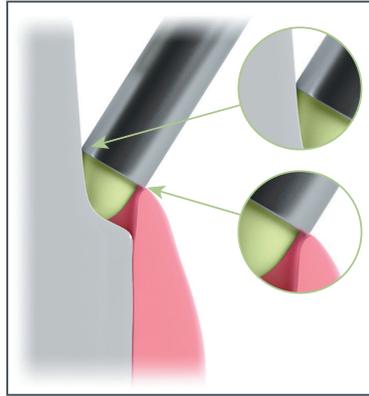


2 カニキュレの先端で歯肉溝を塞ぐようにゆっくりとペーストを押し出します。

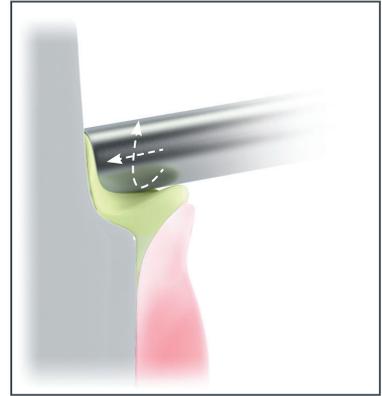


3 その後カニキュレ先端を歯に押し付けながら歯軸に沿って徐々に起こします。

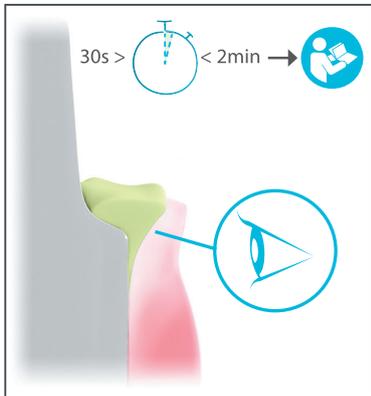

4 エキスパジルを 1～2 分間そのままの状態にしておきます。
圧排効果が出てくると歯肉が白くなってきます。

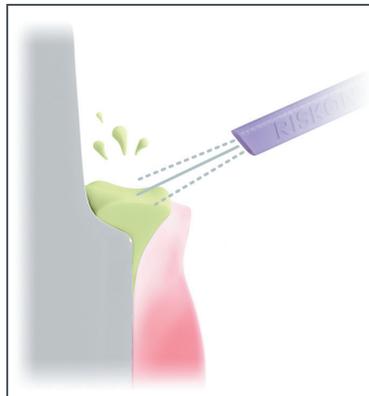

5 ウォーターで丁寧に除去します。

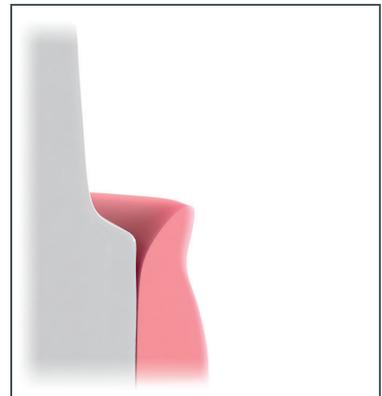

6 傷、痛み、出血を伴うことなく、歯肉圧排が完了。

エキスパジル ミニキット

カートリッジ (1g×6本 / 1箱)

保管について

- ・25℃以下の冷暗所で保管してください。
- ・使用後は蓋をして保管すること。

カニキュレ (12本 / 1箱)

単回使用

アプリケーター (ガン)

使用後はカートリッジを取り外し、使用ごとに流水で洗浄してください。

<セット内容>

- アプリケーター (ガン) ————— 1ヶ
- カートリッジ ————— 6本
- カニキュレ ————— 12本

<補充品>

- アプリケーター (ガン)
- カートリッジ (6本 / 1箱)
- カニキュレ (12本 / 1箱)