

パナジル器械練和タイプの 包装・開封方法変更のお知らせ

新包装



変更

旧包装



新包装 使用方法



青色円型キャップを反時計回りに回し取り外す。



青色円型キャップを引き外す




印象材自動練和器に黒色ジャンボカートリッジを正しくセット。



濃紺色のダイナミックミキサーを黒カートリッジに正しく挿入・装着。



練和物が均質練和されるまで最低3cm以上試し出し廃棄。

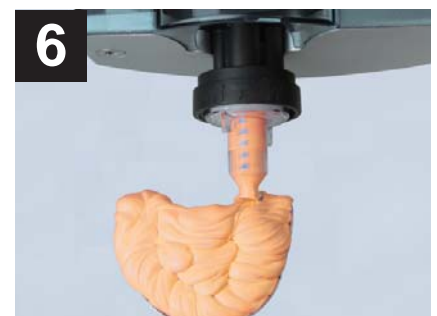

印象採得用トレーに築盛します。



濃紺色ダイナミックミキサーの白凸部を黒カートリッジ凹部に正しく挿入。



濃紺色ダイナミックミキサーを時計回りに右回しロックし、準備完了。



旧タイプの蛍光グリーン色のダイナミックミキサーは使えません。