

# Astropol®

## アストロポリッシャー

コンポジットレジン仕上げ・研磨用ポリッシャー



粒度の異なる3種類の研磨用ポリッシャーの新たな潮流。システマティックな3種類の目の細かさが美しいコンポジットレジンのつや出し研磨と滑沢性を発揮。



●アストロポリッシャーの仕上げ&研磨…それは審美と予防  
スムーズで滑沢な歯牙表面はプラークの蓄積と歯牙の変色  
を予防します。表面仕上げがより良好ならば、菌に対してより  
抵抗性の強い表面となります。スムーズな表面仕上げは、  
コンポジットレジン修復治療では特に重要です。イボクラール  
ビバデント社の「アストロポリッシャー」は、審美と予防分野  
に貢献する洗練された研磨システムです。革新的な製造  
技術とシリコン素材との融合により、コンポジットレジンの  
最高級のつや出し研磨と滑沢な表面仕上げが可能です。

- 3種類の粒度と4種類の形態があらゆる症例に簡便対応
- 歯間部や咬合面にも使用可能

- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 低速回転での研磨は身体にやさしい
- 注水下の研磨は歯肉や歯髄にやさしい

注水下で使用するため、歯肉・歯髄への影響は最小限です。



### ステップ1 粗



#### アストロポリッシャーF 形態研削・粗研磨〔フィニ シング〕

- 余剰レジンの除去および研削・予備研磨用です。
- コンポジットレジン修復表面を滑らかにします。

### ステップ2 中



#### アストロポリッシャーP 研磨〔ポリッシング〕

- 修復物の研磨用です。
- 非常に繊細で滑らかなコンポジットレジン表面性状を得ることができます。

### ステップ3 細



#### アストロポリッシャーHP つや出し研磨〔ハイ ポリッシング〕

- 最高級のつや出し研磨用です。
- 超微粒子ダイヤモンドが配合され、手早く容易に美しいつや出しが可能です。

(原寸大)

HAKUSUI


ivoclar  
vivadent®

イボクラール ビバデント社 (リヒテンシュタイン)

# Astrobrush®

## アストロブラシ

コンポジットレジン光沢研磨用ブラシ

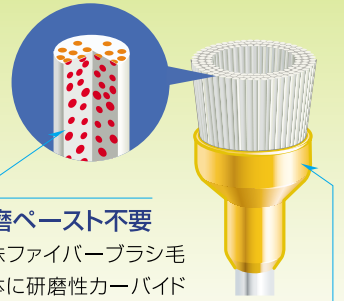

**研磨ペースト不要**  
 特殊ファイバーブラシ毛  
 全体に研磨性カーバイド  
 粒子を配合。そのまま  
 修復面を研磨できます。

**金色のネック部の見やすさ**  
 ネック部は真鍮製で金メッキを施している  
 ため、他のブラシとの識別が容易です。

「アストロブラシ」は新しいタイプの高光沢研磨用ブラシ。研磨ペーストを使用することなく、コンポジットレジン表面の高い光沢感を簡便に実現。

**ラージカップ型**

● 臼歯部の大きな修復物表面の研磨に。

**スモールカップ型**

● 前歯部や歯頸部の修復物の研磨に。  
 ● 臼歯修復物の咬合面の研磨に。

**ポイント型**

● 臼歯部の深い咬合面裂溝の研磨に。  
 ● 歯間隣接部の研磨に。

- 症例に応じた3種類の形態の使いやすさ
- 研磨ペーストは不要
- ネック部が金色で識別が容易
- 低速回転で歯肉に優しい
- オートクレーブ滅菌可能 (140℃まで)
- 手早く簡単に高光沢研磨

### 包装



**アストロポリッシャー アソートメント (24ヶ)**

- アストロポリッシャー F グレー (4形態×各3本) …12
- アストロポリッシャー P グリーン (4形態×各2本) …8
- アストロポリッシャー HP ピンク (4形態×各1本) …4

**アストロブラシ アソートメント (15ヶ)**

- アストロブラシ ラージカップ型 ……5
- アストロブラシ スモールカップ型 ……5
- アストロブラシ ポイント型 ……5

単品 [粒度/粗]	形態	入数
アストロポリッシャー F スモールフレーム型 グレー		6本
アストロポリッシャー F ラージフレーム型 グレー		6本
アストロポリッシャー F カップ型 グレー		6本
アストロポリッシャー F ディスク型 グレー		6本

単品 [粒度/中]	形態	入数
アストロポリッシャー P スモールフレーム型 グリーン		6本
アストロポリッシャー P ラージフレーム型 グリーン		6本
アストロポリッシャー P カップ型 グリーン		6本
アストロポリッシャー P ディスク型 グリーン		6本

単品 [リフィール]	形態	入数
アストロブラシ ラージカップ型		6本
アストロブラシ スモールカップ型		6本
アストロブラシ ポイント型		6本