

インスツルメントシャープナー


ディスク D.I.S.C.

簡単で衛生的な

シャープニングシステム




プレミア社製ウルトラライトインスツルメントとの相性◎

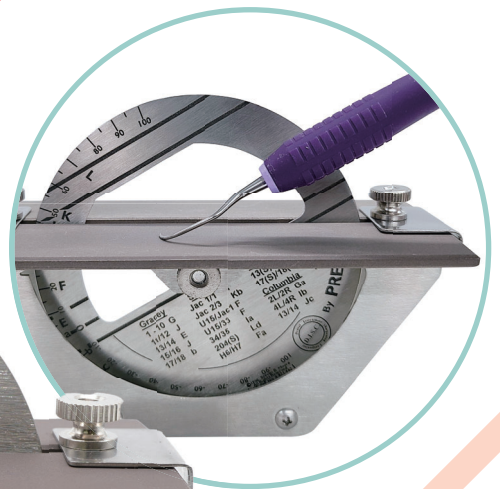

「動画で分かりやすい」



ご使用方法を
チェック!

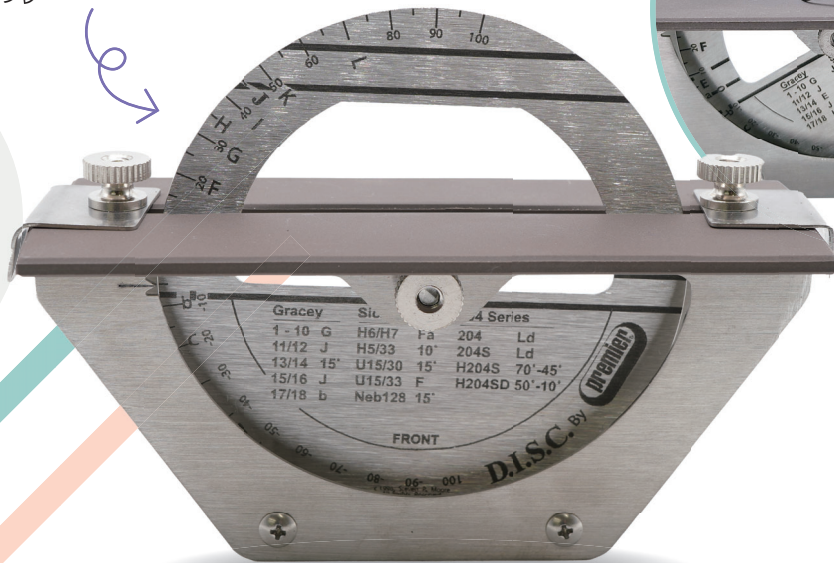

GOOD!


感染予防対策

◆ 全て滅菌可能 ◆

- ハンドルを黒い線と合わせながらスライドするだけで正確な角度にシャープニングが可能
- コンパクトで収納しやすくチェアサイドで使いやすい
- プレミアインスツルメントと相性抜群
- 器具全体を全て滅菌できるため衛生的
- 水、オイル不要のセラミックストーン

premier™

premier™

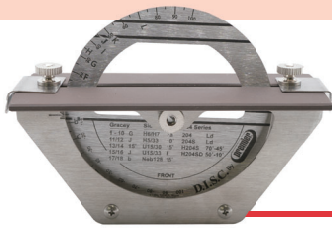

インスツルメント角度早見表

D.I.S.C. / プレミア社


グレイシー・シッケルインスツルメント

インスツルメント	角度設定表示
■グレイシーキュレット	
Gracey 1-10	G
Gracey 11/12	J
Gracey 13/14	15°
Gracey 15/16	J
Gracey 17/18	b
■シッケルスケーラー	
H6/H7	F a
H5/33	10°
U15/33	F
U15/30	15°
204S	L d
H204S	70° -45°
H204SD	50° -10°
U15/Jac1	F
Jac 1/1	F
Jac 2/3	K b
Jac 34/35	40° 0°
Neb 128	15°
NV1 Scaler	15°
NV2 Scope	G
137 Scaler	15°
Ball 5/6	50° -25°
CK6	80° -30°

ユニバーサルインスツルメント



インスツルメント	角度設定表示
■ユニバーサルキュレット	
McCalls 13/14	50° -15°
McCalls 17/18	H b
McCalls 13S/14S	H b
McCalls 17S/18S	H b
Columbia 4L/4R	I b
Columbia 13/14	J c
Columbia 2L/2R	G a
Langer 1/2	35° 0°
Langer 3/4	40° -20°
Langer 5/6	20°
Langer 17/18	40° -20°
Barnhart 1/2	50° -20°
Barnhart 5/6	50° -20°
Younger Good 7/8	30° -5°
Younger Good H-7/8	30° -5°
137 Curette	15°
UT 107/108	40° 0°
GF21	15° 15°
SIUFW204	40° -15°
※シントット(215)	15° (14) J (11)
※シントット(216)	J (12) 15° (13)

インスツルメント
(例：シントット)
の見方

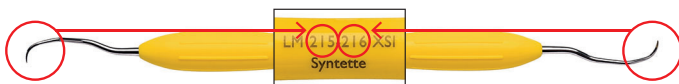

表記のある方向が指定番号です

LMユニバーサルキュレット 医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

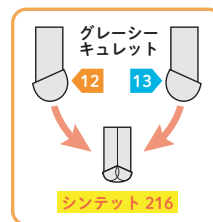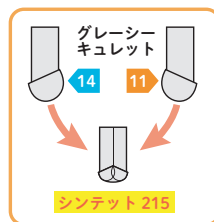

シントットはグレイシーの刃部を2つ持ったユニバーサルスケーラーです。



ご使用方法は動画をチェック！

＼簡単に速くシャープニングができます！

予防関連製品を多数取り扱っています

シャープニングセミナー・デモ・院内勉強会

随時受付中！

premier™

プレミア社
(アメリカ)



白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2024.02 P1,000 B37 Ver1.1.1