

白水 歯ブラシ・歯磨剤シリーズ

Microdent ミクロデント

デンタルブラシ〈歯科医院専売品〉

ミクロデントは歯間部や歯頸部、最後臼歯も容易にブラッシングでき、扱いやすく、コストパフォーマンスに優れたデンタルブラシです。ブラシ素材にはデュボン社の「タイネックス」を使用し弾力性にも優れ、スクラビング法等のブラッシングに最適です。



<p>#432 ふつう</p> <p>●ヘッドの大きさ：17mm ●毛先の長さ：9.5mm</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>17mm</p>	<p>#231 やわらかめ</p> <p>●ヘッドの大きさ：20mm ●毛先の長さ：10mm</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>20mm</p>
<p>#232 ふつう</p> <p>●ヘッドの大きさ：20mm ●毛先の長さ：9mm</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>20mm</p>	<p>#431 やわらかめ</p> <p>●ヘッドの大きさ：17mm ●毛先の長さ：10mm</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>17mm</p>
<p>#531 ソフト</p> <p>●ヘッドの大きさ：17mm ●テーパー毛</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>17mm</p>	<p>#532 ミディアムソフト</p> <p>●ヘッドの大きさ：17mm ●テーパー毛</p>	<p>ハンドルカラー</p> <p>17mm</p>
<p>Microdent KIDS</p> <p>#032 ふつう</p> <p>●ヘッドの大きさ：14mm ●毛先の長さ：7mm</p>			

便利で使いやすい専用キャップがついています。



人気商品

1箱200本入り

DENNOVATE ディノベート

口腔外科医・インプラント専門医監修の
インプラントと残存歯を歯周病菌から守る
ソニックサポート歯みがきジェル



インプラントにやさしい

口腔外科医・インプラント専門医が開発
身体にやさしく安心して使える

3つのフリー
インプラントにやさしい、フッ素、研磨剤、発泡剤フリー

歯肉活性成分配合で歯肉の健康を保つ
ヒアルロン酸(湿潤剤)、コラーゲン(湿潤剤)、
ビタミンC・ビタミンE配合(製品の酸化防止剤)

インプラント周囲炎予防
殺菌成分 CPC・IPMP ダブル処方

電動 / 音波歯ブラシに最適

電動 / 音波歯ブラシの特性を最大限に生かす
伸びの良いジェルタイプ

研磨剤や顆粒が引き起こす歯肉炎の防止
研磨剤フリーにより歯肉、歯、補綴物にやさしい

電動 / 音波歯ブラシに準拠
発泡剤フリーにより泡立たず磨きやすい

フッ素・研磨剤・発泡剤フリー
歯みがきジェル / 100g / グレープフルーツミント味
【販売元】株式会社ヴァンクリーフ



フッ素入り齲蝕予防ペースト スタンガード

虫歯の発生および進行を予防します

- 歯ブラシに盛ってもたれません。
- 健康を考え、着色剤を入れていない無色ペーストです。
- 虫歯にかかりやすい人や矯正用バンドを装着した患者さんにも最適です。
- フタはワンタッチの開閉と、ネジ式のどちらでも使えます。
- さわやかなミント味

歯科用

医薬部外品

主成分：0.4% フッ化第一スズ (970ppmF)


内容量：1本 122g

使用方法

通常の歯磨きやフロスを使用した後、適量歯ブラシにとり 1 分間歯を磨いてください。
それから歯間部にゲルが入り込むように 1 分間程口の中に勢いよく行き渡らせませす。
その後水を使わずに唾液を軽く吐き出します。
磨いた後は 30 分間ものを食べたり飲んだりせず、また口をゆすがないでないと効果的です。

使用上の注意

- ・食べたり飲みこまないようにしてください。(フッ化第一スズは、仮に体内に入っても排出されます)
- ・6 歳以下の幼児が多量に摂取すると永久的な歯牙の変色を引き起こす恐れがあります。
- ・使用後はフタをしっかり閉めてください。
- ・子供の手の届かない場所で保管してください。

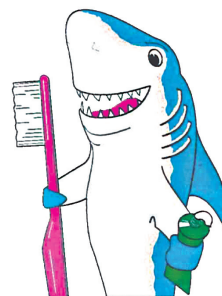

Pascal
International, Inc.

スタンガードで
歯を守ろう!!



STAN-GARD

医薬部外品承認番号 20700DZY00068000



フッ化ナトリウム/キシリトール配合 齲蝕予防ペースト ニュートラガード

ポーセレンベニア、メタルボンドクラウン、コンポジット 充填物に対しても安心してご使用いただけます。

- 980ppmF のフッ化ナトリウム含有 (pH7.0) なので、初期の2次齲蝕周辺にも変色せず、毎日使っても安心です。
- 中性のペーストなので、補綴物・充填物に影響を与えません。成人、小児を問わず安心してご使用いただけます。
- 研磨剤を含んでいないため、エナメル質へのダメージが少なく安心です。
- 発泡剤を含んでいないので、ゆっくりブラッシングができます。

フッ化ナトリウム
980ppmF
(pH7.0)

キシリトール
25.00mg/1g



基 材：カルボキシビニルポリマー、リン酸二水素ナトリウム

薬用成分：フッ化ナトリウム

甘 味 料：キシリトール/サッカリンナトリウム

着 香 剤：香料 (ストロベリー)

PH調整剤：水酸化ナトリウム

内 容 量：1本60g



NeutraGard™

医薬部外品承認番号 21300DZY00095000



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2017.07.P.000 Ver.1.0