

バキューム、インスツルメント洗浄剤

シトリザイム Citrizyme®



GO GREEN WITH ORANGE



2種類の酵素と界面活性剤で汚れをシャットアウト!

“pH7.7”とほぼ中性で環境に優しい洗浄剤

さわやかなオレンジの香り

泡立たず、毒性がないので安心

Two Powerful Enzymes

2種類の酵素が強力に働きます!



Protease

“プロテアーゼ”は、血液や組織のタンパク質を分解します。



Amylase

“アミラーゼ”は、唾液などのでんぷん質を分解します。

2種類の酵素でタンパク質やでんぷん質を分解させて……

Surfactants

『シトリザイム』の強力な界面活性剤により残渣が素速く、簡単に洗い流されます。



「シトリザイム」使用前



使用后



TAKE THE CITRIZYME TWO DAY CHALLENGE

使用方法:

バキューム洗浄

- ① 粉末1袋(4.2g)を約2Lのお湯(35℃~60℃)に溶かします。
- ② 診療後、①のシトリザイム溶液にバキュームをセットして洗浄を開始します。

インスツルメント洗浄

- ① 粉末1袋(4.2g)を約2Lのお湯(35℃~60℃)に溶かします。
- ② ①のシトリザイム溶液に汚れたインスツルメントを最低10分間、浸漬します。
- ③ 浸漬後、流水でよく洗浄してから消毒、滅菌します。

包装形態: 1パック(1袋4.2g入×50袋)



『シトリザイム』を2日間試して3日目にどれくらいきれいになっているかお試し下さい。



パスカル社(アメリカ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クスタ12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2013.1.P.10000