

ご使用頂いている先生方の声




「私はいつもワルサーマトリックスを使っています。ワルサーマトリックスは簡単、迅速、安全であらゆる症例に対応できる点が素晴らしいと思います。その上、耐久性に優れており、完璧なシステムだと思います。」

Matthias Bacher (Wabern), スイス



「私は日常の診療でワルサーマトリックスを使用しています。簡単、迅速にどんな歯牙にも装着することができ、個々の窩洞に最適な充填治療を即座に行うことができます。更に付け加えるならば、コットンロールをスプリングランプの下に入れるだけで保持できるので簡易防湿に便利です。」

Dr. Vera Maiwald, Berlin, ドイツ

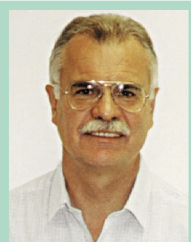

「ワルサーマトリックスは汎用性が高い上、装着が簡単で安全に取り外しができるので愛用しています。ほとんど全ての充填材に使用できます。また、コットンロールホルダーとしても機能します。」


Dr. Ulrich Grohe, Reutlingen, ドイツ

ワルサーマトリックスは世界中の3万人以上の歯科医にご愛用頂いています。

ワルサー マトリックの種類

番号	型	特徴	バンドの高さ	適用歯牙
1	X	乳臼歯にも使用可能	5.0mm	小白歯
2	X		6.5mm	小白歯
3	X		5.0mm	大白歯
4	X		6.5mm	大白歯
5	O	乳臼歯にも使用可能	5.0mm	小白歯(小)
6	O		6.5mm	小白歯(小)
7	O	乳臼歯にも使用可能	5.0mm	小白歯
8	O		6.5mm	小白歯
9	O		5.0mm	大白歯
10	O		6.5mm	大白歯

医療機器許可番号 27BY0101

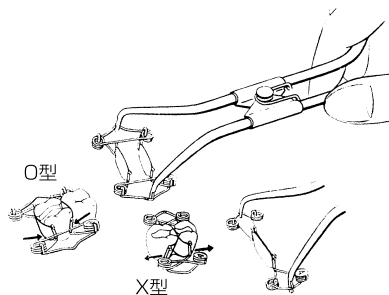

白水貿易株式会社

〒001-0010 札幌市北区北10条西4丁目 楠本第10ビル ☎(011)709-7721
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル7F ☎(045)222-0381
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
 ホームページ <http://www.hakusui-trading.co.jp/>

白水商品のご用命は

DR. WALSER DENTAL GMBH



ワルサー マトリックスセット
ワルサー マトリックス

...the safe and perfect shape

会社概要

Dr. Walser Dental社は1947年の創業以来、優れた歯科用器具を製造し、世界各国に供給し続けています。この間、ワルサー社は多くの特許を取得してきました。歯科医の先生方の協力を得て先生方のために開発されたこれらの製品の中には窩洞充填用マトリックスの洗練されたシステムであるワルサーマトリックスと専用鉗子も含まれています。この完璧なシステムは徹底的な科学的研究、実践的な経験によりその豊富な形態やサイズが生み出されました。

製品概要

ワルサーマトリックスはワルサー社を代表する製品です。3万人を遙かに超える世界中の歯科医に愛用されています。とりわけ日本へは30年以上に亘って輸出し続けています。このマトリックスは全て1つ1つ手作りです。

長所

ワルサーマトリックスには以下のような優れた特長があります。

- 1 装着、取り外しが数秒で行えます。
- 2 一回の動作で装着でき、最適な充填が行えます。
- 3 コルセットのようにピッタリとフィットし安全です。
- 4 円錐型の歯牙に自然に適応します。
- 5 マトリックスを装着した状態で口を閉じ、かみ合わせることができます。
- 6 ネジやスパナは必要ありません。
- 7 コットンロールホルダーとしても機能します。



- 8 簡単に滅菌でき、耐久性に優れています。
- 9 マトリックス部分は非常に薄くなっています。
(僅か0.05mm)

簡単な使用方法



1 ワルサーマトリックスの専用鉗子でスプリングを十分に広げ、歯間部に挿入します。



2 鉗子を緩めてワルサーマトリックスから外します。



3 ワルサーマトリックスは円錐型の歯牙の周りにコルセットのようにピッタリとフィットします。
(写真はO型)



ワルサーマトリックス独自の簡単な方法で歯牙に装着することができます。

X型

ワルサーマトリックスは素早く装着でき、コルセットのようにピッタリと安全にフィットします。

種類

ワルサーマトリックスにはO型とX型があります。

O型：MOD窩洞や単独歯の窩洞

X型：歯間部にスペースがあり、窩洞が2歯にまたがるケース



ワルサーマトリックスセット：
マトリックス10ヶ、滅菌トレー、専用鉗子付

専用鉗子とマトリックスは単品でも販売しています。
ワルサーマトリックスは10種類のサイズがあります。
バンドの高さ：5.0mm、6.5mm 厚み：0.05mm

*ご注意

一部の滅菌器では乾燥段階で132℃以上に上がるものがあります。

ワルサーマトリックスの滅菌トレーの最高温度は132℃までです。それ以上の温度にしますと変形する恐れがありますのでご注意ください。

