

■ URM ペリオハードチップ (メタル)

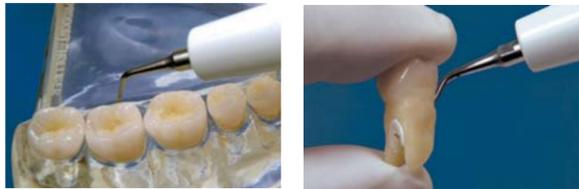
「スプラソン P-Max+ (プラス)」及び「スプラソン P-MAX 2」は、ペリオチップを歯肉縁下に挿入、発振しても、チップを発熱させる事のない弱いパワーで発振させるペリオモードを備えています。ペリオモードを使用する事で、歯肉縁下のスケーリング、ルートプレーニングを安全に行う事ができます。

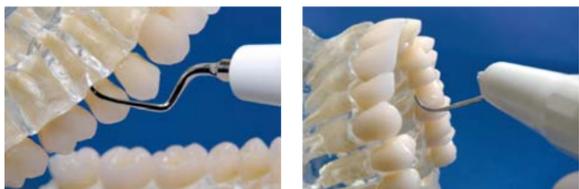


URM の特長

1. 手用キュレットスケーラーに比べ、特殊チップにより直視できない部位や複雑な根面にも容易に到達できます。
2. チップの種類が少なくても、ほとんどの部位への適用が可能です。
3. チップの作業効率がよいので、力がほとんどいらず、疲労も少なく、術者の負担が少なくて済みます。
4. スプレーにより術野の洗浄を同時に行い、外部注水システムを使用する事で、生理食塩水等の使用も可能です。

ペリオハードチップとペリオソフトチップは姫野 宏先生 (前北海道大学 歯学部) により開発されました。URM ペリオハードチップ (H1 ~ H4L、HLM 3 ~ HLM5、HY1 ~ HY3 計 14 本) を使用の際は、ペリオモード 1 ~ 10 以内で、患者の状態や歯石 (バイオフィルム) の沈着量、厚さ等を観察しながらコントロールしてください。最初はペリオモードの 1 ~ 3 位を目安にし、状態に応じてパワーを上げていく方が良いでしょう。エンドモードやスケーリングモードのパワーで使用されるとチップが破折する恐れがありますので必ずペリオモードで使用してください。

商品コード・商品名	用途・内容	標準価格
4130-10 URM ペリオハードチップ H1	ユニバーサルタイプ ダイヤモンド付  主に前歯に使用しますがほとんどの部位のルートプレーニングに適用できます。	¥9,000
4130-20 URM ペリオハードチップ H2R	根分岐部・歯間部用 ダイヤモンド付  主に小臼歯、大臼歯に使用。右に角度がついています。(深いポケット内、臼歯の根分岐部、狭い部位等のルートプレーニングに使用します。)	¥9,000
4130-21 URM ペリオハードチップ H2L	根分岐部・歯間部用 ダイヤモンド付  主に小臼歯、大臼歯に使用。左に角度がついています。(深いポケット内、臼歯の根分岐部、狭い部位等のルートプレーニングに使用します。)	¥9,000

商品コード・商品名	用途・内容	標準価格
4130-30 URM ペリオハードチップ H3	ユニバーサルタイプ キュレット  歯面に沈着した大量の歯石の除去等、スケーリングの最初に使用します。根面のマイクロファイバーのカットにも用います。手用キュレットと同様、刃部側面を砥石でシャープニングして用います。	¥8,000
4130-40 URM ペリオハードチップ H4R	根分岐部・歯間部用 キュレット  臼歯の根分岐部、歯間部用の狭い部位、彎曲や複雑な根面等、到達・適合しにくい部位のスケーリング・ルートプレーニングに活用します。マイクロファイバーのカットにも使用します。手用キュレットと同様、刃部側面を砥石でシャープニングして用います。	¥9,000
4130-41 URM ペリオハードチップ H4L	根分岐部・歯間部用 キュレット  臼歯の根分岐部、歯間部用の狭い部位、彎曲や複雑な根面等、到達・適合しにくい部位のスケーリング・ルートプレーニングに活用します。マイクロファイバーのカットにも使用します。手用キュレットと同様、刃部側面を砥石でシャープニングして用います。	¥9,000
4130-02 URM ペリオハードチップ 6本入セット	H1、H2R、H2L、H3、H4R、H4L、ユニバーサルレンチ 各 1 本入り 	¥48,000
4130-13 URM ペリオハードチップ H1 3本パック	H1 が 3 本入りのお徳用パックです。 	¥24,000
4130-33 URM ペリオハードチップ H3 3本パック	H3 が 3 本入りのお徳用パックです。 	¥21,000