

Surgical handpieces and contra-angles



サージカルハンドピース

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ● コントラアングル(20倍速) | WI-75E/KM、WS-75、WS-75LG |
| ● コントラアングル(等速) | WS-56、WS-56LG |
| ● コントラアングル(45°) | WS-91、WS-91LG |
| ● コントラアングル(90°) | WS-92、WS-92LG |
| ● ストレートアングル | S-11、S-11LG、S-15 |

インプラントメッド SI-915

コードレスドライバ IA-400

Made in
AUSTRIA



LINE UP

Contra



WS-75LG
WS-75



Mini LED+

ライトなし



WI-75 E/KM



ライトなし



WS-56LG
WS-56



Mini LED+

ライトなし



WS-91LG
WS-91



Mini LED+

ライトなし



WS-92LG
WS-92



Mini LED+

ライトなし

Straight



S-11LG
S-11



Mini LED+

ライトなし



S-15



ライトなし


1 エルゴノミックデザイン



- 人間工学に基づいたデザイン設計により、長時間のオペでの疲労が軽減できます。
- 右利き、左利きの両方に対応。

右利き・左利き
両方に対応

3 多様な冷却機構

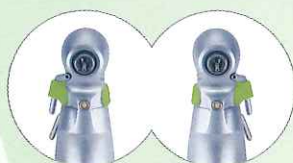

- 右にも左にもセットできる注水クリップ。バー内部注水時もクリップが指位置の邪魔になりません。

5 特殊なヘッド構造(75シリーズ)

- ヘキサゴンチャック対応のため、高トルクでの使用が可能となります。




2 理想的な照明(ミニLEDライト)



- ミニLEDがバーに近い位置に設置できるため影の影響を受けにくくなります。
- LEDサイズが小さいため、切削屑などによりLEDがダメージを受ける可能性が低くなります。

4 衛生的で長寿命

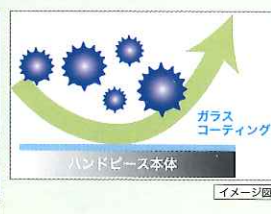

- キズが少なく衛生的に使用が可能
- 綺麗に長く使用可能

6 アクセシビリティを向上させた 45°ヘッド




- 45°アングルヘッドが追加になり、臼歯部のアプローチ時に視認性が向上しました。




分解と組立が簡単！！

コントロール
タイプ

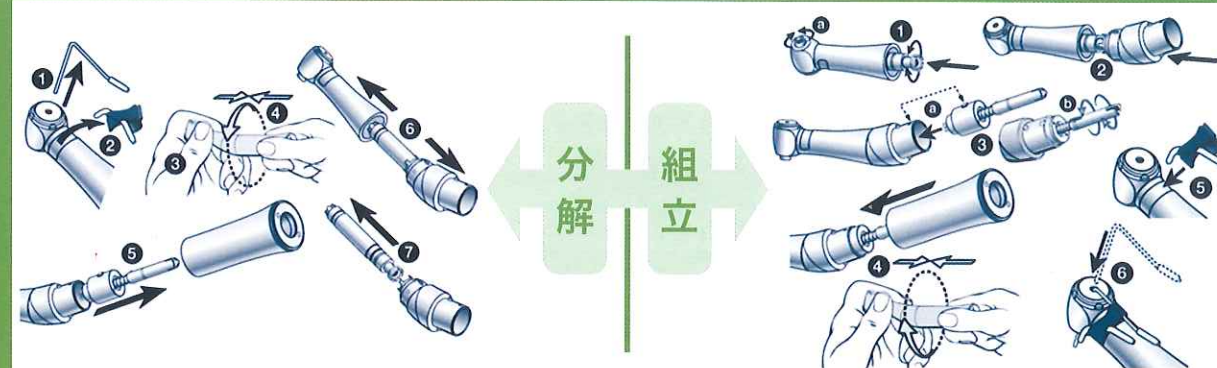

ストレートアングル
タイプ

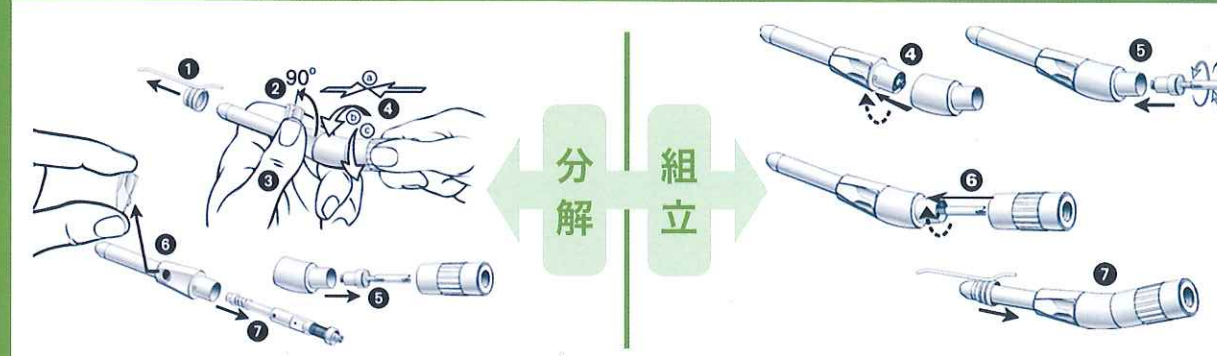

型番・標準価格	WI-75E/KM ¥160,000	WS-75LG ¥209,000	WS-75 ¥176,000	WS-56LG ¥193,000	WS-56 ¥150,000	WS-91LG ¥193,000	WS-91 ¥160,000	WS-92LG ¥193,000	WS-92 ¥160,000	S-11LG ¥219,000	S-11 ¥143,000	S-15 ¥167,000
LEDライト付		○		○		○		○		○		○
ギア比	20:1	20:1	20:1	1:1	1:1	1:2.7	1:2.7	1:2.7	1:2.7	1:1	1:1	1:1
最大回転数	50,000 rpm	40,000 rpm	50,000 rpm	40,000 rpm	50,000 rpm	40,000 rpm	50,000 rpm	40,000 rpm	50,000 rpm	40,000 rpm	50,000 rpm	30,000 rpm
パートタイプ	CA	CA	CA	CA	CA	FG	FG	FG	FG	CA	CA	CA
外部注水孔数	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1
分解		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

インプラント用モーター

インプラントメッド SI-915

世界中で多くの先生方に愛用されているW&H社のインプラント用モーターシステム「インプラントメッド」がデザイン、機能が一新されて新たに登場しました。よりコンパクトで人間工学に基づいたデザインに加えて、大型ディスプレイにより視認性が高まり、また、衛生面の配慮も強化されています。

新しいモデルにはインプラントタッピング専用のモードが用意され、最大70Ncmの大トルクと相まって各社のインプラントシステムへの適用性が向上しました。

また、専用のサージカルコントラングル「WI-75LEDG」を組み合わせることによりLEDの光源下でストレスなくオペに集中して頂けます。

オートスレッド カッター機能




洗浄・消毒・滅菌が可能なモーター



エレガントでコンパクトなデザイン



見やすく大きなディスプレイ

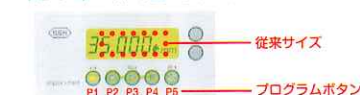

70 Ncm
5 プログラム



プログラム

処置の種類	ギア比	回転数(rpm)	設定可能範囲(rpm)	回転方向	注水ポンプ	トルク(Ncm)	設定可能範囲(Ncm)
P1	智歯抜歯等	1:1 (等速)	35,000	300~40,000	正転	オン	最大5.5
P2	パイロットドリリング	20:1 (減速)	1,200	15~2,000	正転	オン	最大
P3	インプラントドリリング	20:1 (減速)	800	15~2,000	正転	オン	最大
P4正転	インプラント埋入	20:1 (減速)	15	-	正転	オン	20 5~70 5Ncm刻み、平均32Ncm
P4逆転	インプラント撤去	20:1 (減速)	30	-	逆転	オフ	60 5~70 5Ncm刻み、平均32Ncm
P5	スレッドタッピング	20:1 (減速)	20	-	正転/逆転	オン	20 20~60 10Ncm刻み

仕様

販売名:	インプラントメッド SI-915
バーの最大トルク:	70 Ncm
モーターの最大トルク:	5.5 Ncm
公称電圧範囲内のモーター回転数:	300 ~ 40,000rpm
最大注水量:	90 mL/分以上 (100%、80%、65%に調節可能)
電源電圧:	100 V (50/60Hz)
本体サイズ:	幅235 x 奥行140 x 高さ100mm
本体重量:	2.7kg

管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号: 225ALBZX00003000

セット内容

- インプラントメッド SI-915本体
- 電源コード (100V用)
- ケーブル付モーター
- フットコントローラー
- 付属品: 輸液容器用スタンド、モーターホルダ、ロッキングピン、注水チューブ (3本入)

フットコントローラー S-N1



リテイニングスクリュー

コードレスドライバー IA-400

管理医療機器 医療機器認証番号: 224AGBZX00093000




充電式 25 rpm 8-40 Ncm 軽量

インプラントのカバースクリュー等の締め付けに

- 使用するラッチシステムの種類を減らすことが可能。
- 8-40Ncmの範囲内で1Ncm刻みの精密なトルク設定が可能。
- オートストップ機能を装備。
- 軽量でフィンガースイッチにより片手で操作が可能。
- モーターの回転数...25rpm
- 80:1の減速コントラ「IA-80」が付属。

Maintenance

ハンドピース メンテナンスの流れ

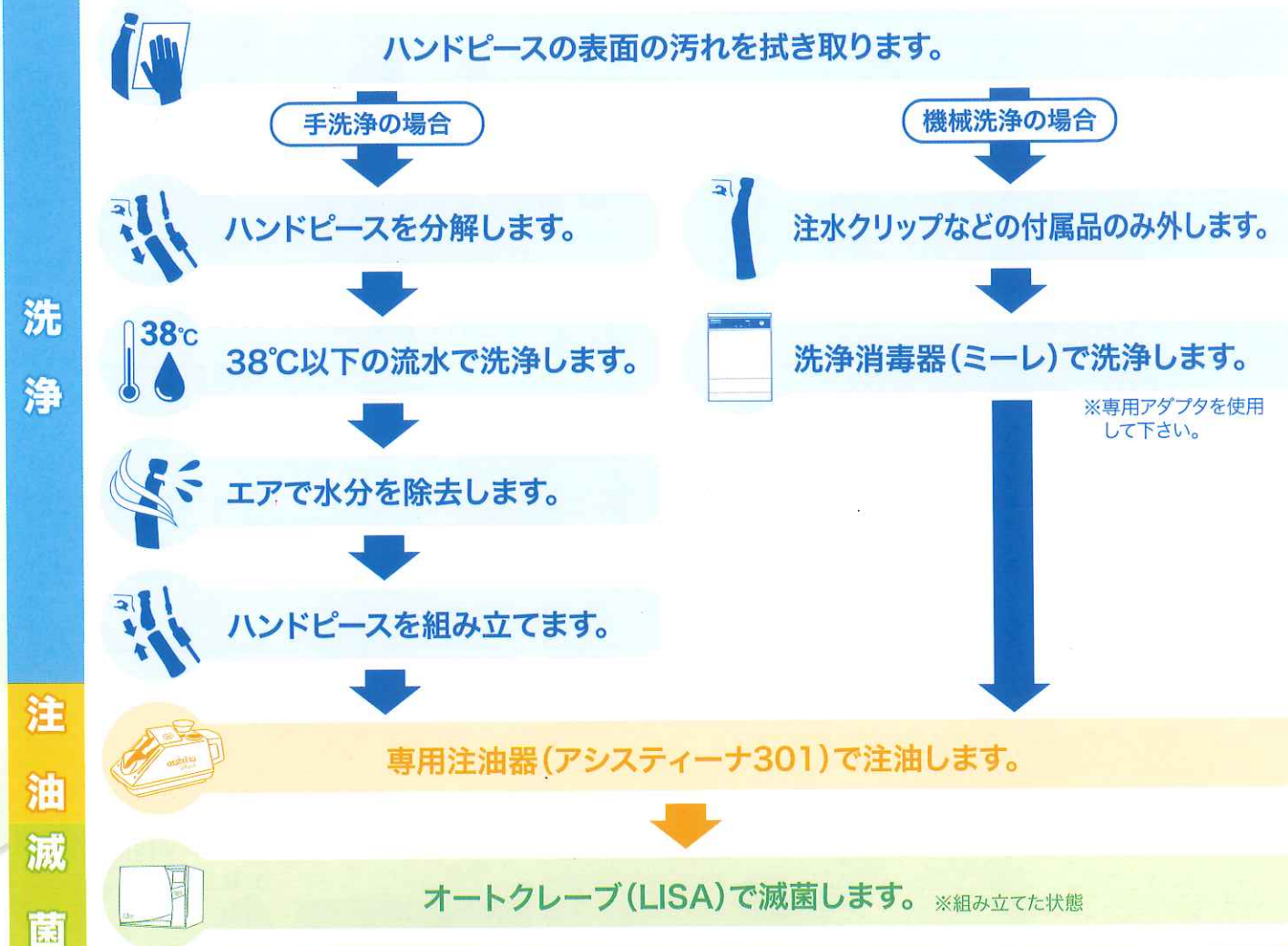

歯科用器具 洗浄 / 消毒システム ミーレ ジェットウォッシャー

軟水化装置 標準装備


ISO15883-1/2

ミーレジェットウォッシャーで洗浄・消毒して、リサで滅菌

熱風乾燥機能付
G7891のみ



G7891
60cm 幅

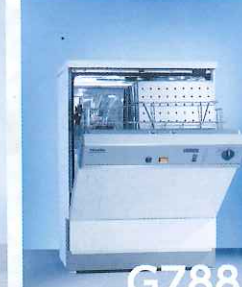

G7881
60cm 幅



G7831
45cm 幅

毎分 400 リットルの強力なジェット水流による洗浄

※(循環水量はG7891とG7881が約400L/分 G7831は約200L/分)

医療機器製造販売承認番号 1363X00018000011/1363X00018000009/1363X00018000010

Miele PROFESSIONAL W&H STERILIZATION



Lisa クラスBオートクレーブ
リサ

管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器承認番号 22100BZX01064000



W&H
オーストリア

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
http://www.hakusui-trading.co.jp/