

ノズルの種類	使用するパウダー	用 途
標準  ● 歯肉縁上ノズル	クラシック パウダー 主成分: 重炭酸ナトリウム 粒子サイズ: 約76μm  無香料 コーラ ラズベリー ミント レモン 医療機器届出番号 27B1X00020224008 一般医療機器	● スケーリング後の仕上げ ● ホワイトニング前の準備 ● 歯間部や小窩裂溝の清掃 ● エッチング前の歯面清掃 ● 矯正ブラケットの清掃 ● 歯肉縁上のバイオフィルム、プラーク、ステイン、暫間セメント残渣の除去

オプション  ● ペリオイージーノズル (ペリオノズルA)	ペリオ パウダー 主成分: グリシン 粒子サイズ: 約25μm 無香料  医療機器届出番号 27B1X00020224014 一般医療機器	● 歯肉縁下のバイオフィルム除去 ● 歯周病やインプラント歯周炎のケア ● 3-8mmの歯周ポケットの清掃
オプション  ● ペリオメンテナンスノズル (ペリオノズルB)		● 歯周メンテナンス ● 4mmまでの歯周ポケットの清掃
オプション  ● ペリオノズル (ペリオノズルC)		● 歯周病やインプラント歯周炎のケア ● 8-10mmの歯周ポケットの清掃

■ 仕 様



- ハンドピース
長さ: 180~205mm(使用アダプターにより異なる)
高さ: 70~95mm(使用アダプターにより異なる)
質量: 114~155g(使用アダプターにより異なる)
- 水流量 15mL/分 ± 5mL/分
- 駆動空気圧 最高4bar

医療機器認証番号 224ALBZX00036000 管理医療機器

■ セット内容



- | | | | |
|--|---|--------------------|-------|
| ① エア N ゴー イージー本体 | 1 | ④ クラシック パウダー | 10 |
| ② 歯肉縁上ノズル | 1 | ⑤ メンテナンス キット | 1 |
| ③ タービンアダプター | 1 | ⑥ クリーニングワイヤー | 長、短 1 |
| 〔カボマルチフレックス、ピアンエアー、WSH、シロナ、ミッドウエスト4ホールのいずれか1本〕 | | ⑦ 清掃用シリンジセット | 1 |



I AM
FLEXIBLE



air N GO
easy
エア N ゴー イージー
(アンド)

一本のハンドピースで歯肉縁下にも歯肉縁上にも柔軟に対応
簡単な操作で歯面やインプラントを清掃するエアーポリッシャー

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
http://www.hakusui-trading.co.jp/

2019.04.P3,000 A10 Ver.1.2.1

ACTEON

効果的で手軽なエアーポリッシングを実現

DUAL FUNCTIONS

歯肉縁上／歯肉縁下の両方で使用可能

- 歯肉縁上のポリッシング……日々の予防的なポリッシング
- 歯肉縁下のポリッシング……メンテナンス、歯周ポケットやインプラント周囲のケア
- 簡単な操作と高パフォーマンス

SINGLE HANDPIECE

一本のハンドピースで広範囲をカバー

- タービンハンドピース回路に接続するだけですぐに使えます。
- 軽量ハンドピースは360°回転可能なのでケアが必要な部位に迅速、正確にアクセスできます。



分解できるので
お手入れ簡単!



COMPLETE SOLUTION

パウダーとノズルの種類が豊富

4種類のノズルと6種類のパウダーの組み合わせで症例に適した処置が可能

歯肉縁上／縁下を4種類のノズルで処置

最先端の流体力学に基づき設計された4種類のノズルは常に安定したスプレー噴射を可能にし、歯肉縁上/歯肉縁下のバイオフィルムを効率良く除去します。

歯肉縁上ノズル 標準

- 歯肉縁上の予防ケアに適したノズル
- “クラシック”パウダーと共に使用
- 患者への負担を少なくし、迅速で効果的な施術可能

クラシック パウダー



臨床写真提供: Dr. P. Rouas (フランス)

ペリオノズルA ペリオ イージー ノズル オプション

- “ペリオ”パウダーと共に使用
- 靴べらのような斬新なデザインで歯肉縁下に挿入し易い
- 非外科的な歯肉縁下の歯面やインプラントの処置に使用(深さ3~8mmの歯周ポケット)
- 各歯面に5秒間噴射



臨床写真提供: Dr. C. Lim (イギリス)

ペリオノズルB ペリオ メンテナンス ノズル オプション

- 粒子が細かい“ペリオ”パウダーと共に使用し、歯周メンテナンスを行います。
- 粘膜炎をケアし、健康な状態に
- 歯周病の進行を防ぐ



臨床写真提供: Dr. C. Lim (イギリス)

ペリオノズルC ペリオ ノズル オプション

- “ペリオ”パウダーと共に使用
- 外科的、非外科的な歯肉縁下の処置に使用(トンネリング、フラップ手術)
- 側方からの強力スプレー
- 深い歯周ポケット(深さ8~10mm)の清掃




臨床写真提供: Dr. A. Patel (イギリス)

歯肉縁上専用


クラシック パウダー

主成分: 重炭酸ナトリウム
粒子サイズ: 約76μm

- 痛覚や出血を軽減するために研究開発された粒子サイズと形状です。
- 種類は無香料タイプが1種類と100%天然のアロマやエッセンシャルオイルをベースにしたフレーバー付きタイプが4種類(コーラ、ラズベリー、ミント、レモン)です。

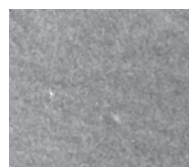

▲ パウダー使用後のエナメル質。僅等のダメージは見られません。×300

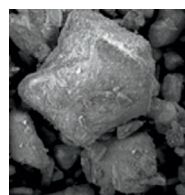

▲ 丸みを帯びたクラシックパウダーの粒子形状 ×1000



無香料 コーラ ラズベリー ミント レモン

歯肉縁下専用


ペリオ パウダー

主成分: グリシン
粒子サイズ: 約25μm

- 主成分のグリシンはコラーゲントタンパク質を構成するアミノ酸の一つで食品にも使用されています。
- インプラントのメンテナンスや歯周ポケットのプラークやバイオフィルム除去に効果を発揮します。



無香料

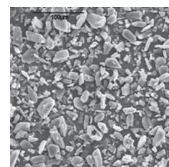

▲ ペリオパウダーの粒子 ×1000

SEM写真提供: フランス国立科学研究センター ボルドー固体材料化学研究所

使用可能なカップリング

	カボ マルチプレックス	ピアンエアー	W&H	ミッドウエスト 4ボール	シロナ
アダプタ					



アクテオン社の
YouTube チャンネルで
エア N ゴー イージーの
動画をご覧ください。

airNGO
easy