


■ クラスBオートクレーブ リサの滅菌サイクル

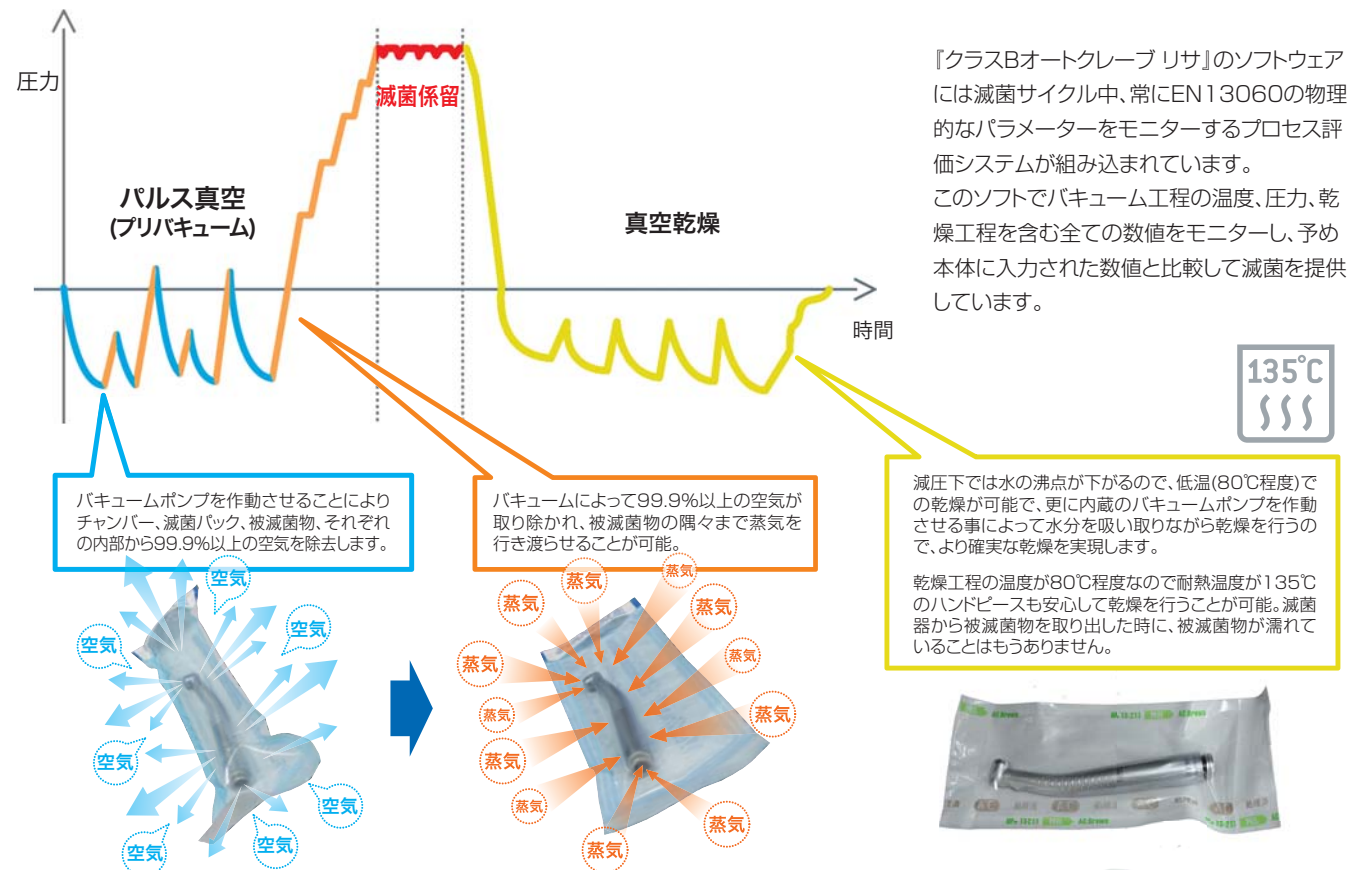

■ スペックシート

滅菌サイクル	Bユニバーサル134	Bブリオン134	Bユニバーサル121	お急ぎサイクル
温度	134℃	134℃	121℃	134℃
滅菌係留時間	4分	18.5分	15.5分	3.5分
標準滅菌時間(滅菌量2kg)	31分	47分	44分	15分
最大滅菌量	6kg:固形 9kg:DIN規格13999に適合した滅菌コンテナ/カセット使用時	1.5kg:多孔体		0.6kg(未包装のハンドピース)

定格電圧: AC200V/10A
(電源は単相200V、15A以上で準備してください。)

消費電力: 2000W
電源周波数: 50/60Hz

大きさ: W465 X H449 X D599mm
重さ: 51.7kg
水タンク容量: 4ℓ(給水タンク)、3.5ℓ(排水タンク)
チャンパー: 直径250 X 440mm



リサ 22ℓ

■ 関連商品

器具の洗浄・消毒はミーレ社の洗浄器におまかせください。パワフルに洗浄して、院内業務を効率化します。

ミーレ ジェットウォッシャー PG8591
毎分500ℓの循環水量で強力洗浄
ドライプラスホットエア乾燥機能付



ドライサイクル機能

製造販売届出番号 1382X10362000017 一般医療機器

ミーレ ジェットウォッシャー PG8581
毎分500ℓの循環水量で強力洗浄
エコドライ余熱乾燥機能付



余熱乾燥機能

製造販売届出番号 1382X10362000016 一般医療機器

Miele
PROFESSIONAL

W&H

W&Hステリライゼーション社(イタリア)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2018.5.P.3000

W&H

HAKUSUI

クラスBオートクレーブ
lisa 22ℓ

リサは減圧乾燥
器具は乾燥して
サイクル完了!

必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。
お急ぎサイクルは乾燥しません。



クラスB
EN13060適合

大容量
22L

省スペース
壁面に付けて設置可

お急ぎ
サイクル
15分

販売名クラスBオートクレーブリサ 一般的名称小型未包装用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000 管理医療機器、特定保守管理医療



Lisa MB 17L

クラスBオートクレーブに22Lという新提案!

『クラスBオートクレーブ リサ』のチャンバーは22Lの大容量。
従来機種(17L)と比較し約30%の容量アップに成功しました。
しかも、その滅菌時間は約31分*。大容量と機能性のアップにより、
より効率的、効果的な滅菌が可能になりました。


*「Bユニバーサル134」モード、標準量(2kg)の滅菌量の場合

チャンバーサイズ



17L

アルミトレイサイズ

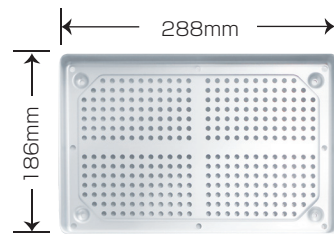


トレイ5枚付

約30%
UP!

Lisa 22L



22L

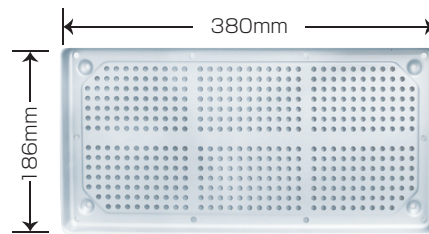

トレイ5枚付

クラスBオートクレーブが出来ること

小型高圧蒸気滅菌器のヨーロッパ規格EN13060
では小型高圧蒸気滅菌器の性能要件とそれに付随
するテスト方法が規定されています。それらは医科、
歯科、獣医科などで幅広く使われています。
血液や体液と接触する可能性のある材料や器具には
様々な形状のものが、それぞれの形状に適した
滅菌サイクルで滅菌する必要があります。
ヨーロッパ規格EN13060ではクラスB、クラスS、
及びクラスNという3種類の滅菌サイクルのクラスが
あります。その中で唯一クラスBサイクルだけが全て
の形状の被滅菌物(固形、中空物、多孔体、一重包装、
二重包装)を滅菌できるとされています。



EN13060で定められた滅菌サイクル

『リサ滅菌』で万全の院内感染予防を!

被滅菌物の量に応じた滅菌時間



eco dry +


被滅菌物の量に応じて乾燥時間を自動的に調整する事によって
滅菌サイクル全体の時間を自動的に調整します。被滅菌物重量
が約2kgの場合の滅菌時間はわずか31分程度。乾燥時間を自動
的に調整する事によって被滅菌物が熱にさらされる時間が短
くなるので、被滅菌物の寿命を延長します。

自動給水(オプション) 又は 手動給水



クラスBオートクレーブ リサの給水は2通りの方法で行えます。容器を使用してタンクに給水
する従来の方法に加えW&Hステライゼーション純正自動給水システム「マルチデム C27」
を使用した自動給水が可能です。「マルチデム C27」を使用すると給水タンクの水の残量が
少なくなると自動的に給水されます。

お急ぎサイクル

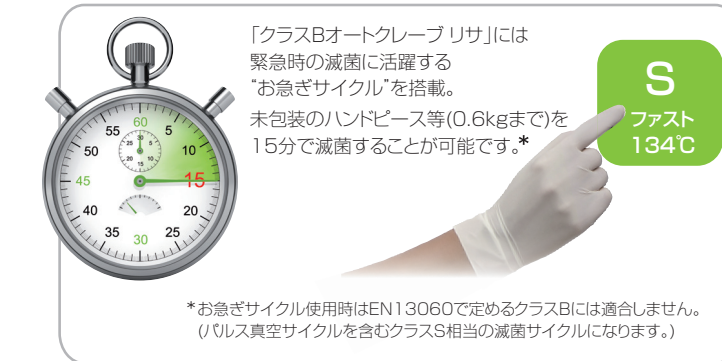

優れた清掃性



クラスBオートクレーブ リサは表面がスムーズなデザインなので、
お手入れが簡単。また、タンクカバーは工具が無くても取り外すこ
とができるので、タンクへのアクセスや清掃が簡単。

シンプル操作



トレーサビリティ



USBメモリーが標準装備されており、全ての
滅菌サイクルのレポートが自動的に保存され
ます。(USBメモリー8GB付)

省スペース設計



クラスBオートクレーブ リサを支える脚間の
奥行きはわずか45cm。(オプション装着時)

ユーザーガイダンス



タッチスクリーンのヘルプボタンを押すと操作方法
などの情報が表示されます。

メンテナンスガイド



ドアガスケット、バクテリアフィルター、ダストフィル
ターなどの消耗品の交換方法などを説明した3D
アニメーションがタッチスクリーンに表示されます。

滅菌コンテナに対応



DIN規格13999に適合した滅菌コンテナ/カセットを使用
することで、最大9kgの被滅菌物の積載が可能です。
※通常の滅菌の最大積載量は6kgです。