VITA AKZENT® Plus ナチュラルなシェード効果の再現 商品ラインアップ 包装形態 商品番号 / シェード 商品名 スプレー(75mL) パウダー ペースト(4g) ■ ボディーステイン BS01 /ID-VITA VIA ACCIONI PIE BOON STARRI BSO1 半透明のボディーステイン BS03 オレンジ ベース材のシェード効果を調整 BS04 ___ オリーブグレー BS05 グレーブラウン ES01 □ ホワイト ES08 🔲 ピンク ■ エフェクトステイン ES02 ___ クリーム ES10 ライラック カバー力が高いマスキングステイン FS03 レモンイエロー ES04 サンシャインイエロー FS11 **ブル**ー 自然な表面効果 VITA AKZENT" Plus BFECT STAINS PASTE (Thibrinish: Bad Sakinger Ger ES05 オレンジ レイヤリング時の色づけ ES06 ラセット(あずき色) FS13 グレー ES07 カーキ ES14 ブラック CSA A ■ クロマステイン クラシカル CSB B VIIIA WHA RECTENT PRO CONCORNA TURNS A 39 csc c 彩度・色相をコントロール CSD D CSL /ID-■ クロマステイン 3Dマスター CSM2 M+ VITA VIX ACCENT PAR CREAMA STREES M2 36 CSM3 M++ 彩度・色相をコントロール CSR LVVK CSIO ___ オレンジ ■ グレーズ VIIIA WILLACEMP PRO CLAZE SE Francisco VITA RAZESPER 均質で光沢のある表面 WTA AKZENT® Plus GLAZE PASTE 4g %5g ■ グレーズ-LT VITA BAZINT N BAZI SPAN 焼成温度850℃未満の陶材用 WTA AKZENT® Plas GLAZE LT PASTE 49 Watershore Bad Stoleges Series 低融点グレージング材 - Training %5g ■ フルオグレーズ-LTスプレー 焼成温度850℃未満の陶材用 低融点グレージング材

セット品

■ ビタ アクセントプラス パウダーキット

■ フィニッシングエージェント

商品コード:13529850

最適な蛍光性を出す

表面性状を維持したまま グレージングが可能

<セット内容> ・ボディーステイン パウダー 3g…5ヶ (BS01~BS05)
・エフェクトステイン パウダー 3g…14ヶ (ES01~ES14)

・グレーズ パウダー…1ヶ ・グレーズLTパウダー…1ヶ

・フィニッシング エージェント パウダー…1ヶ

・パウダーフルイド20mL…1ヶ

■ ビタ アクセントプラス クロマステインキット クラシカル 商品コード:13529925

<セット内容> ·パウダーA 3g (各1ヶ) ·パウダーB 3g

・パウダーD 3g

·パウダーC 3g ・パウダー フルイド 20mL ・クロマステイン シェードガイド A-D

■ ビタ アクセントプラス ペーストキット

商品コード:13529851

〈セット内容〉・ボディーステインペースト 4g…5ヶ (BS01~BS05) ・エフェクトステインペースト 4g…14ヶ (ES01~ES14)

・グレーズ ペースト 4g…1ヶ ・グレーズLTペースト 4g…1ヶ

・フィニッシング エージェント ペースト 4g…1ヶ

・ペーストフルイド15mL…1ヶ

■ ビタ アクセントプラス クロマステインキット 3Dマスター

商品コード:13529927

<セット内容> ·パウダーIO 3g オレンジ (各1ヶ) ·パウダーL 3g イエロー ·パウダーM2 3g ・パウダーM3 3g

・パウダーR 3g レッド ・パウダー フルイド 20mL

・クロマステイン シェードガイド 3Dマスター

■ ビタ アクセントプラス ミキシングプレート



中央がドーナツ型に窪んでおり、 その周りに半球型の窪みが22個 配置されています。ステインやグ レーズのミキシングに便利です。

■ ビタ アクセントプラス シェードガイド

ビタ アクセントプラス シェード ガイドを通して補綴物を見る ことで最終色調の確認ができ

■ ビタ アクセントプラス クロマステイン シェードガイド



▲ 3Dマスター

管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00042000



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12F ☎(03)5217-4618 〒464-0075 名古屋市干種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F **25**(052)733-1877 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 **25**(06)6396-4400

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618

https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2022.3.P2,000 D26 Ver.2.2.1

VITA vita shade, vita made.

VITA AKZENT® Plus

→ イメージ通りにシェードを再現!

+ 豊富な色の選択肢!

+ セラミックス・ジルコニア修復物に 使用可能!



VITA AKZENT® Plus

セラミック・酸化ジルコニウム用ステイン材

ビタ アクセントプラス






ピタ アクセントプラス クロマステイン



クラシカルA-Dの適用一覧

クロマの変更はシェードグループ内だけで可能です。 ステインの濃さは混合の密度によって変わります。 塗布回数や厚みによって色彩が上がります。

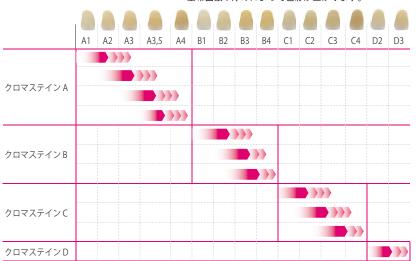

3Dマスターの適用一覧

クロマステイン (イエロー)		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5 → 3L2.5		4L1.5* → 4L2.5*	
クロマステイン M2		1M1 → 1M2 2M1-	→ 2M2	3M1 → 3M2	4M1*→4M2* 5M1—	► 5M2
クロマステイン M3			2M2—	≥2M3 3M2−	→3M3 4M2* → 4M3*	5M2 -> 5M3
クロマステイン (レッド)		2R1.5 -> 2R2.5	3R1.5	→ 3R2.5	4R1.5* → 4R2.5*	
クロマステイン IO	;	※クロマステイン IO(イ) 混合してください。	ンテンスオ	レンジ)は対応す	「るクロマステインへ1:50	の割合で

Application

EFFECT and BODY STAINS











ピタ アクセントプラス /フルカダレーズLTスプレー

蛍光性を持たないジルコニア材に

最適な蛍光性を付けるグレーズ材です。

- 自然な蛍光性を再現し高い審美性が得られます。
- スプレーなので簡単に早く操作ができます。
- ➡ ジルコニア長石系、 リチウムガラスセラミックスに使用できます。



VITA ITA AKZENT® Plus GLAZE SPRAY

➡ チェアーサイドでも手軽に グレーズ処理やシェード付けを行えます。

<u>ピタ アクセントブラス グレーズ/グレーズLTスプレー</u>

- 🕂 ボタン一押しで均質な表面処理が可能。
- ➡ 特製スプレーヘッドにより的確に 目標物に吹き付けることが出来ます。




使用前に缶をよく振り、修復物との間を 約10cmに保ちながら噴射してください。

ピタ アクセントプラス パサダー



VITA

TA AKZENT® Plus

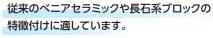

- 分量調整が出来、経済的です。
- 長期保存が可能です。



専用液でよく混和して使用してください。 専用液の混液比を調整することにより、お好みの

パウダーの稠度調整に 使用します。



【スプレー・パウダー】焼成チャート

■ スプレー ボディーステイン、エフェクトステイン、グレーズ、グレーズ ■ パウダー スブレー、ボディースプレー、フィニッシング材、グレーズLT

	予備 乾燥 [°C]	→ [分]	分	/ [℃/分]	温度 約[℃]	(分)	真空 [分]	→ [°C]
ビタ ブロック	500	4.00	5.37	80	950	1.00	ı	1
ジルコニア	400	4.00	5.36	80	850	1.00	ı	1
ビタ VM9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	1	600
ビタ VM9 アドオン	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-	600
ビタ VM13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
ビタ VMKマスター	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
グレーズLTパウダー	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-	-
フルオグレーズLTスプレー	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-	-



ピタアクセントプラスペースト



修復物の特徴付けを 素速く簡単に行うことが出来ます。

- 均等な表面処理を素早く簡単に出来ます。
- ┡ ペースト同士を混ぜ合わせてシェードの カスタマイズが可能です。
- ▶ 希釈や混ぜ合わせることが出来ます。



乾燥したペーストに混ぜて、 適切な稠度に調整可能です。

■ペースト ボディーステイン、エフェクトステイン、 グレーズ、フィニッシング材、グレーズLT、フルオグレーズLT

	予備 乾燥	→	~	~	温度	→	真空	1
	[℃]	[分]	[分]	[℃/分]	約[℃]	[分]	[分]	[℃]
ビタ ブロック	500	6.00	5.37	80	950	1.00	-	-
ジルコニア	400	6.00	5.36	80	850	1.00	-	-
ビタ VM9	500	6.00	5.00	80	900	1.00	1	600
ビタ VM13	500	6.00	4.45	80	880	1.00	-	-
ビタ VMKマスター	500	6.00	5.15	80	920	1.00	-	-
グレーズLTペースト	400	6.00	4.45	80	780	1.00	-	-

