


商品ラインアップ


| 商品名                                                              | シェード                                                                                                                         | 商品番号                                                                                                         | 包装形態 |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                              | スプレー | パウダー | ペースト |
| <b>■ ボディーステイン</b><br>半透明なグレージングステイン<br>ベース材のシェード効果を調整            | イエロー<br>イエローブラウン<br>オレンジ<br>オリーブグレー<br>グレーブラウン                                                                               | BS01<br>BS02<br>BS03<br>BS04<br>BS05                                                                         |      |      |      |
| <b>■ エフェクトステイン</b><br>カバー力が高いマスキングステイン<br>自然な表面効果<br>レイアリング時の色づけ | ホワイト<br>クリーム<br>レモンイエロー<br>サンシャインイエロー<br>オレンジ<br>ラゼット(あずき色)<br>カーキ<br>ピンク<br>ダークレッド<br>ライラック<br>ブルー<br>グレーブルー<br>グレー<br>ブラック | ES01<br>ES02<br>ES03<br>ES04<br>ES05<br>ES06<br>ES07<br>ES08<br>ES09<br>ES10<br>ES11<br>ES12<br>ES13<br>ES14 |      |      |      |
| <b>■ クロマステイン クラシカル</b><br>彩度・色相をコントロール                           | A系<br>B系<br>C系<br>D系                                                                                                         | CSA<br>CSB<br>CSC<br>CSD                                                                                     |      |      |      |
| <b>■ クロマステイン 3Dマスター</b><br>彩度・色相をコントロール                          | L系<br>M+<br>M++<br>R系<br>オレンジ                                                                                                | CSL<br>CSM2<br>CSM3<br>CSR<br>CSIO                                                                           |      |      |      |
| <b>■ グレーズ</b><br>均質で光沢のある表面                                      |                                                                                                                              |                                                                                                              |      |      |      |
| <b>■ グレーズ-LT</b><br>焼成温度800℃未満の陶材用<br>低融点グレージング材                 |                                                                                                                              |                                                                                                              |      |      |      |
| <b>■ フィニッシングエージェント</b><br>表面性状を維持したまま<br>グレージングできます。             |                                                                                                                              |                                                                                                              |      |      |      |

■ ビタ アクセントプラス ミキシングプレート

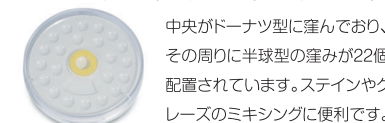

中央がドーナツ型に窪んでおり、その周りに半球型の窪みが22個配置されています。ステインやグレーズのミキシングに便利です。

■ ビタ アクセントプラス シェードガイド

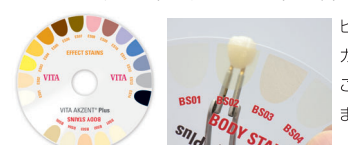

ビタ アクセントプラス シェードガイドを通して補綴物を見ることで最終色調の確認ができます。

■ ビタ アクセントプラス クロマステイン シェードガイド



▲ クラシカル

▲ 3Dマスター

焼成チャート

- スプレー ボディーステイン、エフェクトステイン、グレーズ、グレーズ  
 ■ パウダー スプレー、ボディースプレー、フィニッシング材、グレーズLT

|             | 予備乾燥<br>[℃] | →<br>[分] | →<br>[分] | →<br>[℃/分] | 温度<br>約[℃] | →<br>[分] | 真空<br>[分] | →<br>[℃] |
|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| ビタ ブロック     | 500         | 4.00     | 5.37     | 80         | 950        | 1.00     | -         | -        |
| ジルコニア       | 400         | 4.00     | 5.36     | 80         | 850        | 1.00     | -         | -        |
| ビタ VM9      | 500         | 4.00     | 5.00     | 80         | 900        | 1.00     | -         | 600      |
| ビタ VM9 アドオン | 500         | 4.00     | 3.30     | 80         | 780        | 1.00     | -         | 600      |
| ビタ VM13     | 500         | 4.00     | 4.45     | 80         | 880        | 1.00     | -         | -        |
| ビタ チタンケラミック | 400         | 4.00     | 4.00     | 93         | 770        | 1.00     | 5.00      | 400      |
| ビタ VMKマスター  | 500         | 4.00     | 5.15     | 80         | 920        | 1.00     | -         | -        |
| グレーズLTパウダー  | 400         | 4.00     | 4.45     | 80         | 780        | 1.00     | -         | -        |

- ペースト ボディーステイン、エフェクトステイン、  
グレーズ、フィニッシング材、グレーズLT

|            | 予備乾燥<br>[℃] | →<br>[分] | →<br>[分] | →<br>[℃/分] | 温度<br>約[℃] | →<br>[分] | 真空<br>[分] | →<br>[℃] |
|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| ビタ ブロック    | 500         | 6.00     | 5.37     | 80         | 950        | 1.00     | -         | -        |
| ジルコニア      | 400         | 6.00     | 5.36     | 80         | 850        | 1.00     | -         | -        |
| ビタ VM9     | 500         | 6.00     | 5.00     | 80         | 900        | 1.00     | -         | 600      |
| ビタ VM13    | 500         | 6.00     | 4.45     | 80         | 880        | 1.00     | -         | -        |
| ビタ VMKマスター | 500         | 6.00     | 5.15     | 80         | 920        | 1.00     | -         | -        |
| グレーズLTペースト | 400         | 6.00     | 4.45     | 80         | 780        | 1.00     | -         | -        |

管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00042000

VITA  
ビタ社(ドイツ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618  
 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2019.04.P2,000 D26 Ver.2.1.1

VITA AKZENT® Plus

セラミック・酸化ジルコニウム用ステイン材

ビタ アクセント プラス



NEW!!

シェードを簡単に  
コントロールできる  
クロマステイン  
が追加!!

CHROMA STAINS

Stains with a Distinctive Character



VITA shade, VITA made. VITA




# New 新商品

## ビタ アクセント プラス クロマステイン

クロマ(彩度)をコントロールできるステインです。

同じ色調グループのクロマステインを、塗布回数や濃度を変えて使用する事により、段階的にクロマ(彩度)を上げることができます。

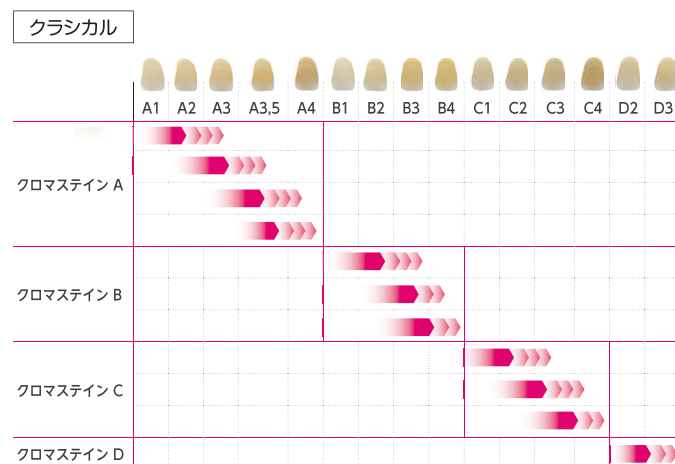

### 3Dマスター


|            |  |               |           |               |             |                 |           |  |
|------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| クロマステイン L  |  | 2L1.5 → 2L2.5 |           | 3L1.5 → 3L2.5 |             | 4L1.5* → 4L2.5* |           |  |
| クロマステイン M2 |  | 1M1 → 1M2     | 2M1 → 2M2 | 3M1 → 3M2     | 4M1* → 4M2* | 5M1 → 5M2       |           |  |
| クロマステイン M3 |  |               |           | 2M2 → 2M3     | 3M2 → 3M3   | 4M2* → 4M3*     | 5M2 → 5M3 |  |
| クロマステイン R  |  | 2R1.5 → 2R2.5 |           | 3R1.5 → 3R2.5 |             | 4R1.5* → 4R2.5* |           |  |

すべてのセラミック・ジルコニア補綴物に使用できます。

オールセラミック ベニヤ

ジルコニアクラウン

金属焼付用陶材

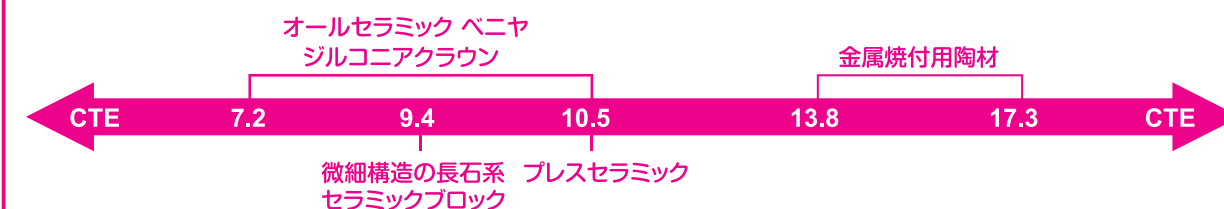

微細構造の長石系セラミックブロック

プレスセラミック

## ビタ アクセント プラス スプレー

ボタンー押しで均質な表面処理が可能

チェアーサイドでも手軽にグレース処理やシェード付けを行えます。

- 表面の処理を簡単に均等に行えます。
- 特製スプレーヘッドにより的確に目標物に吹き付けることが出来ます。



## ビタ アクセント プラス ペースト

ナチュラルシェードのペーストタイプ



修復物の特徴付けを素速く簡単に行うことが出来ます。

- 均等な表面処理を素速く簡単に。
- ペースト同士を混ぜ合わせてシェードのカスタマイズが可能。
- 希釈や混ぜ合わせることが出来ます。



## ビタ アクセント プラス リキッド



ペースト用

ビタ アクセント プラス ペースト フルイドは乾燥したペーストに混ぜて、適切な稠度に調整可能です。



パウダー用

パウダーの稠度調整にはビタ アクセント プラス パウダーフルイドを使用します。


(注) 上記2つの液を混ぜないでください。

## ビタ アクセント プラス パウダー

経済的なパウダータイプ



従来のベニヤセラミックや長石系ブロックの特徴付けに適しています。

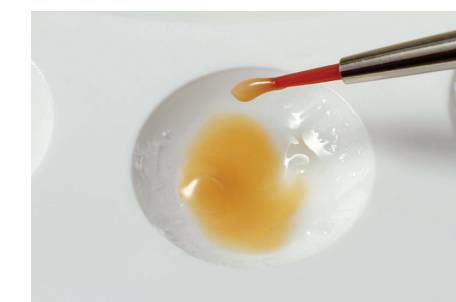

専用液でよく混和して使用してください。専用液の混液比を調整することにより、好みの粘度で使用できます。