

印象材自動練和器

# ミクロナミキサーⅡ



QRコードを読み取って  
使用動画をチェック！

アルジネート印象材を

簡単操作で均質に！

手練和では得られない！

練和トルクのすごいやつ！

**待望の新機種が**

**登場！**



簡単

スピーディー

気泡なし



■手練和



■ミクロナミキサーⅡ使用

ミクロナミキサーⅡで練和すると  
気泡が入らず、印象材の性能を  
100% 発揮することができます。

# 正確な印象採得のためには——印象材に気泡のないのが前提です

ミクロナミキサーⅡは、モータートルクが強く、本体が安定(重さ 17.3kg)しているため、立ちあがりの初速が速く、練り具合に差が出ます。

## ミクロナミキサーⅡの自転 / 公転運動

印象材を入れたミキシングカップが同時に自転 / 公転運動します。自転は印象材をこねる働き、公転はこねた印象材を遠心力で押さえつけ気泡を排除します。この2つの作用により、より短時間で高品質の練和物が得ることができます。



## 作業ステップ



アルギン酸印象材と水を正確に計量し、ミキシングカップに入れます。



粉末と水をなじませてから、ミキシングカップのフタを閉じてください。



ミキサーに入れフタを閉じます。

(アルギン酸の練和時は、ミキシングカップのフタの中央にある穴を指で押さえ、数回振ってからミキサーにセットしてください。)



タイマーをセットしスタートボタンを押します。



練和終了後、スパチュラ(大)を使用して印象材を取り出します。

## ■タイマーセットの目安

アルギン酸印象材 10～16 秒

印象材、室温等により練和時間は適宜、変える必要があります。

スパチュラ(大)はミキシングカップに合わせたカーブになっていて、印象材の取り出しが容易で無駄がなく、傷をつけません。



## ミクロナ計量器 (オプション)

アルギン酸印象材は、粉 / 液比が大切なポイントになります。専用計量器を使用すると、正確に水を計量することができ、精密な印象を採得できます。



## サイズ :

W203×H305×D270mm

重さ : 17.3kg

電源 : 100V、50/60Hz

## 付属品 :

ミキシングカップ(大) …… 2

スパチュラ(大) …… 1

医療機器届出番号 27B1X00020230006  
一般医療機器

**MIKRONA**  
Swiss Dental Technology

ミクロナ社(スイス)

**白水貿易株式会社**

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2F ☎(03)5217-4618  
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>