

操作手順

- 1 **オン/オフ** ボタンを押すとディスプレイが表示され電源が入ります。次に **ドアリリース** ボタンを押すと自動でドアが少し開きます。ドアノブを持ち、手前に引くとドアが大きく開きます。
- 2 洗浄物を配置、収納します。次にドアを閉じ、軽く押すと自動でドアが閉まります。
※ **ドアリリース** ボタン開=LED ランプ点灯 **ドアリリース** ボタン開=LED ランプ消灯
- 3 **プログラムの選択**
1 **2** **3** の **ショートカット** ボタンを使ってプログラム選択します。
洗浄には **1** **Vario TD デンタル** を選択します。 **2** = **すすぎ** **3** = **排水** ※電源オフにしても前回選択したプログラムはそのまま次回にも表示されます。
- 4 PG8581/PG8591 乾燥機能は予め電源オンにすると常時 **乾燥** ボタン LED 点灯(有効)の設定になっています。
- 5 洗浄開始予約を使用する場合は、**OK** **OK** ボタンを押し、次に **上** または **下** ボタンを押すとディスプレイに現在時刻が表示されます。次に **上** または **下** ボタンで任意の開始時刻(24h 表示)を設定します。まず時を合わせ→ **OK** **OK**、分を合わせ→ **OK** **OK** するとセット完了。次に **スタート/ストップ** ボタンを押すとディスプレイ下段に開始時刻が表示され、**スタート/ストップ** ボタン LED が点灯したままポーズ状態となります。開始時刻になると洗浄を開始します。終了後予約設定時刻はキャンセルされています。
※分を合わせ→ **OK** **OK** のセット完了前まではキャンセルボタンが使えますが、セット完了後にキャンセルするには一度電源をオフにしてください。
注意：出来る限り長時間の予約設定は避けてください。洗浄効果に悪影響を及ぼし、器具の錆を発生させる場合があります。
- 6 **スタート/ストップ** ボタンを押すと洗浄プログラムが開始されます。
- 7 **プログラム終了**
PG8581 庫内が 70℃以下になるとドアが自動で半開きになり、ブザーが鳴りそのままの状態を終了します。ドアノブを持ち、手前に引けばドアが大きく開きます。ドアを保持しているガイド(ギアロック)は自動で収納されます。
PG8591 ブザーが鳴り、**スタート/ストップ** ボタン LED が消灯し、**ドアリリース** ボタン LED が点滅します。次に **ドアリリース** ボタンを押すと自動でドアが少し開きます。ドアノブを持ち手前に引けばドアが大きく開きます。
注意：庫内が 70℃以上の時は **ドアリリース** ボタンを押すとディスプレイに「庫内が熱すぎます！」のメッセージが出ます。**OK** **OK** ボタンで解除しドアを開けられますが、やけどなどに十分注意してください。

プログラム一覧

Vario TD デンタル [標準プログラム]

所要時間：PG8581 約 65 分 / PG8591 約 75 分

一般の衛生要件を満たすための ISO15883-1 に準拠したプログラム。血液汚れが多量に付着した器具やタービン・コントラアングルハンドピース・バキュームチップなど中空のあるものに適した洗浄除菌プログラムです。

予備すすぎ → 本洗浄 55℃ → 中間すすぎ 1 → 中間すすぎ 2 → 最終すすぎ 93℃ → 乾燥

すすぎ

所要時間：3 分

ひどい汚れや長時間放置し経過した器具、薬液浸漬した器具を通常洗浄する前に水洗いするプログラムです。

注意：薬液浸漬させた器具を通常の洗浄プログラムで洗うと、洗浄槽内に大量の泡が発生します。洗浄前に必ず行ってください。

排水

所要時間：1 分

プログラムを中断した場合などに強制排水するプログラムです。

ストップ (プログラム中断)

すでに開始したプログラムを中断する際に使用します。このプログラムを使用するのは内部の洗浄物が激しく振動するなどやむを得ない場合に限られます。

スタート/ストップ ボタンを少し長押しするとディスプレイに「プログラム中断 はいいいえ」が表示されます。次に **上** **下** ボタンで「はい」を選び、**OK** **OK** ボタンを押すとピンコード入力が表示され、**上** **下** ボタンと **OK** **OK** ボタンで左から順に 8000 と入力します。するとプログラムがストップします。**ドアリリース** ボタンでドアが開きます。

注意：庫内が 70℃以上の時は **ドアリリース** ボタンを押すとディスプレイに「庫内が熱すぎます！」のメッセージが出ます。やけどなどにご注意ください。

必要に応じて保護手袋を着用し、洗浄物を正しく配置してください。ドアを開けて排水プログラムを選択、開始し、次に再度必要なプログラムを実行してください。

■ 液体洗剤とすすぎ剤の補充

液体洗剤供給方法



- ◇液体洗剤供給容器の残量が低下すると、左図上のようにディスプレイに表示が出ます。
- ◇交換用液体洗剤 5L 容器を左図下のよう差し替えてください。
- 注意：専用の液体洗剤以外は絶対に使用しないでください。





すすぎ剤供給方法



- ◇すすぎ剤供給容器の残量が低下すると、左図上のようにディスプレイに表示が出ます。
- ◇ドアを完全に開け、マークの付いた黄色の蓋を外し専用ピーカーとロートを使用して投入口の MAX マークまで入れてください。約 200ml
- 注意：こぼれたすすぎ剤は必ず拭き取ってください。プログラム中の過度の泡立ちを防止することができます。専用のすすぎ剤以外は絶対に使用しないでください。

■ 再生塩（軟水化装置）の補充

再生塩供給方法

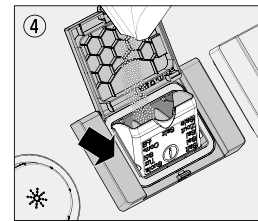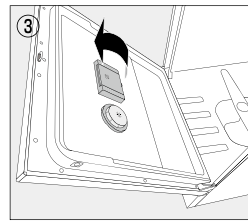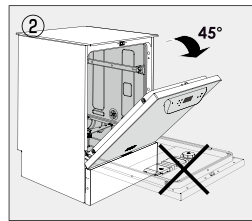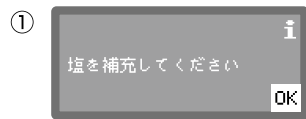




- ◇容器内の再生塩の残量が少なくなると、上図①のようにディスプレイに表示が出ます。

- ◇上図②のようにドアを約 45° の角度で開きます。(完全に開かないでください。)
- ◇マークのついた再生塩容器の黄色いボタンを押しふたを開きます。(上図③)
- 次に白い投入口を上図④のように引き出します。
- ◇再生塩を 1 袋または最大 2kg までを限度に補充してください。(上図④)
- ◇補充後蓋を閉じ「すすぎプログラム」を必ず実行してください。注意：再生塩容器に水を入れしないでください。専用の再生塩以外は絶対に使用しないでください。

■ メンテナンス

洗浄槽内フィルターの清掃方法

洗浄槽部分のフィルターは、大きな汚れが循環システムに侵入するのを防ぎます。フィルターは汚れによって詰まることがありますので毎日点検し、必要であれば清掃してください。

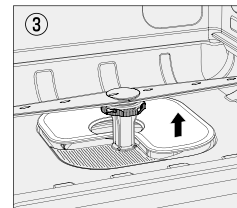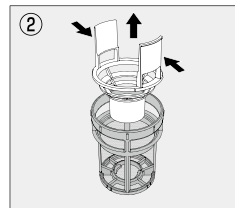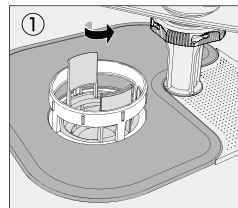


- ◇超微粒子フィルターを矢印の方向に回し、粗目フィルターと一緒に取り外します。(上図①)
- ◇留め具を両側から押し、粗目フィルターを上を持ち上げて取り外します。
- ◇粗目フィルターと超微粒子フィルターの間においてあるファインフィルターを取り外します。(上図②)
- ◇フラットフィルターは最後に取り外します。(上図③)
- ◇フィルターを洗います。◇逆の順番でフィルターを取り付け直します。注意：各フィルターがしっかり取まっているか確認しながら作業してください。

HEPA フィルター交換方法 *PG8591 のみ



- ◇ディスプレイに「HEPA フィルター交換」が表示されたら交換してください。
- ◇本体足元のとびらを開きます。
- ◇つまみを外側に押し、HEPA フィルターを外します。
- ◇両側のくぼみをつかみ、フィルターを手前に引きます。
- ◇新しい HEPA フィルターを入れます。
- 保持クリップにしっかりととはまっていることを確認します。
- ◇サービスパネルを閉じます。

操作時間カウンターリセット方法

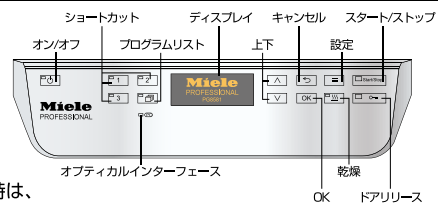

HEPA フィルターを交換した時は、下記の操作を行いカウンターをリセットしてください。

☐ 設定ボタン押す

設定項目に「フィルター交換」または「フィルターメンテナンス」がある場合

- 「設定」を選び
- 上下ボタンで「フィルター交換」または「フィルターメンテナンス」を選び
- 「HEPA フィルター」を選び
- 「フィルター残時間表示」を選び
- 「リセット はい/いいえ」を 上下ボタンで「はい」を選び

設定項目に「フィルター交換」または「フィルターメンテナンス」がない場合

- 「設定」を選び
- キャンセルボタンを 1 回押す
- 上下ボタンで「拡張設定」を選び
- 上下ボタンで左端を数字 8 にして連続 4 回 を押す(ピンコード 8000 入力)
- 上下ボタンで「フィルターメンテナンス」を選び
- 「HEPA フィルター」を選び
- 「フィルター残時間表示」を選び
- 「リセット はい/いいえ」を 上下ボタンで「はい」を選び

☐ オン / オフボタンでメインスイッチをいったんオフにする

☐ 再度メインスイッチオン