

ペリオワイス 歯周ポケット診査用プローブ PerioWise®

医療機器届出番号 27B1X00020221007



●ペリオワイス 1本入 UNC12



●ペリオワイス 3本入 UNC12




●ペリオワイス 1本入 赤緑



●ペリオワイス 6本入 赤緑

クリニカルヒント

- 使用を繰り返すごとに、少しずつ色落ちてきます。
- 先端の色が見えなくなったら、新しいものと交換してください。(塗料はFDA承認で無毒・安全です。)

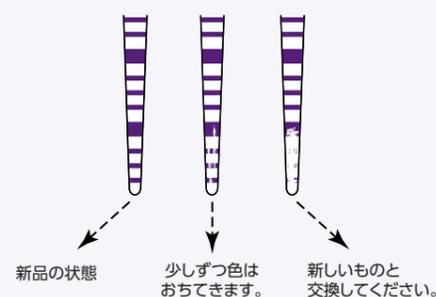

- 滅菌・消毒時、他の金属インスツルメントとの接触により、色はがれたりしますので滅菌バッグ等の利用をお勧めします。
- フェノール含有の薬液は使用しないで下さい。
- オートクレーブ滅菌時の温度は、135℃以下にして下さい。



UNC 12
1mm increments up to 12mm

Original 3-5-7-10mm

関連製品

ウルトラライトキュレット 医療機器届出番号 27B1X00020220025

●グレイシーキュレット / 7種類



●コロンビア / 2種類



Premier Products



●グリッター
歯面研磨用ペースト/ミント味
カップ入(2g) 200個
医療機器届出番号 27B1X00020220081



●RCプレップ シリンジタイプ
根管形成拡大補助材
シリンジ(9g) 2本
医療機器承認番号 14800BZY00481000



●RCプレップ ポンプタイプ
根管形成拡大補助材
ポンプ(18g) 1瓶



●ハイポーゲン
2.5%次亜塩素酸
ナトリウム 1瓶

PerioWise® "The Friendly Probe®"

ペリオワイス

歯周ポケット診査用プローブ

特殊プラスチック製の歯周ポケット用プローブは、先端が丸い形状で柔軟性が高く歯肉に優しい。患者さんへの快適さとスピーディで精度の高い診査のために



Periodontal probe

premier. Inspired solutions for daily dentistry™

インプラント・補綴物・天然歯の歯周ポケットを優しく簡便に速く測定できます。
濃紫色の目盛りがより高精度のアセスメントを可能にし、口腔ガン診査にも最適です。

PROFESSIONAL ASSESSMENT

FAST

読みやすい高精度の目盛り

UNC12

鮮やかな濃紫色の目盛り[1mm間隔]により、くっきり読みやすく速く正確な歯周ポケット測定ができます。

歯周ポケット診査前

●ペリオワイズUNC12を挿入 **見やすい!**

●金属製のプローブを挿入 **読みづらい**




EASY

補綴物・天然歯にも安心、傷つけない

UNC12

柔軟性のある特殊プラスチック製チップが補綴物を傷つけずに歯肉溝に容易に挿入できます。

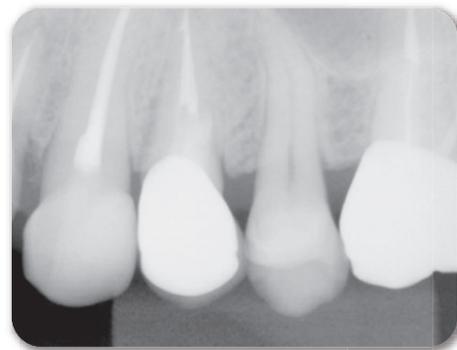

SAFE

口腔粘膜・口腔ガン診査にも


歯周組織だけでなく口腔粘膜病変や口腔ガン等の測定と口腔内全体像の把握のために。



ECO

オートクレーブ滅菌可能

オートクレーブ滅菌(135℃以下)が可能で繰り返し使用可能。使用を繰り返すと色落ちていきます。

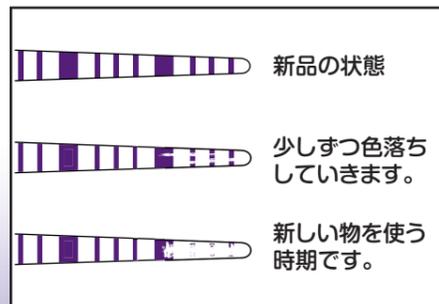

UNC 12

University of North Carolina の略。

ノースカロライナ大学で考案された精密検査用の目盛りです。

PerioWise®
premier Inspired solutions for daily dentistry™



UNC12

赤緑

2種類より
お選びください

SOFT

インプラント周囲部のアセスメントにも最適

UNC12

先端チップ部は丸く柔軟なためインプラントを傷つけず安心して使用できます。先端目盛りは最大12mmまで濃紫色の線がマーキングされ深いポケット測定が可能です。




UNC12

精査可能な目盛り: 1mm間隔×最長12mm

UNC12

先端が丸く濃紫線の鮮やかなコントラスト色が痛みの少ない精査を可能にします。帯状バンド部の目盛りが2箇所あるため、くっきり読みやすいです。

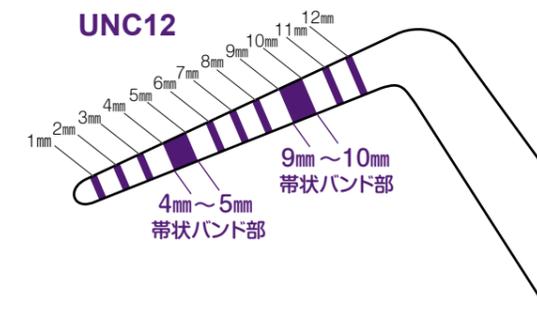

識別しやすい赤緑目盛り: 3-5-7-10mm

ペリオワイズ赤緑タイプの先端から3mmの緑色マーキングは健全なポケットの深さを示し、5mmと7~10mmの赤色マーキングは歯周病の進行の目安になります。

ペリオワイズ赤緑を挿入



金属製のプローブを挿入



赤緑

