

VITA シェードガイド

HAKUSUI

正確で審美的な色調の
選択がより簡単に！

デジタル時代にマッチした
未来型シェードシステム！

天然歯のシェードテイキング
のみに特化！

Tooth color space

VITA イージーシェードV

NEW

VITA イージーシェード ライト

VITA リニアシェードガイド 3D マスター

VITA ブリーチシェードガイド
3D マスター 15色

VITA 3D マスター
シェードガイド II 29色

VITA クラシカルシェードガイド

VITA


0 black

歯牙の色調を探求して

色調再現の基準となるビタ シェードガイドは歯科医療の中で 90 年間愛用され、歯牙のシェードを選択する基準として世界的に高く認知されてきました。**ビタ クラシカルシェードガイド (16 色)** は 50 年以上にわたって歯科界で使用されているシェードガイドです。

更にビタ社は 1998 年に明度 (Value)、彩度 (Chroma)、色相 (Hue) から成る、新しいコンセプトを取り入れた **ビタ 3D マスターシェードシステム** を完成させました。それは色彩学的に分かり易い排列に組み直され、歯科医師は色調を的確に歯科技工士に伝えることができ、多種多様な色調再現が可能となりました。

L*a*b*色空間立体イメージ

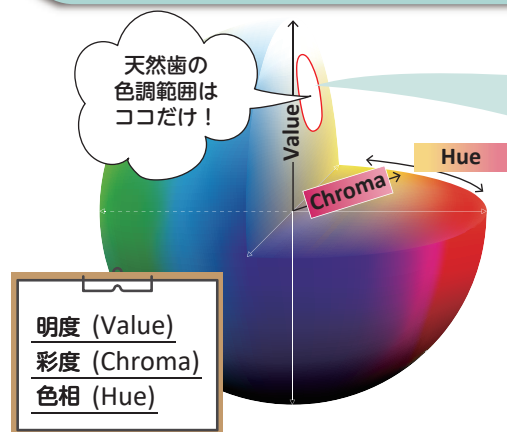

デジタルシェード

デジタルシェード自動測色計 ビタ イージーシェード V

CADCAM・ホワイトニングユーザーの必需品

歯面に直接当てて計測することで、シェードの情報を正確に自動測定できます。カラーで見やすくなった大きな画面は、タッチパネルで操作も簡単です。

ビタ イージーシェード V の特徴


- ビタ クラシカルシェードガイド A1-D4、ビタ シェードガイド 3D マスター、ビタブロックおよび ADA の規格に沿ったブリーチシェードへの対応
- 天然歯・ブリーチ歯・セラミック修復物全般のシェード決定
- 30 件のデータ保存
- 非接触充電
- 有機発光ダイオードのカラータッチディスプレイ
- Bluetooth® でスマートフォンや PC と連動



鮮明なカラータッチ
ディスプレイ



イージーシェード V で
正確なシェード
テイキング

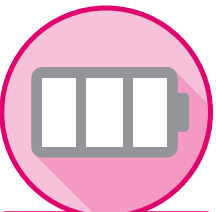

バッテリーが長持ち



人間工学に基づいた
デザイン



歯科医師と患者との
コミュニケーション



シームレス構造

白水ホームページで
使い方動画を公開中 /



QRコードを読み取って
動画をCHECK!



HISTORY




1956 初めてシェードを規格化したビタパン
クラシカル A1-D4、その後ビタクラシカル
シェードガイド A1-D4 となる




2004 イージーシェード
デジタルシェード
自動測色計の第 1 世代

1924 研究により色合いを絞った
世界で最初のシェードガイド

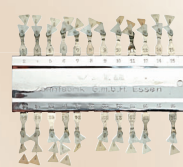


1998 ビタシェードガイド 3D マスターより
初めてシェードを系統的に決定し再現できた

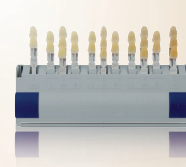

色空間座標

ビタ クラシカルシェードガイド

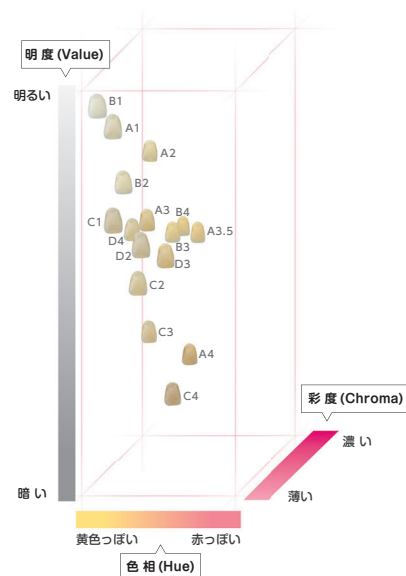


ビタ クラシカルシェードガイドの配列




世界で最も認知されている
シェードガイドです！

ビタ 3D マスター シェードガイドⅡ 29色

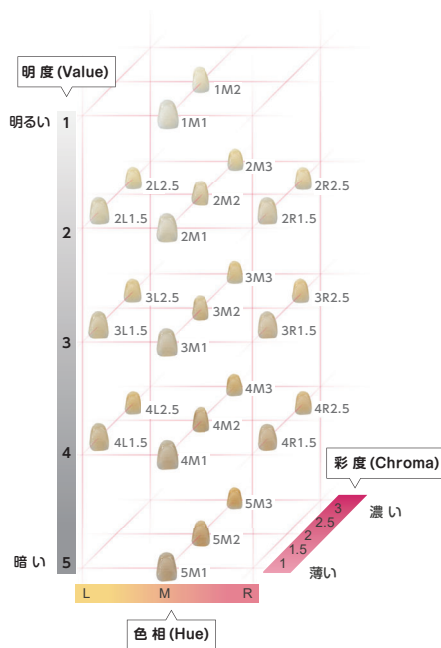

※ L：イエロー/M：ミディアム/R：レッド

ビタ 3D マスター シェードガイドⅡ 29色の配列

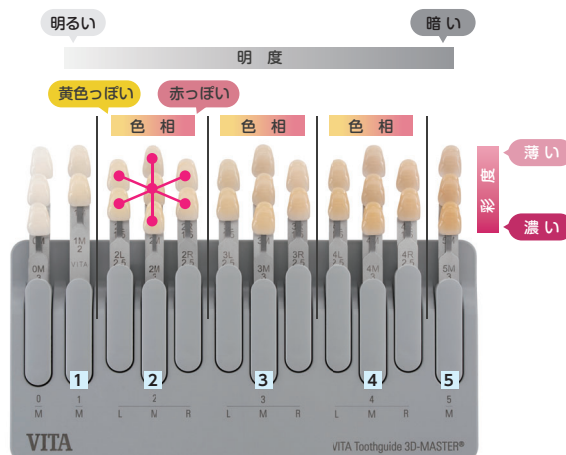

3D マスターは色彩球体に基づき規則正しく
配置された状態で作られています。



2008 ビタ イージーシェードコンパクト



2015 ビタ イージーシェードV

2007

ビタ プリーチシェードガイド3Dマスター
ホワイトニングの計画、プロセスの進行を
確認するためのツール



ビタ リニアシェードガイド3Dマスター



2013 ビタ イージーシェード
アドバンス4.0



2023 ビタ イージーシェード
ライト



ビタ イージーシェードV
関連動画



VITA 社のホームページを
Check!

3D マスターシェードシステム



01

システマチックなシェードガイド ビタ 3D マスター シェードガイドⅡ 29 色

3D マスターシェードの原点

ビタ 3D マスターは色素排列を規則正しく配置して製作されたシステムです。これにより水彩画を書く絵の具の様にさまざまな色調を作ることができ、無限大の色調再現が可能になった未来的なシェードガイドです。組み合わせを変える事により、今迄に無い色調や、たまたま切らしたシェードでも他の色調で作る事が可能です。



歯科技工士
にオススメ！

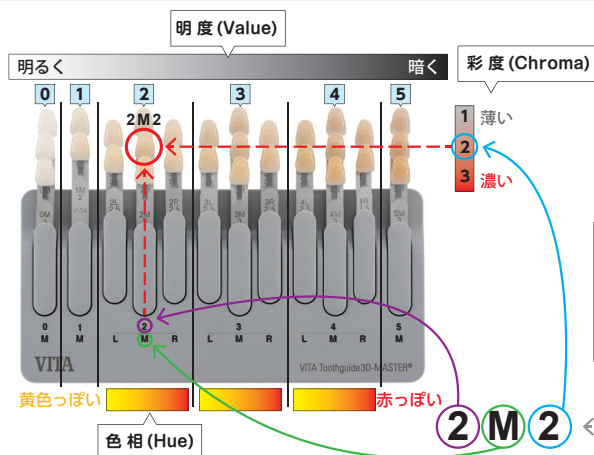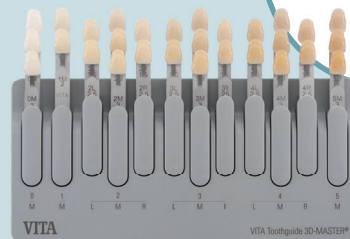

※ L : イエロー / M : ミディアム / R : レッド



ビタ 3D マスターシェードガイドは、規則正しく排列しているので以下の通り計算式ができあがります。

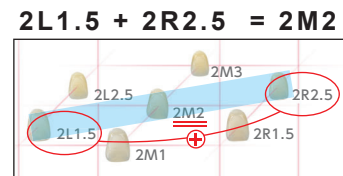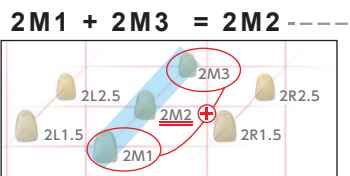

02

ステップシステムシェードガイド ビタ リニアシェードガイド 3D マスター

シェードの選択がすばやく簡単！正確！

明度を 6 段階 (0,1,2,3,4,5) から選択し、次に彩度の強さと色相を選択するだけで、正確な色調が誰にでもすばやく簡単に選択できます。

2 ステップで
かんたんシェード

歯科医師・
歯科衛生士
にオススメ！



1
STEP

明度を決定



明度 (Value)

バリューガイド

リニアガイドを開いてダークグレーのバリューガイドを取り出し、0～5の6段階から明度を決定します。

明度3

明度3のタブからシェードテイキングをスタートすると容易に見つけることができます。

2
STEP

正確な色調選択



彩度 (Chroma)/ 色相 (Hue)

クロマ / ヒューガイド


次に彩度/色相を決定するために、ダークグレーのバリューガイドで選んだ0～5の番号からライトグレーのクロマ/ヒューガイドを取り出し、色調を選択します。

均等なグラデーション

一般的な A1-D4 シェードガイドは、明度 / 色調が均等ではありませんが、ブリーチシェードガイドはブリーチ色を含め、3D マスターシェードを基準としているので、ホワイトニングのカウンセリングに適しています。




歯科衛生士
にオススメ!

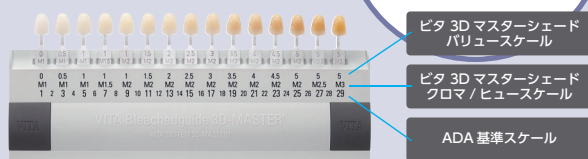

ビタ 3D マスターシェード
パリュースケール

ビタ 3D マスターシェード
クロマ / ヒュースケール

ADA 基準スケール

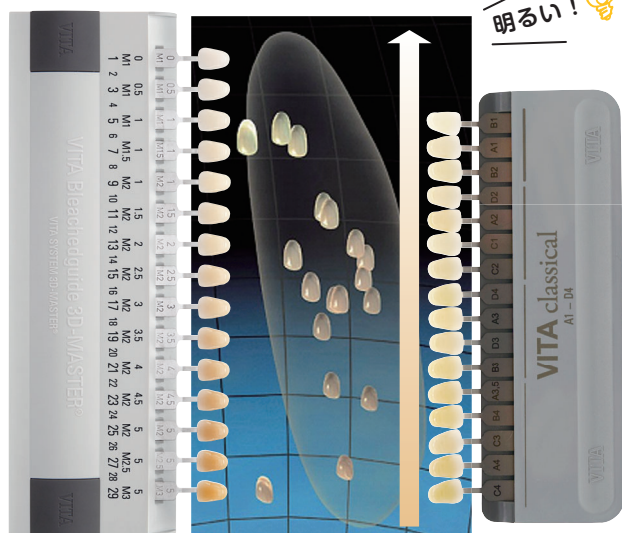

ビタ ブリーチシェードガイド
3D マスター 15 色

ビタ クラシカル
シェードガイド

明度順に
並べ替えることができる!

ご使用方法

STEP 1



通常通りのシェード
テーキングを行います。

STEP 2



一番合った色のタブ
を選択します。ホ
ワイトニング前は
2/M2/13 の色調
でした。

STEP 3




ホワイトニング後に
再度シェードテー
キングします。
1/M2/9 になりま
した。

オリジナル A-D シェードガイド

ビタ クラシカル A1-D4 シェードガイド (2021)

世界基準のシェードガイド

歯科業界で最も使用され、1956 年から現在のシェードの形を保ったロングセラー商品です。このシェードガイドは歯科材料の基準シェードとして多くのメーカーで採用され、色調を持つ歯科医師材料・技工材料に使われています。

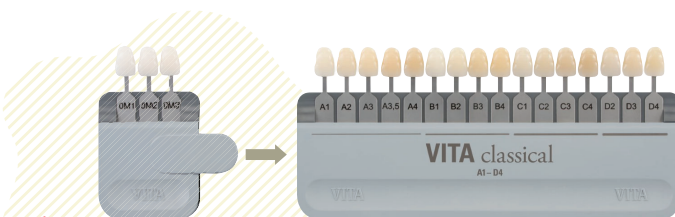

別売りのビタ ブリーチシェードを
連結することができます



シェードを採得する際は
歯牙中心部を
計測してください!

POINT!

明度順に並べた場合▶


B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

ビタ イージーシェード V 使い方ガイド

6 個のモードで詳しく測定

1 1点計測モード


モード変換でかんたんチェック！

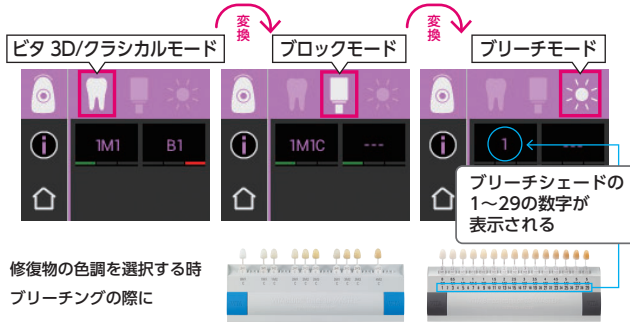

簡単採得



信号システム搭載！

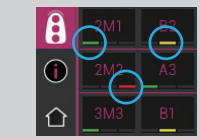

信号システム（緑・黄・赤）によるシェードガイドとの適合度を表示

： 準
： 近
： 遠

さらにLCH*で
詳細表示も
可能


色調をより詳しく
知りたい方に
オススメ！



* LCH…立体的に記述される色の空間、カラースペース
L：明度 [luminosity]
C：彩度 [chroma]
H：色相 [hue]

2 平均値計測モード


複雑な色調のケースに！

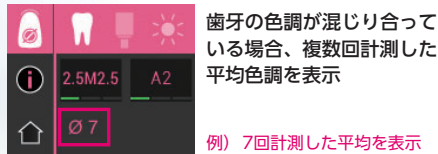

複雑採得

3 3点計測モード


より詳細な色調の計測に！

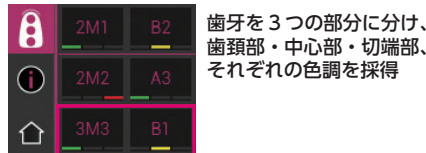

複雑採得

4 ブリーチングモード

アプリを用いてイメージ可能！

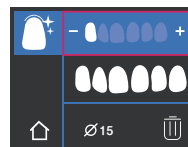

- ・iOS デバイスを用いて処置前後の歯の明るさをイメージ
- ・VITA モバイルアシストと連動

更に詳しく

デジタルシェード自動測定器 ビタ イージーシェード V


- ・電源電圧：100-240V、50/60Hz
- ・大きさ：[ベースステーション(ワイヤレス充電方式)]
W80×L200×H50mm
[ハンドピース]
W56×L56×H125mm
- ・重さ：約 420g (ハンドピースのみ 170g)
- ・エネルギー (充電式ニッケル水素電池 1.2Vmin.1900mAh 単 3 形) 2 本

保護キャップ
(イージーシェード V 用)

9×18 個 [別売]
※本体購入時に 36 個付属

5 修復物計測モード

製作した補綴物のチェックに！

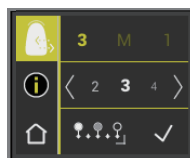


- ・修復物作製中のシェードチェックに
- ・最終的なセラミック修復物のシェードチェックに

修復物

6 クラウン測定モード

口腔内の修復物の計測に！

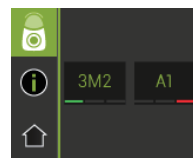

- ・口腔内にある修復物の色調を計測する時

修復物



スマートフォンアプリ

VITA mobileAssist

コミュニケーションツール




VITA
Assist



ビタ mobileAssist は、歯科医師と歯科技工士との間でシェード情報の共有をスムーズかつ簡単に行うことを目的にしたアプリです。ビタ イージーシェードVで測定されたデータは、ビタ mobileAssist を利用することによって、Bluetooth 通信でお手持ちのスマートフォンに画像データとして簡単に転送することができます。

このアプリはビタ 3D マスターやビタクラシカル A1-D4、ビタブロックやブリーチシェード等のシェードシステムに対応しています。

① VITA mobileAssist をダウンロード

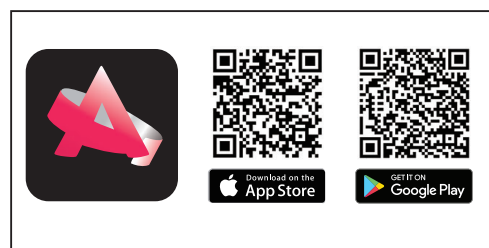

② アプリを起動し、口腔内を撮影

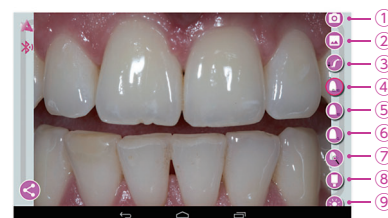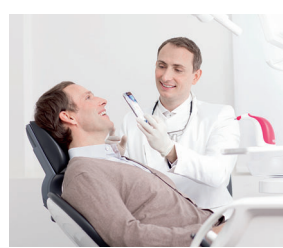

①撮影 ②画像選択 ③イージーシェードV*選択
④3D マスター/クラシカルシェード表示
⑤3D マスターシェード ⑥クラシカルシェード
⑦表示位置選択 ⑧ブロックモード ⑨ブリーチモード

③ イージーシェードVでシェードを測定



⑤ 測定データをメールでラボに転送



ブリーチモード


ブリーチモードは、ブリーチングをした際の処置前後の歯の明るさを iOS ソフトでイメージし、説明するのに役立ちます。

iOSのみ使用可能

VITA イージーシェード V



① ブリーチモードを立ち上げる

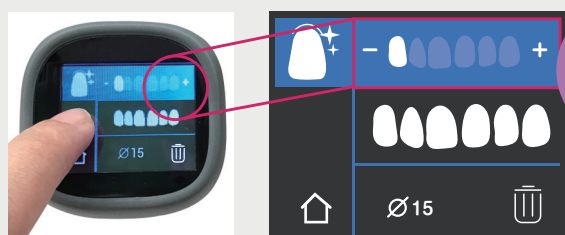


② ブリーチモードで計測する

タップしてデータをアプリに転送

VITA モバイルアシスト



元画像

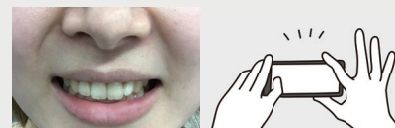

アプリに読み取り加工した状態



加工前

加工後

拡大



最終のイメージ画像を見て患者さんに説明する

※ブリーチモードは現在iOSのみ使用可能です。

天然歯のシェードテイキング のみに特化!

イーザーシェードライトが新登場!

VITA Easyshade® LITE

NEW



デジタルシェードガイド ビタ イーザーシェード ライト

- ・大 き さ : [ベースステーション]
W80×L200×H50mm
[ハンドピース]
W56×L56×H125mm
- ・重 さ : 約 388g (ハンドピースのみ 205g※電池 2 本含む)
- ・単 3 電池 2 本使用 (本体に充電機能はありません)
- ・保護キャップは、ビタ イーザーシェード V と兼用
(本体には含まれませんので別売をご購入ください)
※保護キャップについては下記をご参照ください

標準価格 ¥178,000



シンプルで分かり易い、ディスプレイ表記

3D マスターシェード


グリーン



クラシカルシェード

3D マスターシェードで 2 つのシェードが出た場合、
1 : 1 で混ぜると色がマッチする

イエロー

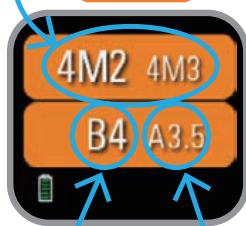

1 番近いシェード

2 番目に近いシェード

クラシカルシェードで 2 つのシェードが出た場合
3D マスターシェードのように混ぜることはできない

レッド



明度が高い

イエロー系が高い

グリーン

色調が**合っている**

イエロー

色調は合っていないが**近い**
※多少のずれはあるが許容範囲である

レッド

色調は明らかに**合っていない**
※しかしその中でも一番近い色調が表示される

明度

基のシェードと
比べて

明るい



/ 暗い



色相

イエロー系



イエロー

/ レッド系



レッド

別売 保護キャップ

9×18 個入り 標準価格 ¥24,000




衛生的!

シェードガイド




ビタ クラシカル A1-D4
シェードガイド (2021)

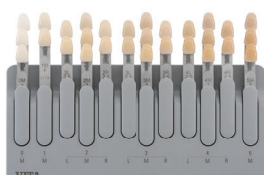


ビタ 3D マスター
シェードガイド II 29 色



ビタ リニアシェードガイド
3D マスター

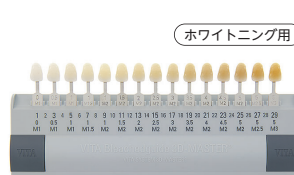

ビタ ブリーチシェードガイド
3D マスター 15 色

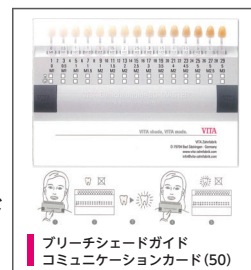

ブリーチシェードガイド
コミュニケーションカード (50)

VITA

ビタ社 (ドイツ)

※記載内容は2023年11月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。



白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.11.P2,000 D18 Ver.1.2.2