


# Hydent<sup>®</sup> Sticks

Color Transfer and Tissue Marking Applicators



HAKUSUI

ハイデント  
スティック

歯科適合試験用アプリケーター

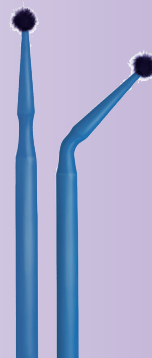

ACCURATE FAST PATIENT FRIENDLY

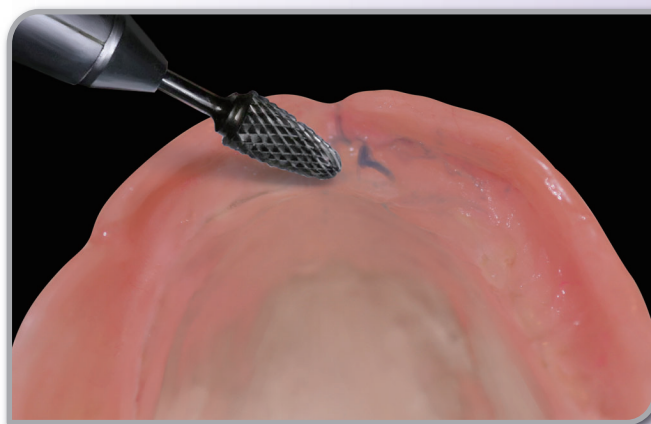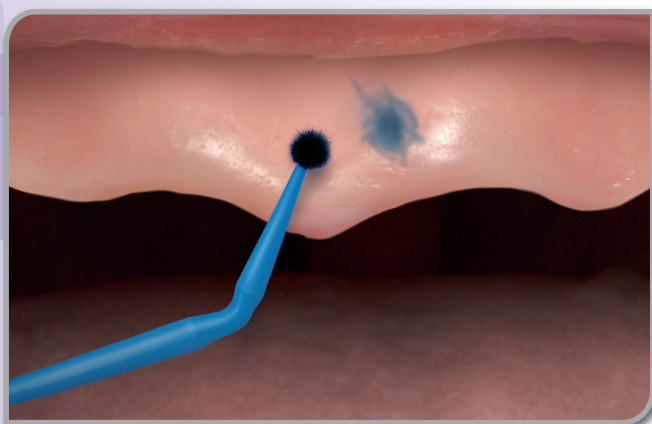


義歯の調整をよりスピーディー、簡便、安全にする色転写と粘膜マーキング用のアプリケーター。  
義歯の不適合部位を正確に、手早く、やさしく、衛生的に濃紫色にくっきり転写します。



Hygienic & Safer



Precise Transfer

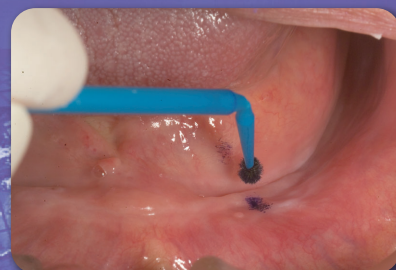

 **Pascal**<sup>®</sup>  
International, Inc.

口腔内から義歯を取り出します。

歯肉・口蓋部の患部を湿らせます。(唾液又は水で)

ハイドントの先端を患部に軽く接触させます。

1

濃紫色が粘膜に描記!

2

義歯を口腔内にセットし咬合させた後、取り出します。

3

濃紫色が義歯上にくっきり転写!

濃紫色が転写された部位をバー等で削合します。



4

在宅診療に最適でコンパクト!

ピンポイントで塗布が可能!

くっきり見やすい濃紫色!

クリニカルケース CLINICAL CASE

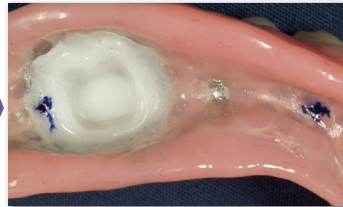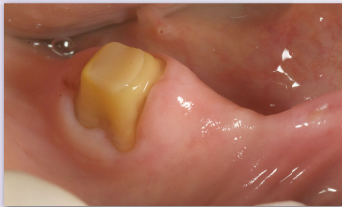

衛生的な DISPOSABLE


垂れずに奥までしっかり到達!

スピーディ&精確な転写!

曲げられ柔軟なアプリーケータ Bendable

粘膜のマーキングにも最適

Distinct

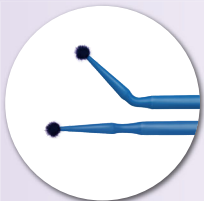

臨床写真提供: かじはら歯科医院 梶原 公彦 先生

臨床写真提供: 松川歯科医院 松川 敏久 先生