

根管拡大形成補助材
ポンプタイプ **RCプレップ**


医療機器承認番号 14800BZY00481000




「RCプレップ」は、根管形成時の切削片を容易に除去するためのEDTA（エチレンジアミン四酢酸）をベースにした根管清掃材です。「ハイポーゲン」と併用すると発泡して清掃が容易になります。



1 ラバーダムで防湿、開拡後、髄室内内容をバーやエキスカで除去し「ハイポーゲン」で洗い流します。リーマーやファイル、ルートカナルフィラー等に「RCプレップ」をつけ、1/2の長さで挿入して上下運動により攪拌します。

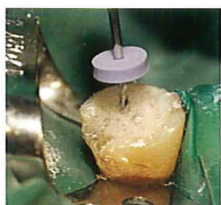

2 静かに「ハイポーゲン」を灌注し、発泡を促します。「RCプレップ」を髄室に加えながら、この操作を繰り返します。

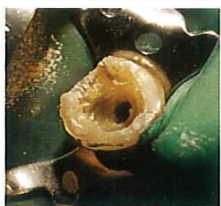

3 発泡が完全になくなるまで繰り返し、歯髄組織、切削片、その他の残渣を浮上させ、清掃します。ペーパーポイント等で根管を乾燥後、次の診療まで仮封しておきます。



ハイポーゲン


2.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液

歯面研磨用ペースト **グリッター**

届出番号 27B1X00020220081

- グリッターは、頑固な汚れの付いた歯面をきれいにするための研磨用ペーストです。
- ハンドピースにブラシヤプロフィカップを装着し、グリッターを付けて低速で回転させて使用します。
- 適用中もペーストが飛び散りません。
- すっきりとしたミント味でスクーリングの後などに使用します。
- 一回の分量ごとの使い捨てで衛生的です。
- 取り出しやすいパッケージ入りです。

プラスチック製ホルダー付
ミント味
容量/2g×200個入

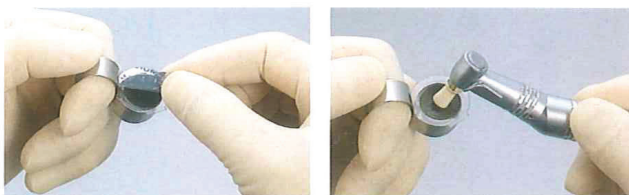

ご用命は当社へ

 **白水貿易株式会社**

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD 1F ☎ (011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎ (048)884-3951
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル7F ☎ (045)222-0381
 〒464-0075 名古屋市中区山崎3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎ (06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

ニッケル・チタン スプレダー



プレミア社 (アメリカ)



Premier
Nickel
Titanium
Endodontic
Spreaders

Ultimate flexibility

Premier Nickel Titanium Endodontic Spreaders

超

超弾性合金

ニッケル・チタン スプレダー

届出番号 27B1X00020221052

種類：7種類

〈ヒートキャリアー3/D11/D11T/25/25S/40/40S〉

プレミア社のニッケル・チタン スプレダーは、超弾性合金で出来たとても柔軟性のあるスプレダーで、従来のステンレス製のものでは曲げすぎると変形や破折するような場合でも元の形状に戻り、特に彎曲した根管に最適です。


オートクレーブ滅菌できます。




スプレダー先端のサイズ表 (単位:mm)

	D1	D16	AAEサイズ
ヒートキャリアー3	0.55	0.85	No.55
D11	0.30	0.75	—
D11T	0.23	0.55	—
25,25S	0.25	0.55	No.25
40,40S	0.40	0.70	No.40

D1は先端より1mmの部分の直径、D16は先端より16mmの部分の直径を表わします。
従ってヒートキャリアー3ではD1 (0.55mm) D16 (0.85mm) となります。

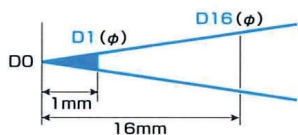

ヒートキャリアー3

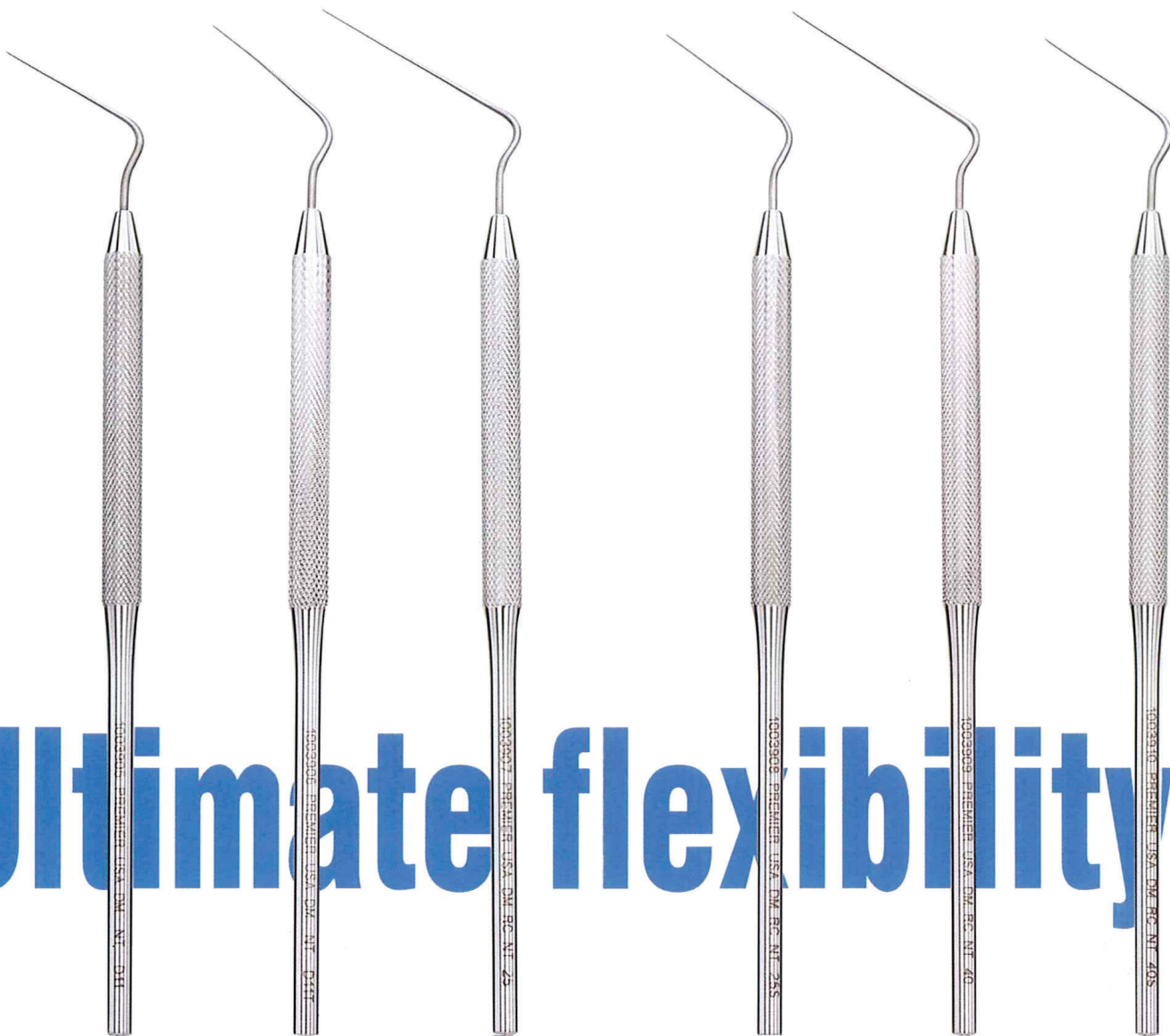

Ultimate flexibility.

D11

D11T

25

25s

40

40s