

藤本浩平先生によって開発されたチップ

ミニグレーシーキュレット + 超音波

超音波グレーシーチップ

スプラソン
P-MAX シリーズ用
チップ



グレーシーキュレットと
同じ形状だから
操作が簡単!



超音波スケーラー用チップ・手用スケーラーのハイブリッド

コンパクトで
使いやすい!

グレーシーキュレットの 11/12、13/14 に準じた形状をしているので、先端が細くてコンパクト。



手用スケーラー
超音波グレーシーチップ

効率的!




グレーシーキュレットと同じ形状なので操作も簡単。歯面の清掃性が効率的です。




軟組織に対して
低侵襲!

軟組織に対して低侵襲で術後疼痛の軽減に寄与します。

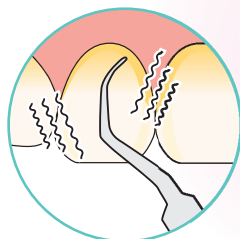

チェアタイム
短縮!

チップが超音波振動するので、より効率よく処置を行うことができます。

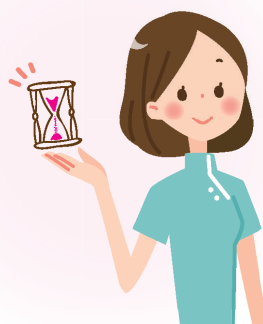



超音波グレイシーチップ考案者

東京都中央区 藤本歯科医院
歯科医師 藤本 浩平 先生

超音波グレイシーチップは、超音波スケーラー用チップと従来のグレイシーキュレットを組み合わせたスプラソン P-MAX シリーズ用の超音波チップです。



FK11



FK12



FK13



FK14

臼歯の近心面

臼歯の遠心面



パワーの範囲



チップの先端はグレイシー 11/12、13/14 に準じた形状を付与することで、従来の手用スケーラーの操作感覚と超音波振動によって歯面上に付着するバイオフィルム、堆積物を低侵襲・高効率に除去することを目的としたハイブリッド・超音波チップです。

歯科用多目的超音波治療器

スプラソン P-MAX2

多目的超音波治療器に必要な要素をすべて兼ね備えた器械、それがスプラソンP-MAX2です。



スプラソン P-MAX2 なら、ペリオパワー #1 で歯肉線下挿入時患者には痛みを与えず、振動は止まらず効率よく作業ができます。

3種類(ペリオ・エンド・スケーリング)のパワーモード選択

更に各モード 10 段階の合計 30 段階のパワーが選択可能。幅広い使用用途で使用可能。

3種類の注水機能

ベーシック・タンク・ステリシステムより、用途に合わせた注水機能の選択が可能。

ニュートロンテクノロジー

あらゆる状況で安定した振動を保ち、安定したパワーを発揮。

豊富なチップラインナップ

様々な症例に対応する 90 種類以上のチップをご用意。


LED 付スリムハンドピース

明瞭な視野を確保する LED 付は、スリムで軽く口腔内で取り回しが容易な設計。



純正チップご使用のお願い

サテック社製の超音波スケーラーをご使用の際は、サテック社および白水貿易株が指定する純正チップをご使用ください。純正チップはサテック社製の超音波スケーラーの特性に合わせて設計されているので、安心してお使いいただけます。純正でないチップをお使いの場合は、チップが破折したり、ハンドピースのネジ山を傷めたりするなど色々な問題が発生する可能性があります。純正以外のチップを使用し、ハンドピースに故障が発生した場合、保証期間内であっても有償修理となりますのでご了承ください。

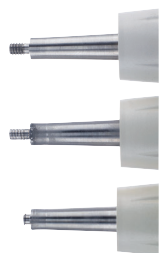

純正チップを使用した正常なハンドピースのネジ山




純正以外のチップを使用して破折したハンドピースのネジ山。チップを取り付けることは可能ですが、チップのネジ山とハンドピースのネジ山の精度が異なるためにハンドピースのネジ山を破損する場合があります。チップが装着出来た場合でも正しく発振しません。



純正以外のチップを使用して破折したハンドピースのネジ山。純正以外のチップを取り付けることでハンドピースのネジ山を傷め、破折する場合があります。

チップの消耗に関する案内

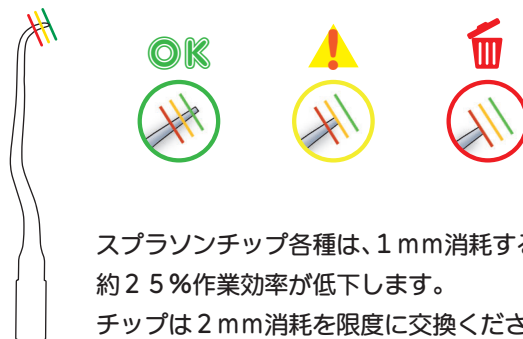

スプラソンチップ各種は、1mm消費すると約25%作業効率が低下します。チップは2mm消費を限度に交換ください。

FK チップ：医療機器認証番号 16300BZZ02398000 管理医療機器
P-MAX2：医療機器認証番号 224ALBZX00039000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クrost12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2019.01.P1,000 A07 Ver.1.2.1