

# シックルスケーラー

# ユニバーサルキュレット


## の シャープニング

- ①ガイドの折れ線を山折りにし、机の端に合わせてガイド上部をテープで固定します。
- ②インストゥルメントを左手に持ち、ストーンは右手に持ちます。

③SICKLE・UNIVERSALのセンターラインに、第一シャンク( ← )を合わせて固定します。  
 固定はインストゥルメントの金属とシリコンの切り替え部分( → )を  
 机の端に引っ掛けて固定します。( → 部分)

インストゥルメントの先端は自分の方に向けてください

### シックルスケーラー

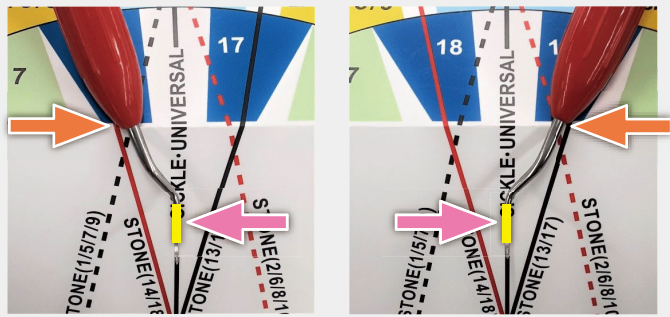


### Point!


第1シャンクを  
センターラインに  
合わせます



### シンテット

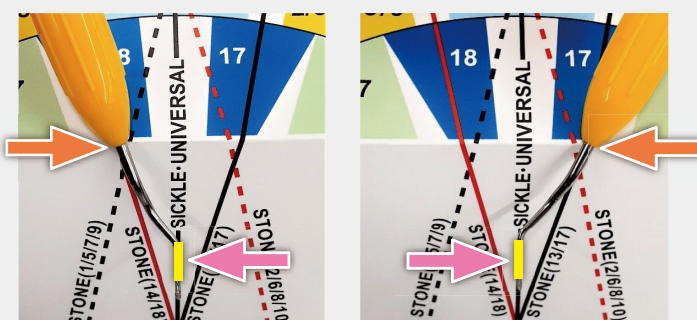


### ユニバーサルキュレット

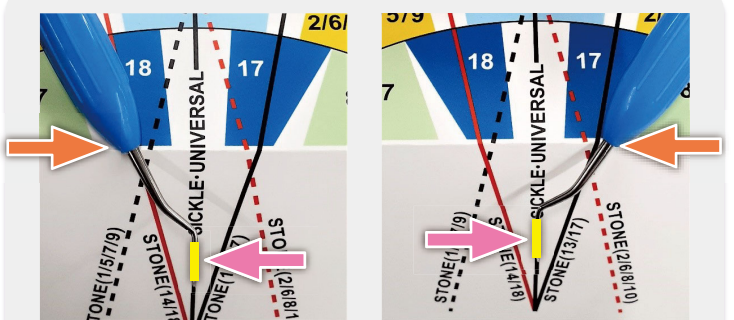

④ストーンラインは、右エッジの場合黒ライン、左エッジの場合は赤ラインを選択し、2cm程度の幅でストーンを上下運動させてシャープニングを行います。(この時ストーンはストーンラインと平行です)

### Point!

### 刃部側面のシャープニング 3 STEP

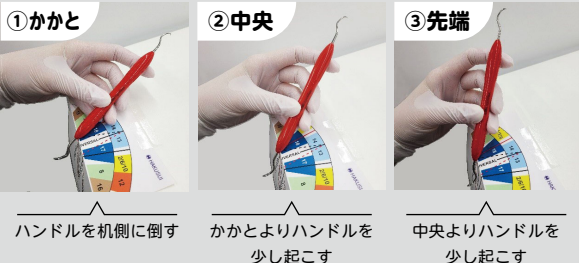

### 先端のシャープニング方法

#### ユニバーサルキュレットの場合\*

刃部側面をシャープニングする流れで、そのままシャープニングを行います。  
 この時、砥石の方にハンドルをゆっくり回転させながら先端終点部まで行います。  
 目安は、第一シャンクの背面が見えるところです。

#### シックルの場合

先端のシャープニングは行いません。

