


瞬輝！

HAKUSUI

ジルコニア研磨が かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur

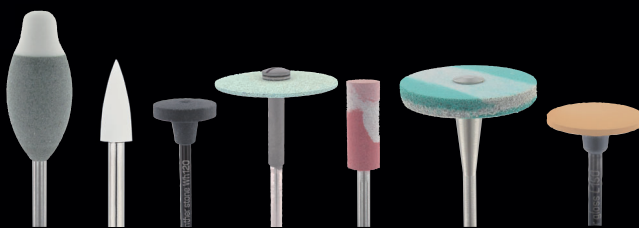

滅菌
できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made
in
Germany

SUN

ジルコニアの

「美しさ」再発見
未来を磨く

耐久性を追及！

ジルコニアも


ピツカピカ！



製造元 SUN社(ドイツ)

品質に自信あり!!

動画でCHECK

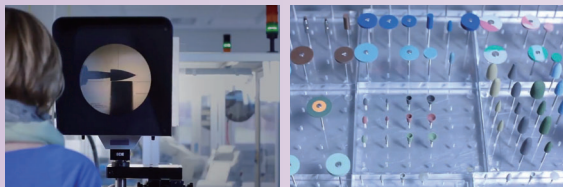

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。

SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。

サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得




ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

二ケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーゼンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

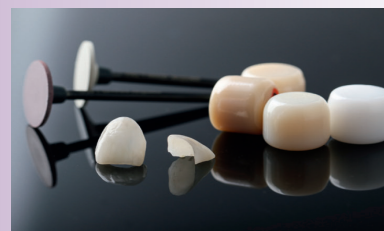

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高いマテリアルです。

形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がリ、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップで仕上げることができます



形態調整

BWG / AWG



シンタリング




シンタリングには

VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファークネス
ジルコマット6100MS



形態修正

MCP / PSC

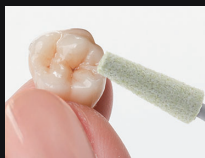


最終仕上げ研磨

EZA / TCP



EZA エクストラコース

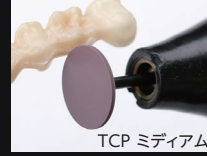

TCP ミディアム



TCP エクストラファイン

荒研磨

中研磨

光沢研磨

スーパー光沢研磨



形態調整

焼結前のジルコニア

安全な調整!

形態調整

HP用

BWG

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

動画でCHECK



ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

164104MF

サイズ [mm] $\phi 10 \times 22.7$

推奨回転数 [rpm] 8,000

商品コード 15854300

標準価格(1本) ¥1,100



グレーゾーン

サポートピンをすばやく削合



ホワイトゾーン

ポリッシャーでサポートピンの
削合部を研磨・形成



緻密な研磨

ファイン

すばやく削合

ミディアム

シリコン素材

ホワイトゾーン

グレーゾーン

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、
プレシタクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、
無着色のホワイトゾーンで表面への色移りなく、繊細
な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨すること
ができます。

AWG

形態調整

HP用

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器



BWG

AWG

Set

AWG テクニカルAセット

111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本

商品コード 15854000

標準価格(1セット4本入) ¥1,800

New
新発売

10本入

ファイン
光沢研削

106104F

サイズ [mm] $\phi 4.3 \times 12$

推奨回転数 [rpm] 8,000

商品コード 15854218

標準価格(10本) ¥2,700



ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

560104MF

サイズ [mm] $\phi 7 \times 19$

推奨回転数 [rpm] 8,000

商品コード 15854200

標準価格(1本) ¥900



ミディアム

中研削

111104M

115104M

146104M

サイズ [mm] $\phi 5.6 \times 13$

推奨回転数 [rpm] 6,000

商品コード 15854108

標準価格(10本) ¥3,000

サイズ [mm] $\phi 7 \times 13$

推奨回転数 [rpm] 6,000

商品コード 15854118

標準価格(10本) ¥3,500



サイズ [mm] $\phi 15 \times 0.3$

推奨回転数 [rpm] 6,000

商品コード 15854128

標準価格(10本) ¥3,800



STEP
2

形態修正

時間短縮! 更に 経済的!

形態修正

効率の良い修正!!

MCP

大きく修正

荒研削

中研削

繊細な仕上がり!!

PSC

繊細な修正

細研削

New
新発売

MCP

形態修正

荒研削

中研削

HP用

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020303001 一般医療機器

Set


MCP テクニカルセット

138104C / 138104M / 151104M 各1本

商品コード 15853500

標準価格(1セット3本入) ¥9,300

■ MCEとMCPの耐久性の比較

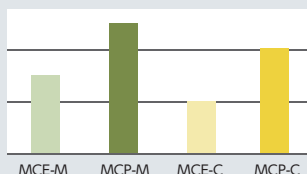

MCPはMCEと比較して
粒子や配合比を変える事により、
耐久性が向上しました。

耐久性
の
向上!

切削量が多い修正に適しています!

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

コース

荒研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

138104C

φ4 × 11

20,000

15853510

¥3,000

159104C

φ15 × 3.5

8,000

15853520

¥3,900

219104C

φ22 × 3

8,000

15853530

¥6,900

ミディアム

中研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

133104M

φ6.5 × 13

15,000

15853540

¥3,200

138104M

φ4 × 11

20,000

15853550

¥3,000

151104M

φ12 × 2.5

10,000

15853560

¥3,600

239104M

φ22 × 0.8

8,000

15853570

¥5,500

New
新発売

PSC

形態修正

細研削

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器



PSC パンサー ストーンセット

商品コード 15855000

標準価格(1セット6本入) ¥22,000

繊細なマージン部や特長付けに使用します

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がり

ファイン

細研削

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

566104F

Cyl.round 035

φ3.5 × 10

15,000

15855060

¥3,500

151104F

Wheel 120

φ12 × 2.4

10,000

15855030

¥5,100

132104F

Cylinder 048

φ5 × 13

15,000

15855010

¥4,000

138104F

Cone 040

φ4 × 10.5

15,000

15855020

¥3,500

199104F

Cone inv. 050

φ5

15,000

15855040

¥3,500

508104F

Torpedo 025

φ2.5 × 7

15,000

15855050

¥3,000

繊細な切削

STEP 3

研磨

かんたんステップで **驚きの輝き!**

研磨の比較

エクストラコース
EZA
荒研磨

ミディアム
EZA TCP
中研磨

ファイン
EZA
光沢研磨

エクストラファイン
TCP
スーパー光沢研磨

粗い

細かい

EZA

最終仕上げ研磨

荒研磨

中研磨

光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set




商品コード 15850000
標準価格(1セット3本入) ￥4,200

動画でCHECK



- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる

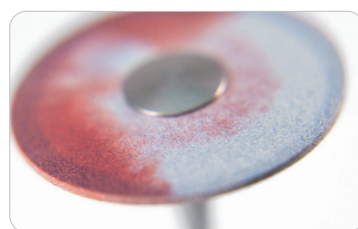

3ステップ研磨

エクストラコース



荒研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104XC

φ26 × 2

6,000

15850130

￥7,000

200104XC

φ22 × 3.2

6,000

15850140

￥4,000

105104XC

φ5.5 × 16

15,000

15850100

￥1,500

151104XC

φ11.5 × 2.4

6,000

15850110

￥1,700

177104XC

φ6 × 15

15,000

15850120

￥1,700

ミディアム



中研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104M

φ26 × 2

6,000

15850230

￥7,000

200104M

φ22 × 3.2

6,000

15850240

￥4,000

105104M

φ5.5 × 16

15,000

15850200

￥1,500

151104M

φ11.5 × 2.4

6,000

15850210

￥1,700

177104M

φ6 × 15

15,000

15850220

￥1,700

ファイン



光沢研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)

140104F

φ26 × 2

6,000

15850330

￥7,000

200104F

φ22 × 3.2

6,000

15850340

￥4,000

105104F

φ5.5 × 16

15,000

15850300

￥1,500

151104F

φ11.5 × 2.4

6,000

15850310

￥1,700

177104F

φ6 × 15

15,000

15850320

￥1,700

TCP

最終仕上げ研磨

中研磨

スーパー光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

動画でCHECK



瞬時に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がり
- cad/cam冠の研磨に適合



※ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード 15851000
標準価格(1セット) ¥42,000



研磨ペースト

PASTE01/20

サンポリッシャー ダイヤモンドペースト

内容量 20g
商品コード 15852500
標準価格(1個) ¥18,000

ミディアム

中研磨

サイズ [mm]
推奨回転数 [rpm]
商品コード
標準価格(1本)

100104MSW4Z

φ5.5 × 18
12,000
15851100
¥1,500

140104M

φ26 × 2
8,000
15851130
¥7,000

158104MSW4Z

φ17 × 2.4
8,000
15851110
¥4,500

541104MSW4Z

φ15 × 1
8,000
15851120
¥4,000

エクストラ
ファイン

スーパー光沢研磨

サイズ [mm]
推奨回転数 [rpm]
商品コード
標準価格(1本)

100104XFSW4Z

φ5.5 × 18
12,000
15851200
¥1,500

140104XF

φ26 × 2
8,000
15851230
¥7,000


158104XFSW4Z

φ17 × 2.4
8,000
15851210
¥4,500

541104XFSW4Z

φ15 × 1
8,000
15851220
¥4,000

インプラント アバットメント調整用

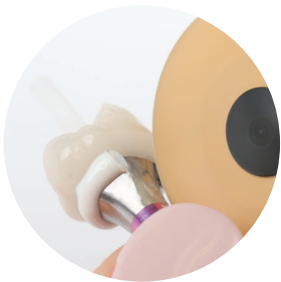New
新発売

TCP パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z /
140104XC / 541104XCWSW4Z 各1本

商品コード 15851300
標準価格(1セット) ¥23,000

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)
を同時に研磨が可能!

New
新発売エクストラ
コース

荒研磨

サイズ [mm]
推奨回転数 [rpm]
商品コード
標準価格(1本)



140104XC

φ26 × 2
8,000
15851320
¥7,800



541104XCWSW4Z

φ15 × 1
8,000
15851330
¥4,500

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!! 用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

クリニカル

ラボワークで研磨



口腔内調整

すばやく仕上げる!!

EZA

かんたん研磨



荒研磨



中研磨



光沢研磨

エクストラコース

荒研磨

ミディアム

中研磨

満足な仕上がり!!

TCP

こだわり研磨



中研磨



スーパー光沢研磨

ファイン

光沢研磨

エクストラファイン

スーパー光沢研磨

粗い

細かい

Clinical

EZA

荒研磨

中研磨

光沢研磨

CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨



103204XC



108204XC



124204XC



143204XC

サイズ [mm]

φ4.4 × 10.5

φ3.3 × 7.5

φ6 × 8

φ10

推奨回転数 [rpm]

15,000

15,000

10,000

10,000

商品コード

15800103

15800113

15800123

15800133

標準価格 (3本)

¥ 2,700

¥ 2,400

¥ 2,700

¥ 2,700

ミディアム

中研磨



103204M



108204M



124204M



143204M

サイズ [mm]

φ4.4 × 10.5

φ3.3 × 7.5

φ6 × 8

φ10

推奨回転数 [rpm]

15,000

15,000

10,000

10,000

商品コード

15800203

15800213

15800223

15800233

標準価格 (3本)

¥ 2,700

¥ 2,400

¥ 2,700

¥ 2,700

ファイン

光沢研磨



103204F



108204F



124204F



143204F

サイズ [mm]

φ4.4 × 10.5

φ3.3 × 7.5

φ6 × 8

φ10

推奨回転数 [rpm]

15,000

15,000

6,000

6,000

商品コード

15800303

15800313

15800323

15800333

標準価格 (3本)

¥ 2,700

¥ 2,400

¥ 2,700

¥ 2,700

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

Set



EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード

15800000

標準価格 (1セット3本入)

¥ 2,500



ドレッシングストーン

ドレッシングストーン BAW930


65×20×3.5mm

商品コード

15898000

標準価格 (1個)

¥ 1,000

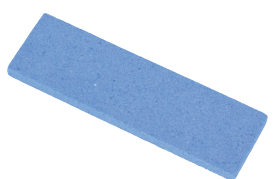

ポリッシングバーの形態を整える
ために使用します。

TCP

中研磨

スーパー光沢研磨

CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

ミディアム

中研磨



103204MSW4Z



126204MSW4Z



143204MSW4Z



144204MSW4Z

サイズ [mm]

φ4.4 × 10.5

φ6 × 8

φ10

φ10 × 0.8

推奨回転数 [rpm]

8,000

6,000

6,000

6,000

商品コード

15801103

15801113

15801123

15801133

標準価格 (3本)

¥ 2,700

¥ 2,700

¥ 2,700

¥ 2,700

エクストラ

ファイン



103204XFSW4Z



126204XFSW4Z



143204XFSW4Z



144204XFSW4Z

サイズ [mm]

φ4.4 × 10.5

φ6 × 8

φ10

φ10 × 0.8

推奨回転数 [rpm]

8,000

6,000

6,000

6,000

商品コード

15801203

15801213

15801223

15801233

標準価格 (3本)

¥ 2,700

¥ 2,700

¥ 2,700

¥ 2,700

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性



3ステップ研磨

こだわり研磨

関連商品

VITA shade, VITA made. **VITA**

■ 焼成ファーンネス



ジルコニアシンタリング(焼結)ファーンネス
ビタ ジルコマット 6100MS

医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器



ポーセレンファーンネス
バキュマツ6000M

医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器



プレスファーンネス
バキュマツ6000MP

医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)



(ブロック) ホワイト LL1
(ディスク) ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)



(ブロック) ホワイト
(ディスク) ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スーパートランス)



(ディスク) ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

ビタYZ XT(エクストラトランス)



(ディスク) ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシント用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBX00017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド



ライト インテンス ミディアム ニュートラル

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド



HT 1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2 3M3 / 4M2 A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2
ST XT A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 D3 / D4

ビタ YZ エフェクトリキッド



クロマ A-D ブルー ライトピンク ダークピンク オレンジ グレー ブラウン

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス



スプレー



ペースト



パウダー

医療機器認証番号 226AKBX00042000 管理医療機器

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBX00138000 管理医療機器



ご注文は**サンポリッシャー専用**の注文書をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード！

サンポリッシャー注文書

検索

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>

記載の標準価格は2022年3月現在のものです。(税別)



サン社(ドイツ)



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.3.P1,000 D30 Ver.2.2.1