


瞬輝！

HAKUSUI

ジルコニア研磨が かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur

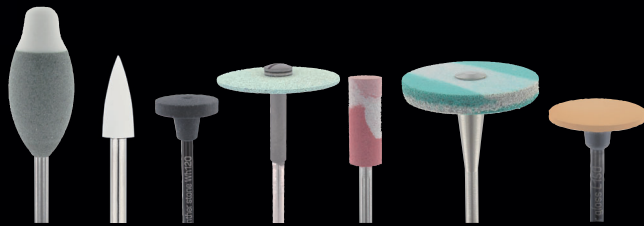

滅菌

できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made
in
Germany

S
U
N

Exactly yours

ジルコニアの

「美しさ」再発見

未来を磨く

耐久性を追及!

ジルコニアも

ピツカピカ!




製造元 SUN社(ドイツ)

動画でCHECK



品質に自信あり!!

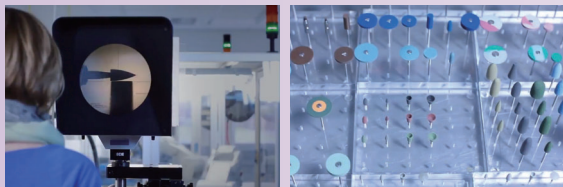

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。

SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。

サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得




ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

二ケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーゼンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

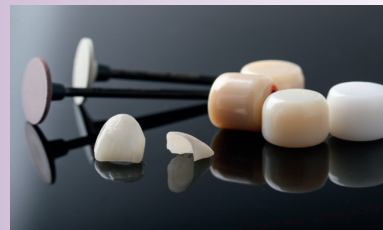

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。


形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がりに、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップ で上げることができます

STEP 1 形態調整 BWG / AWG

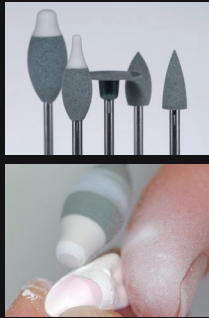

シンタリング




シンタリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーンネス
ジルコマット6100MS

STEP 2 形態修正 MCP / PSC



STEP 3 最終仕上げ研磨 EZA / TCP

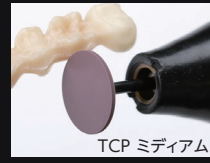

- 荒研磨
- ▼
- 中研磨
- ▼
- 光沢研磨
- ▼
- スーパー光沢研磨

STEP 1

形態調整

焼結前のジルコニア

安全な調整!

BWG

形態調整 HP用

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器



ミディアム/ファイン 中研削/光沢研削	164104MF
サイズ [mm]	φ10 × 22.7
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854300
標準価格(1本)	¥1,500



グレーゾーン
サポートピンをすばやく削合



ホワイトゾーン
ポリッシャーでサポートピンの
削合部を研磨・形成




使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、
プレシタクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、
無着色のホワイトゾーンで表面への色移りなく、繊細
な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨すること
ができます。

AWG

形態調整 HP用

プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器

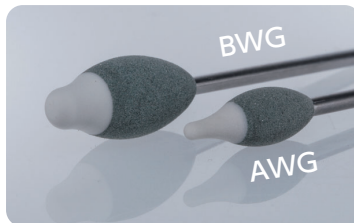

Set

AWG テクニカルAセット			
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本			
商品コード	15854000		
標準価格(1セット4本入)	¥2,300		

10本入

ファイン 光沢研削	106104F
サイズ [mm]	φ4.3 × 12
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854218
標準価格(10本)	¥3,300

ミディアム/ファイン 中研削/光沢研削	560104MF
サイズ [mm]	φ7 × 19
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854200
標準価格(1本)	¥1,300

10本入

ミディアム 中研削	111104M	115104M	146104M
サイズ [mm]	φ5.6 × 13	φ7 × 13	φ15 × 0.3
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854108	15854118	15854128
標準価格(10本)	¥3,700	¥4,400	¥4,400

STEP
2

形態修正

時間短縮! 更に 経済的!

形態修正

効率の良い修正!!

MCP	大きく修正
荒研削	中研削

繊細な仕上がりに!!

PSC	繊細な修正
細研削	

MCP

形態修正 荒研削 中研削 HP用

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020303001 一般医療機器


Set

MCP テクニカルセット
138104C / 138104M / 151104M 各1本
商品コード 15853500
標準価格(1セット3本入) ¥10,700

切削量が多い修正に適しています!

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

切削

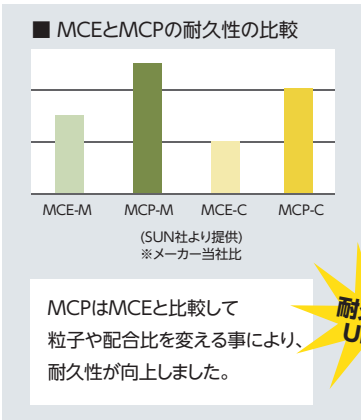

耐久性UP!

コース

荒研削	138104C	159104C	219104C
サイズ [mm]	φ4 × 11	φ15 × 3.5	φ22 × 3
推奨回転数 [rpm]	20,000	8,000	8,000
商品コード	15853510	15853520	15853530
標準価格(1本)	¥3,700	¥4,800	¥8,300

ミディアム

中研削	133104M	138104M	151104M	239104M
サイズ [mm]	φ6.5 × 13	φ4 × 11	φ12 × 2.5	φ22 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	15,000	20,000	10,000	8,000
商品コード	15853540	15853550	15853560	15853570
標準価格(1本)	¥4,000	¥3,700	¥4,500	¥6,900

PSC

形態修正 細研削 HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

PSC パンサー ストーンセット
商品コード 15855000
標準価格(1セット6本入) ¥27,000

繊細なマージン部や特長付けに使用します

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がりに

繊細な切削

ファイン





細研削	566104F	151104F	132104F	138104F	199104F	508104F
	Cyl.round 035	Wheel 120	Cylinder 048	Cone 040	Cone inv. 050	Torpedo 025
サイズ [mm]	φ3.5 × 10	φ12 × 2.4	φ5 × 13	φ4 × 10.5	φ5	φ2.5 × 7
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855060	15855030	15855010	15855020	15855040	15855050
標準価格(1本)	¥4,300	¥6,500	¥5,000	¥4,300	¥4,300	¥3,800

STEP 3

研磨

かんたんステップで **驚きの輝き!**

研磨の比較

			
エクストラコース EZA	ミディアム EZA TCP	ファイン EZA	エクストラファイン TCP
荒研磨	中研磨	光沢研磨	スーパー光沢研磨

粗い 細かい

EZA

最終仕上げ研磨

荒研磨

中研磨

光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set



EZA テクニカルAセット

105104XC / 105104M / 105104F 各1本


商品コード 15850000

標準価格(1セット3本入) ￥4,300

動画でCHECK



- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる

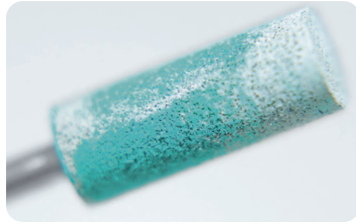
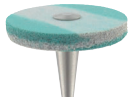





3ステップ研磨

エクストラコース




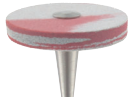



荒研磨

					
140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC	
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110	15850120
標準価格(1本)	￥8,300	￥4,600	￥1,600	￥1,900	￥1,900

ミディアム






中研磨

					
140104M	200104M	105104M	151104M	177104M	
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210	15850220
標準価格(1本)	￥8,300	￥4,600	￥1,600	￥1,900	￥1,900

ファイン



光沢研磨

					
140104F	200104F	105104F	151104F	177104F	
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310	15850320
標準価格(1本)	￥8,300	￥4,600	￥1,600	￥1,900	￥1,900

TCP

最終仕上げ研磨

中研磨

スーパー光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器



瞬時に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

動画でCHECK



- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がり
- cad/cam冠の研磨に適合



*ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード	15851001
標準価格 (1セット)	¥ 56,000

研磨ペースト TCPASTE01/20

サンポリッシャー ダイヤモンドペースト パンサー20g

内容量	20g
商品コード	15852501
標準価格 (1個)	¥ 23,000

こだわり研磨

ミディアム

中研磨


	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格 (1本)	¥ 1,900	¥ 8,300	¥ 5,400	¥ 4,800

エクストラ ファイン

スーパー光沢研磨

	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格 (1本)	¥ 1,900	¥ 8,300	¥ 5,400	¥ 4,800

インプラント アバットメント調整用

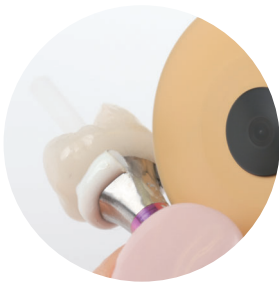

TCP パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z / 140104XC / 541104XCSW4Z 各1本	
商品コード	15851300
標準価格 (1セット)	¥ 31,000

チタンベースとジルコニア (ニケイ酸)
を同時に研磨が可能!

エクストラ コース

荒研磨

	140104XC	541104XCSW4Z
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	8,000	8,000
商品コード	15851320	15851330
標準価格 (1本)	¥ 9,800	¥ 5,700

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!!用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

ラボワークで研磨



クリニカル

口腔内調整

すばやく仕上げる!!

EZA **かんたん研磨**

荒研磨 中研磨 光沢研磨

エクストラコース ミディアム

荒研磨 中研磨

粗い 細かい

満足な仕上がり!!

TCP **こだわり研磨**

中研磨 スーパー光沢研磨

ファイン エクストラファイン

光沢研磨 スーパー光沢研磨

粗い 細かい

Clinical

EZA

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,000	¥ 3,500	¥ 3,500

ミディアム

中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,000	¥ 3,500	¥ 3,500

ファイン

光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,000	¥ 3,500	¥ 3,500

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

Set

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本
商品コード 15800000
標準価格 (1セット3本入) ¥ 3,200




ドレッシングストーン

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000
標準価格 (1個) ¥ 1,000

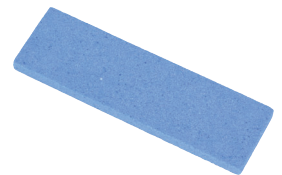

ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

3ステップ研磨

TCP

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器


ミディアム

中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500

エクストラファイン

スーパー光沢研磨	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性

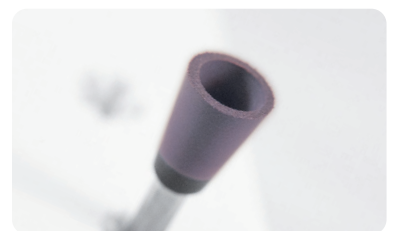

こだわり研磨

■ 焼成ファーンエス



ジルコニアシンタリング(焼結)ファーンエス
ビタ ジルコマット 6100MS

医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器



ポーセレンファーンエス
バキュマット6000M

医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器



プレスファーンエス
バキュマット6000MP

医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBZX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)



ブロック ホワイト LL1
ディスク ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)



ブロック ホワイト
ディスク ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スーパートランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

ビタYZ XT(エクストラトランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシント用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBZX00017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド



ライト インテンス ミディアム ニュートラル

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド



HT
1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2
3M3 / 4M2
A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2

ST **XT**
A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2
B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2
D3 / D4

ビタ YZ エフェクトリキッド



クロマ A-D ブルー
ライトピンク ダークピンク
ピンク オレンジ
グレー ブラウン

*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器認証番号 226AKBZX00042000 管理医療機器



スプレー



ペースト



パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBZX00138000 管理医療機器



ご注文は**サンポリッシャー専用**の**注文書**をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード！

サンポリッシャー注文書

検索 🔍

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>



記載の標準価格は2023年7月現在のものです。(税別)



サン社(ドイツ)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西廻廊3-2-1 白海ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.07.P2,000 D30 Ver.2.3.1