


瞬輝！

HAKUSUI

ジルコニア研磨が かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur

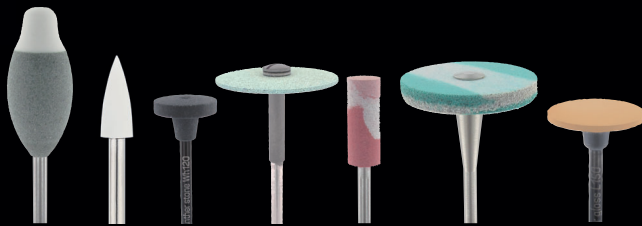

滅菌
できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made
in
Germany

S
U
N

Exactly yours

ジルコニアの

「美しさ」再発見

未来を磨く

耐久性を追及!

ジルコニアも

ピツカピカ!



Made in Germany




製造元 SUN社(ドイツ)

動画でCHECK



品質に自信あり!!

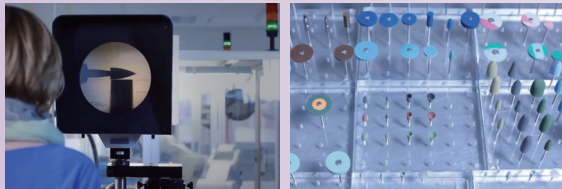

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。
SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。
サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得



ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

ニケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーゼンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。



一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。
形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がりに、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。




テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップ で上げることができます

STEP 1 形態調整 BWG / AWG

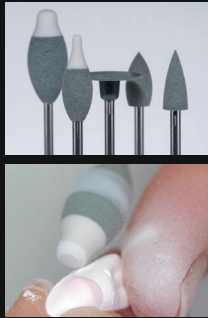


シンタリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーンレス
ジルコマット6100MS

STEP 2 形態修正 MCP / PSC



STEP 3 最終仕上げ研磨 EZA / TCP

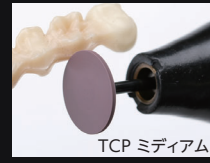

- 荒研磨
- ▼
- 中研磨
- ▼
- 光沢研磨
- ▼
- スーパー光沢研磨

STEP 1 形態調整

形態調整

焼結前のジルコニア

安全な調整!


BWG

プレシントジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器



形態調整	HP用
メディアム/ファイン	
中研削/光沢研削	164104MF
サイズ [mm]	φ10 × 22.7
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854300
標準価格(1本)	¥1,500

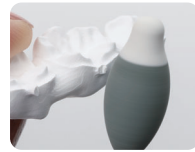

グレーゾーン
サポートピンをすばやく削合



ホワイトゾーン
ポリッシャーでサポートピンの削合部を研磨・形成



使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシントクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、無着色のホワイトゾーンで表面への色移りなく、繊細な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することができます。

AWG

プレシントジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器



Set

AWG テクニカルAセット			
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF	各1本		
商品コード	15854000		
標準価格(1セット4本入)	¥2,300		

10本入

ファイン	
光沢研削	106104F
サイズ [mm]	φ4.3 × 12
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854218
標準価格(10本)	¥3,600

メディアム/ファイン	
中研削/光沢研削	560104MF
サイズ [mm]	φ7 × 19
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854200
標準価格(1本)	¥1,300

10本入

メディアム			
中研削	111104M	115104M	146104M
サイズ [mm]	φ5.6 × 13	φ7 × 13	φ15 × 0.3
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854108	15854118	15854128
標準価格(10本)	¥3,700	¥4,400	¥4,400

STEP 2

形態修正

時間短縮! 更に 経済的!

形態修正

効率の良い修正!!

MCP	大きく修正
荒研削	中研削

繊細な仕上がりに!!

PSC	繊細な修正
細研削	

MCP

形態修正 荒研削 中研削 HP用

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020303001 一般医療機器


Set

MCP テクニカルセット
 138104C / 138104M / 151104M 各1本
 商品コード 15853500
 標準価格(1セット3本入) ¥11,300

切削量が多い修正に適しています!

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

切削

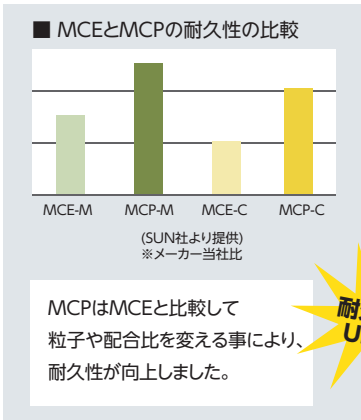

耐久性 UP!

コース

荒研削	138104C	159104C	219104C
サイズ [mm]	φ4 × 11	φ15 × 3.5	φ22 × 3
推奨回転数 [rpm]	20,000	8,000	8,000
商品コード	15853510	15853520	15853530
標準価格(1本)	¥ 3,900	¥ 5,100	¥ 8,800

ミディアム

中研削	133104M	138104M	151104M	239104M
サイズ [mm]	φ6.5 × 13	φ4 × 11	φ12 × 2.5	φ22 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	15,000	20,000	10,000	8,000
商品コード	15853540	15853550	15853560	15853570
標準価格(1本)	¥ 4,300	¥ 3,900	¥ 4,800	¥ 7,200

PSC

形態修正 細研削 HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

PSC パンサー ストーンセット
 商品コード 15855000
 標準価格(1セット6本入) ¥35,000

繊細なマージン部や特長付けに使用します

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がりに

繊細な切削

ファイン

細研削	566104F	151104F	132104F	138104F	199104F	508104F
サイズ [mm]	φ3.5 × 10	φ12 × 2.4	φ4.8 × 13	φ4 × 10.5	φ5	φ2.5 × 7
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855060	15855030	15855010	15855020	15855040	15855050
標準価格(1本)	¥ 4,800	¥ 7,100	¥ 5,500	¥ 4,700	¥ 4,800	¥ 4,200

STEP
3

研磨

かんたんステップで

驚きの輝き!

研磨の比較



エクストラコース

EZA

荒研磨



ミディアム

EZA TCP

中研磨



ファイン

EZA

光沢研磨



エクストラファイン

TCP

スーパー光沢研磨

粗い

細かい

最終仕上げ研磨

荒研磨

中研磨

光沢研磨

HP用

EZA

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set



EZA テクニカルAセット

105104XC / 105104M / 105104F 各1本

商品コード

15850000


標準価格(1セット3本入)

¥4,800

動画でCHECK



- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる

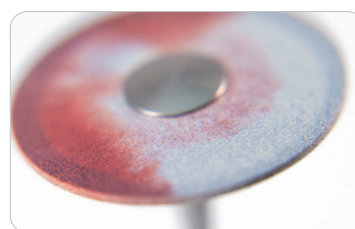3
ステップ
研磨エクストラ
コース

荒研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)




140104XC

φ26 × 2

6,000

15850130

¥9,000

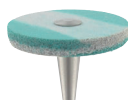

200104XC

φ22 × 3.2

6,000

15850140

¥5,000



105104XC

φ5.5 × 16

15,000

15850100

¥1,800



151104XC

φ11.5 × 2.4

6,000

15850110

¥2,100



177104XC

φ6 × 15

15,000

15850120

¥2,000

ミディアム



中研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)




140104M

φ26 × 2

6,000

15850230

¥9,000

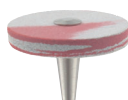

200104M

φ22 × 3.2

6,000

15850240

¥5,000



105104M

φ5.5 × 16

15,000

15850200

¥1,800



151104M

φ11.5 × 2.4

6,000

15850210

¥2,100



177104M

φ6 × 15

15,000

15850220

¥2,000

ファイン



光沢研磨

サイズ [mm]

推奨回転数 [rpm]

商品コード

標準価格(1本)




140104F

φ26 × 2

6,000

15850330

¥9,000

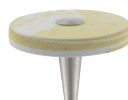

200104F

φ22 × 3.2

6,000

15850340

¥5,000



105104F

φ5.5 × 16

15,000

15850300

¥1,800



151104F

φ11.5 × 2.4

6,000

15850310

¥2,100



177104F

φ6 × 15

15,000

15850320

¥2,000

TCP

最終仕上げ研磨

中研磨

スーパー光沢研磨

HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器



瞬時に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

動画でCHECK



- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がり
- cad/cam冠の研磨に適合



*ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード	15851001
標準価格(1セット)	¥66,000

研磨ペースト TCPASTE01/20

サンポリッシャー ダイヤモンドペースト パンサー20g

内容量	20g
商品コード	15852501
標準価格(1個)	¥26,000

こだわり研磨

ミディアム

中研磨


	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格(1本)	¥2,000	¥9,000	¥5,900	¥5,200

エクストラ ファイン

スーパー光沢研磨

	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格(1本)	¥2,000	¥9,000	¥5,900	¥5,200

インプラント アバットメント調整用

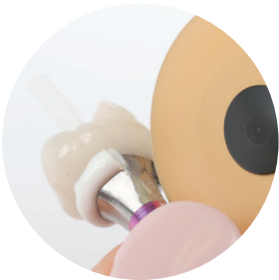

TCP パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z /
140104XC / 541104XCSW4Z 各1本

商品コード	15851300
標準価格(1セット)	¥36,500

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)
を同時に研磨が可能!

エクストラ コース

荒研磨

	140104XC	541104XCSW4Z
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	8,000	8,000
商品コード	15851320	15851330
標準価格(1本)	¥10,800	¥6,200

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!!用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

クリニカル

ラボワークで研磨



口腔内調整

すばやく仕上げる!!

満足な仕上がり!!

EZA **かんたん研磨**

荒研磨 中研磨 光沢研磨

エクストラコース **ミディアム**

荒研磨 中研磨

粗い 細かい

TCP **こだわり研磨**

中研磨 スーパー光沢研磨

ファイン **エクストラファイン**

光沢研磨 スーパー光沢研磨

粗い 細かい

Clinical

EZA

荒研磨 中研磨 光沢研磨

CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800

ミディアム

中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800

ファイン

光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

Set

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000

標準価格(1セット3本入) ¥ 3,400

3ステップ研磨

TCP

中研磨 スーパー光沢研磨

CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

ミディアム


中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800

エクストラファイン

スーパー光沢研磨	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性

こだわり研磨

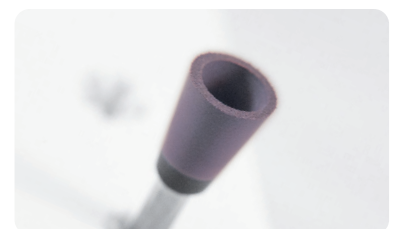

■ 焼成ファーネス



ジルコニアシンタリング(焼結)ファーネス
ビタ ジルコマット 6100MS

医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器



ポーセレンファーネス
バキュマット6100M

医療機器届出番号 27B1X00020306011 一般医療機器



プレスファーネス
バキュマット6000MP

医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)



- (ブロック) ホワイト LL1
(ディスク) ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)



- (ブロック) ホワイト
(ディスク) ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スーパートランス)



- (ディスク) ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

ビタYZ XT(エクストラトランス)



- (ディスク) ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシント用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBX00017000 管理医療機器

ビタ YZ HT シェードリキッド



- (HT) 1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2 3M3 / 4M2 A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2

ビタ YZ エフェクトリキッド



- クロマ A-D ブルー
ライトピンク ダークピンク
ピンク オレンジ
グレー ブラウン

*当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器認証番号 226AKBX00042000 管理医療機器



スプレー

ペースト

パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBX00138000 管理医療機器



ご注文はサンポリッシャー専用の注文書をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード！

サンポリッシャー注文書

検索

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>

記載の標準価格は2026年3月現在のものです。(税別)



サン社(ドイツ)



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
 名古屋 | 名古屋千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
 広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.03.P1,000 D30 Ver.2.5.1

