

石膏用のこぎり

HAKUSUI

OLSAW

オルソー
スーパーのこ刃

Skip-Tooth blade

スーパーのこ刃

復活!!

POINT

01 よく切れる

POINT

02 長く使える

POINT

03 パテントを持った
ユニークな刃先

POINT

04 目詰まりしにくい

POINT

05 ネイのフレームでも
使用可能



a

大きなスペースを設けることにより、湿った石膏でも目詰まりしにくくなります。

b

さらに、この大きなスペースは削りかすを掻き出す役割もあり、切れ味が落ちることなく長時間使い続けることができます。

c

少し高くなっているこの部分が、乾燥した超硬石膏でも鋭く食い込みます。

d

刃の厚みが薄いため、スペースが限られた下顎前歯にも使用できます。




OLSAW 刃部拡大図

Skip-Tooth blade


フレームの脱着方法



- ・平な机で作業してください
- ・滑ると危険なので下にタオル等の布を敷いてください

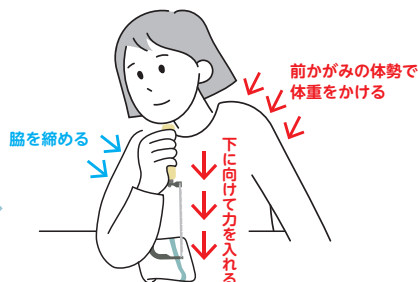

- ・脳を締めて柄をしっかりと握ってください
- ・肘をテーブルに置いて、前かがみの体勢で体ごとフレームに体重をかけてください

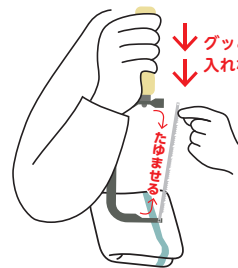

- ・フレームをたゆませて、刃を取り外してください


※刃を取り付けるときも同様の手順で行ってください



16700110
スーパーのこ刃用フレーム (のこ刃 10 本入)
標準価格 ¥3,700



16700010
オルソースーパーのこ刃 (10 本)
標準価格 ¥1,500

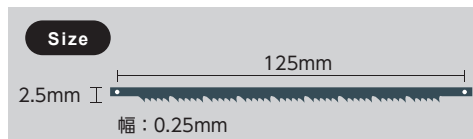

※記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

OLSAW

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中区山崎3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2021.12.P2,000 B32 Ver1.1.1