

石膏用のこぎり

HAKUSUI

# OLSAW

オルソー  
スーパーのこ刃

*Skip-Tooth blade*

スーパーのこ刃

復活!!

POINT

01 よく切れる

POINT

02 長く使える

POINT

03 パテントを持った  
ユニークな刃先

POINT

04 目詰まりしにくい

POINT

05 ネイのフレームでも  
使用可能



a

大きなスペースを設けることにより、湿った石膏でも目詰まりしにくくなります。

b

さらに、この大きなスペースは削りかすを掻き出す役割もあり、切れ味が落ちることなく長時間使い続けることができます。

c

少し高くなっているこの部分が、乾燥した超硬石膏でも鋭く食い込みます。

d

刃の厚みが薄いため、スペースが限られた下顎前歯にも使用できます。




# OLSAW 刃部拡大図

Skip-Tooth blade

## フレームの脱着方法



- ・平な机で作業してください
- ・滑ると危険なので下にタオル等の布を敷いてください

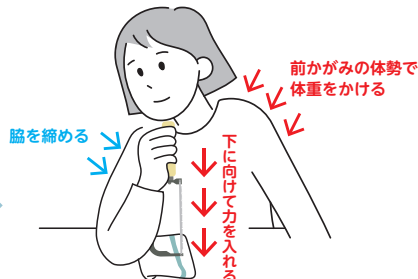

- ・脇を締めて柄をしっかりと握ってください
- ・肘をテーブルに置いて、前かがみの体勢で体ごとフレームに体重をかけてください



- ・フレームをたゆませて、刃を取り外してください

※刃を取り付けるときも同様の手順で行ってください



16700110  
スーパーのご刃用フレーム (のご刃 10 本入)  
標準価格 ¥4,200




16700010  
オルソースーパーのご刃 (10 本)  
標準価格 ¥1,800



### Rust Protection

パッケージには防錆剤 (VCI) が入っています。錆から守るため、未使用の刃は取り出さず、パッケージに入れて保存してください。

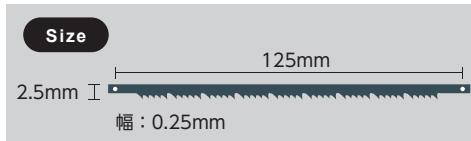

### Size

125mm  
2.5mm  
幅：0.25mm

※記載内容は 2023 年 4 月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

OLSAW

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951  
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2階 TEL(03)5217-4618  
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西壱屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870  
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.04.P2,000 B32 Ver1.1.2