

おすすめ5選入り!  
これさえあればスケーリングから  
デブリドメントまで  
全部できる!

※緑上用…#1,#1S,#10  
緑下用…H3,HY1

# スプラソン P-MAX2 キャンペーン



ニュートロン LED  
スリムハンドピース

LED付



ニュートロン  
チタンハンドピース

LED無



オートクレープ滅菌が可能なチタンハンドピース。  
ハンドピース内部の発振体、ハンドピースコードの  
コネクタ部分を含め、液体の触れる部分には  
チタンを使用し、これまで以上に耐腐食性が  
向上しました。

多目的超音波治療器 スプラソン P-MAX2  
ベーシックシステムに、「タンク式注水システム」、または  
「シャリオカート」、または「タンク注水システム+シャリオカート」  
をセットにして特別価格にてご提供いたします。

2022.9.21 ▶▶ 2022.12.20 まで

## A タンク式注水システム付セット



LED付 キャンペーン標準価格  
**298,000 円**

LED無 キャンペーン標準価格  
**280,000 円**

## B シャリオカート付セット



LED付 キャンペーン標準価格  
**298,000 円**

LED無 キャンペーン標準価格  
**280,000 円**

## C タンク式注水システム+シャリオカート付セット



LED付 キャンペーン標準価格  
**354,000 円**

LED無 キャンペーン標準価格  
**336,000 円**

医療機器認証番号 224ALBZX00039000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

おすすめ  
セミナー

ハンズオン実習会

「歯科医師・歯科衛生士のための超音波デブリドメント」First step セミナー  
～超音波スケーラーを知ろう! 基礎知識から実践まで～

講師: 齋藤淳先生、田島菜穂子先生、山田美穂先生 日時: 2022年11月3日(木)10:00～16:00

お申込みはこちら ▼



ウェビナー

ここが知りたい! 超音波セミナー▶超音波デブリドメント編

講師: 田島菜穂子先生 日時: 2022年11月27日(日)10:00～11:00





# チップは何を使ったらいい？


## おすすめ！効率の良いチップの選択



### 1 時短テクニック！

2本のチップで口腔内全ての歯面を効率よく歯石除去・デブリメントできるR/Lチップを活用しましょう。微細パワーとP-MAX専用チップの併用で深く狭窄された部位・根分岐部などハンドスケーラーでは到達しにくい部位にも容易に挿入操作できます。ハンドスケーラーが難しい部位に是非お試しください。  
**ハンドピースを2本ご準備いただき、ハンドピースごと付替えることで更に作業効率がUPします！**


R/Lチップとハンドピース2本用意しましょう

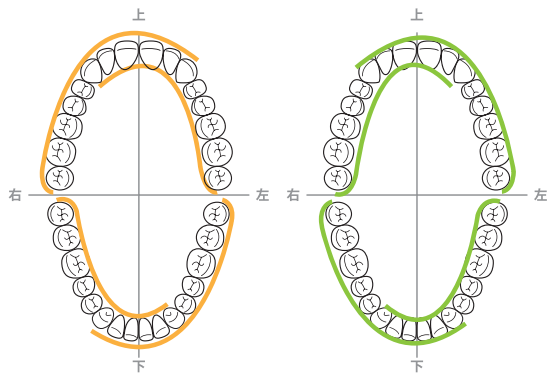

超音波歯肉縁下スケーリング	超音波歯肉縁下スケーリング (深く・狭窄された部位)	メンテナンス (デブリメント)
URMペリオハードチップ H4R/H4L	URMペリオハードチップ ロングミニ HLM4R/HLM4L	URMペリオハードチップ メタルソフト HY2R/HY2L


※チップは根分岐部にもラクラク到達

### 2 グレーシーのスキルを活かしたテクニック！

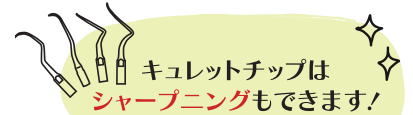

グレーシーキュレットのテクニックがあれば経験の浅い方も5mm以上深いポケットにもアクセス可能。歯石除去と同時にイリゲーション※もできるので効率よく炎症コントロールが出来ます。グレーシーだけでなく、H3も使いこなせば更に効率UPが図れます。①同様、超音波グレーシーチップFK-11/FK-12もしくはFK-13/FK-14とハンドピースを2本ご準備いただき、ハンドピースごと付替えることで作業効率がUPします！ ※Pモードに設定し、水量はチップの形状に合わせストレートに水が出るよう調整する

チップ	適応部位	前歯	臼歯
11 12 超音波グレーシーチップFK-11/FK-12	近遠心面	近遠心面	近心面、 頬舌・唇側・口蓋側面
13 14 超音波グレーシーチップFK-13/FK-14	近遠心面	近遠心面	遠心面
ペリオハードH3		前歯用	

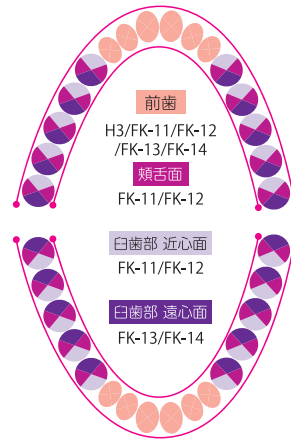

超音波グレーシーチップの動画はこちら

#### 1. グレーシーチップ基本操作

上記グレーシーの操作方法をご参考にチップを選択しましょう。ブロックごとの操作を行い、遠心→近心でチップを替えると効率的です。(1歯ずつ行わない)

#### 2. チップ3本で効率UP

初めにH3チップを用いて出来るところは全て行います。次にグレーシー11/12チップを用いて頬舌(唇側・口蓋側)面・近心を行います。遠心(H3)→頬舌(口蓋唇側)近心(グレーシー11/12) ※H3チップは最後臼歯遠心が得意部位です。(チップ下向き(チップダウン))