

パナジルガンタイプ 50mL の 包装変更・使用方法のお知らせ

新包装

赤色大円型
キャップ



+

赤色の新形状
ミキシングチップ

新カートリッジ 50mL

チップ装着が **より簡便!** チップ内印象材残量が **20%削減!** 1チップ63円と **より安価!**

対象品

- ・パナジル イニシャルコンタクト
ライト
- ・パナジル イニシャルコンタクト
X-ライト

変更

旧包装

黄色キャップ



+

黄色のミキシングチップ

旧カートリッジ 50mL

新カートリッジ 50mL のご使用方法

1



従来のガンに新形状のカートリッジを装着。

2



赤色大円型キャップを反時計回りに回す。

3



赤色大円型キャップを引き外す。

4




チップを外した状態で試し出しをする。印象材のベース、カタリスト両方の出を確認。

5



赤色の新形状ミキシングチップを新カートリッジに正しく挿入し、時計回りにロック。

6

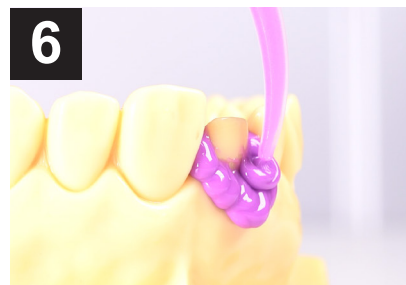


準備完了。ガンのレバーを引きながら印象を流す。〔6〕では別売「イントラオーラルチップ」を併用)



新赤色ミキシングチップの赤凸部を、新カートリッジの上側凹部に正しく奥まで挿入。



新赤色ミキシングチップを、時計回りに右回しロックし、準備完了です。

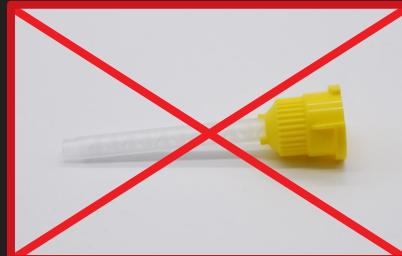


旧タイプの黄色ミキシングチップ、他社品、類似品は使用しないでください。

- 新包装の印象材には、新形状のミキシングチップをご使用ください。
(旧包装のミキシングチップは使用しないでください)
- 新包装と旧包装の印象材およびミキシングチップには、互換性はございません。
- 他社品や類似品のミキシングチップを使用しないでください。
万一、誤った組み合わせで使用されますと、練和・硬化不良等の原因となります。
- 従来のガンピストル(当社商品名「アプリフィックス4」)は、新包装にも引き続きご使用いただけます。

新カートリッジは再キャップ可能



大円型キャップは密栓用のフタとして再利用が可能です。

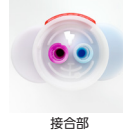

パナジル・シルジナート ガンタイプ 50mL の包装変更・使用方法のお知らせ

新包装

濃紺色大円型
キャップ



濃紺色の新形状
ミキシングチップ

新カートリッジ 50mL

チップ装着が **より簡便!** チップ内印象材残量が **20%削減!** 1チップ63円と **より安価!**

対象品

- ・パナジル トレーソフト
- ・パナジル モノフェーズ
ミディアム
- ・シルジナート

変更

旧包装

緑色キャップ



緑色のミキシングチップ

旧カートリッジ 50mL

新カートリッジ 50mL のご使用方法

1



従来のガンに新形状のカートリッジを装着。

2



濃紺色大円型キャップを反時計回りに回す。

3



濃紺色大円型キャップを引き外す。

4



チップを外した状態で試し出しをする。印象材のベース、カタリスト両方の出を確認。

5



濃紺色の新形状ミキシングチップを新カートリッジに正しく挿入し、時計回りにロック。

6



準備完了。ガンのレバーを引ながら印象材を押し出します。



新濃紺色ミキシングチップの紺凸部を、新カートリッジの上側凹部に正しく奥まで挿入。



新濃紺色ミキシングチップを、時計回りに右回しロックし、準備完了です。



旧タイプの緑色ミキシングチップ、他社品、類似品は使用しないでください。

- 新包装の印象材には、新形状のミキシングチップをご使用ください。
(旧包装のミキシングチップは使用しないでください)
- 新包装と旧包装の印象材およびミキシングチップには、互換性はございません。
- 他社品や類似品のミキシングチップを使用しないでください。
万一、誤った組み合わせで使用されますと、練り・硬化不良等の原因となります。
- 従来のガンピストル(当社商品名「アプリフィックス4」)は、新包装にも引き続きご使用いただけます。

新カートリッジは再キャップ可能



大円型キャップは密栓用のフタとして再利用が可能です。

