



チップカードについて

チップカードは各チップに同梱されております。

チップの先端は、使用すると摩耗します。

また、長時間の使用や必要以上のパワー、圧をかけると消耗や破損の原因となります。

チップの先端が短くなると作業効率が低下しますので、

チップカードをご活用いただき、チップの交換目安をご確認ください。

TK1-1L

TK1-1S

刃先の原寸の大きさです。
イラストに描かれている▲にチップの
シャンク部分を合わせてお使いください。

白水貿易株式会社
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

HAKUSUI チップカード

チップの摩耗度をチェックしましょう

歯肉縁上

チップ交換の目安

- 黄色の線…注意
- 赤色の線…交換（破棄）

OK

!

✖

H3

H4R

H4L

ご使用のチップのパワーと注水量は、
アクセサリガイドをご確認ください。

スプラソン
アクセサリガイド

歯肉縁下

スプラソン P-MAX2 に
関するよくある質問

Q&A

摩耗度の目安となる目盛りに誤差が生じるため、本ページを印刷してのご使用はお控えください。

※アクセサリガイド ver2.5.1 より、チップカードが同梱されておりません。
チップカードにつきましては、白水貿易株式会社へお問合せください