

ヨルグ & ソーン 22015 マイクロ用スツール 組立説明書

⚠ 開梱時の注意

下記写真の通り、念のためスツールの座面を切らないよう、少し箱を浮かせて切ると良い。
右側の内容物が全てそろっているか確認する。




内容物

- ①スツール本体 x 1 ②アームレスト x 2
③バックレスト x 1 ④専用六角レンチ x 1



組立て方


- ①スツール本体のアームレスト固定ネジを左右それぞれ六角レンチで取り外す。

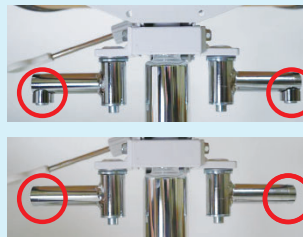

外した2本の
アームレスト固定ネジ



- ②アームレストを装着し、六角レンチで任意の箇所まで、アームレスト固定ネジを左右とも固定する。

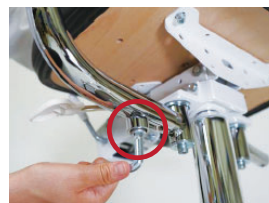

左右とも固定

- ③写真の穴にバックレストを差し込み、高さ調整バーで調整・固定して完成。



高さ調整バー


バックレストを差し込む際に、高さ調整バーを一番上まで上げると、下までしっかり入る。そのまま高さ調整バーでしっかりと固定する。

完成



ヨルグ & ソーン 22015 マイクロ用スツール 使用説明書


各パーツ名称

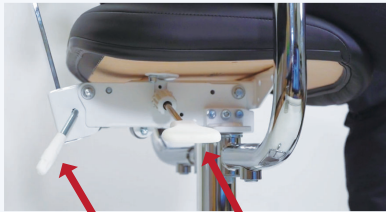

高さ調整バー 角度調整レバー



アームレスト調整ハンドル

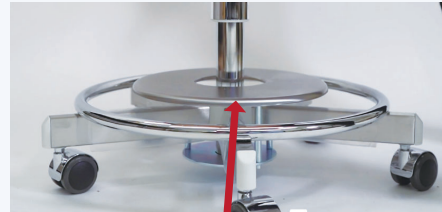

足踏昇降機能

①シート

足踏昇降機能により座面全体の高さを術中でも手を使わず行えます。



角度調整レバーにより、座面の角度も任意の角度に調整できます。このレバーにより、バックレストの角度も合わせて調整可能です。



②バックレスト

高さ調整バーでバックレストの高さをマニュアルで調整できます。

また①に記載の通り、角度調整レバーにより任意の角度にバックレストの調整も可能です。



③アームレスト

アームレストの位置を任意の位置に持ってくる事が出来ます。



また、アームレスト調整ハンドルでアームレストの高さ及び向きを調整することが出来ます。

