

acteon
Special Sale!

EXPASYLTM CAMPAIGN

HAKUSUI

キャンペーン期間

2023. **9.21** 木

▶ **12.20** 水

医薬品含有歯肉圧排材料

エキスパジルキャンペーン

エキスパジル トライアル キャンペーン

エキスパジルの導入を
ご検討の方におすすめです!

天然歯、審美的な補綴物
どちらにも使用できる
効果的で組織を傷つけない歯肉圧排



商品情報はコチラ



Check!

150個 限定 /
特別セット

キャンペーンセット内容

アプリケーター (ガン) … 1ヶ
カートリッジ …………… 3本
カニューレ …………… 6本



標準価格 **29,000 円** でご提供いたします。

期間中、150個限定でカートリッジ3本、カニューレ6本、アプリケーター1つ、
合計3点セットにしてご提供いたします。

エキスパジル カートリッジ増量 (9本入り) キャンペーン



カートリッジ (6本 / 1箱)



カートリッジ 3本

1.5倍に
増量! 合計 **9本** 入り

エキスパジルをすでに
使用されている方に
おすすめです!



標準価格 **27,000 円** 相当のところ

特別価格 でご提供いたします。

期間中、カートリッジを1.5倍に増量し(合計9本入り)、
特別価格にてご提供いたします。

EXPASYL™

20年
を超える
臨床実績

エキスパジルは、簡単に歯肉圧排効果を得ることができる歯肉圧排材料です。通常の圧排糸の圧の約1/37以下の圧力で使用されるので、上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。また、カオリン※1の水分吸収作用と塩化アルミニウムを含有していることにより、歯肉圧排糸と比較し同等、それ以上の効果を得ることが出来ます。作業時間は短く、効果的、かつ安全※3、是非その効果を実感してください。

※1 カオリナイトを主成分とし、長石類から生ずる粘土の一種




エキスパジルの効果

- ▶ 明瞭な歯肉圧排効果と乾燥作用。
- ▶ 上皮付着と歯肉線を保護します。
- ▶ 痛みを感じにくい。
- ▶ 速くて、単純で、優れたコストパフォーマンス。
- ▶ 15年以上に及ぶ臨床経験と多くの文献。

エキスパジルの圧排力

市場にある様々な圧排糸、圧排材料との比較。他の材料と比較し、エキスパジルの圧排力は1.7~9.2倍を示した。※2

Force required for movement with retraction gels and compounds (in-vitro)

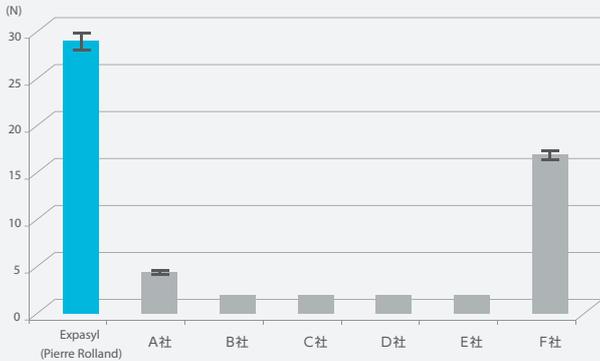

※2 Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.

適用症例

エキスパジルは様々な症例に対応します。


- ▶ 従来の印象
- ▶ 光学印象
- ▶ シーリング／ボンディング
- ▶ 保存症例 (クラスII、V)
- ▶ インプラント症例

作用

- ▶ 効果的に歯肉圧排、乾燥を行います。
- ▶ 圧排時に他の器材と組み合わせて使用する必要はありません。
- ▶ エクスパジルの使用時の上皮付着にかかる圧力は圧排糸と比較し1/37以下。※3
- ▶ 上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。
- ▶ 上皮付着が保護されるので、歯肉退縮や骨吸収のリスクが軽減されます。
- ▶ シリンジのエアーと水で簡単に除去することができます。

※3 Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92.

● 操作手順

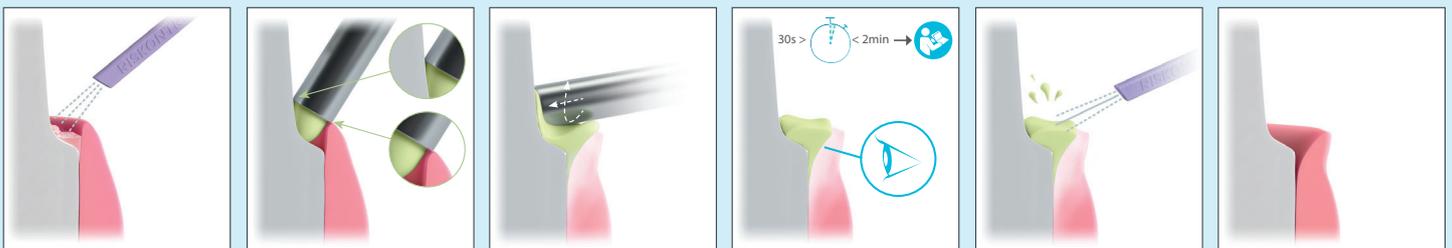

- 1 歯肉溝をやさしく水洗し乾燥させます。
- 2 カニキュールの先端で歯肉溝を塞ぐようにゆっくりとペーストを押し出します。
- 3 その後カニキュール先端を歯に押し付けながら歯軸に沿って徐々に起こします。
- 4 エクスパジルを1~2分間そのままの状態にしておきます。圧排効果が出てくると歯肉が白くなってきます。
- 5 ウォッシュで丁寧に除去します。
- 6 傷、痛み、出血を伴うことなく、歯肉圧排が完了。



AJ. Faucher, Académie du Sourire

AJ. Faucher, Académie du Sourire

M. Elmosnino

P. Lalet, e-dentisterie

acteon
ピエールローランド社
(フランス)

※記載内容は2023年9月現在のものです。尚、記載価格は税別です。

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西鯉屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.09.P20,000 K13