

おすすめ5選入り!
これさえあればスケーリングから
デブリドメントまで
全部できる!

※緑上用…#1,#1S,#10
緑下用…H3,HY1

スプラソン P-MAX2 キャンペーン



ニュートロンLED
スリムハンドピース

LED付



ニュートロン
チタンハンドピース

LED無



オートクレーブ滅菌が可能なチタンハンドピース。
ハンドピース内部の発振体、ハンドピースコードの
コネクタ部分を含め、液体の触れる部分には
チタンを使用し、これまで以上に耐腐食性が
向上しました。

多目的超音波治療器 スプラソン P-MAX2
ベーシックシステムに、「タンク式注水システム」、または
「シャリオカート」、または「タンク注水システム+シャリオカート」を
セットにして特別価格にてご提供いたします。

2023.11.21 ▶▶ 2024.2.20 まで

A タンク式注水システム付セット



残量が分かり易い!

液体の補充が簡単!

LED付

キャンペーン標準価格
298,000 円

商品コード 00822341

LED無

キャンペーン標準価格
280,000 円

商品コード 00822201

B シャリオカート付セット



スプラソン P-MAX2
ベーシックシステム

P-MAX2
にピッタリ
の軽量カート!

シンプルデザインで
使いやすい!

シャリオカート
<サイズ>

W388.2×H690×D380mm

※使用イメージ

LED付

キャンペーン標準価格
298,000 円

商品コード 00822347

LED無

キャンペーン標準価格
280,000 円

商品コード 00822180

C タンク式注水システム+シャリオカート付セット



スプラソン P-MAX2
タンク式注水システム

タンク+カート
のセット!

初めて導入される
方におススメ!!

※使用イメージ

LED付

キャンペーン標準価格
354,000 円

商品コード 00822348

LED無

キャンペーン標準価格
336,000 円

商品コード 00822181

大阪・東京・札幌・名古屋にて

超音波スケーラーの
基礎から応用まで学べるセミナーを
開催中!



詳細・お申込は
QRコードからチェック!




チップは何を使ったらいい？ おすすめ！効率の良いチップの選択



1 時短テクニック！

2本のチップで口腔内全ての歯面を効率よく歯石除去・デブリメントできるR/Lチップを活用しましょう。
微細パワーとP-MAX専用チップの併用で深く狭窄された部位・根分岐部などハンドスケーラーでは到達しにくい部位にも容易に挿入操作ができます。ハンドスケーラーが難しい部位に是非お試しください。
ハンドピースを2本ご準備いただき、ハンドピースごと付替えることで更に作業効率がUPします！

✓ R/Lチップとハンドピース2本用意しましょう

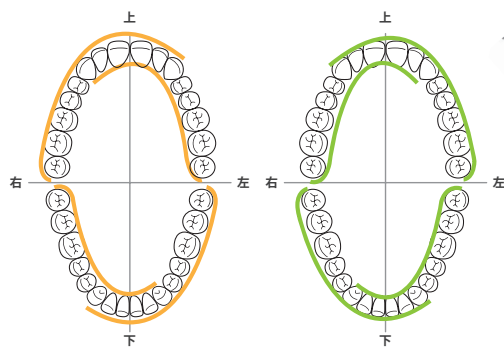


<p>超音波歯肉縁下スクレーリング</p> <p>URMペリオハードチップ H4R/H4L</p>	<p>超音波歯肉縁下スクレーリング (深く・狭窄された部位)</p> <p>URMペリオハードチップ ロングミニ HLM4R/HLM4L</p>
<p>メンテナンス (デブリメント)</p> <p>URMペリオハードチップ メタルソフト HY2R/HY2L</p>	<p>歯肉縁下のデブリメント</p> <p>HKPチップ HKP-R/HKP-L</p>

※チップは根分岐部にもラクラク到達

2 グレーシーのスキルを活かしたテクニック！

グレーシーキュレットのテクニックがあれば経験の浅い方も5mm以上深いポケットにもアクセス可能。
歯石除去と同時にイリゲーション※もできるので効率よく炎症コントロールが出来ます。グレーシーだけでなく、H3も使いこなせば更に効率UPが図れます。①同様、超音波グレーシーチップFK-11/FK-12もしくはFK-13/FK-14とハンドピースを2本ご準備いただき、ハンドピースごと付替えることで作業効率がUPします！ ※Pモードに設定し、水量はチップの形状に合わせストレートに水が出るよう調整する

チップ	適応部位	前歯	臼歯
 超音波グレーシーチップFK-11/FK-12	近遠心面	近心面、 頬舌・唇側・口蓋側面	
 超音波グレーシーチップFK-13/FK-14	近遠心面		遠心面
 ペリオハードH3	前歯用		

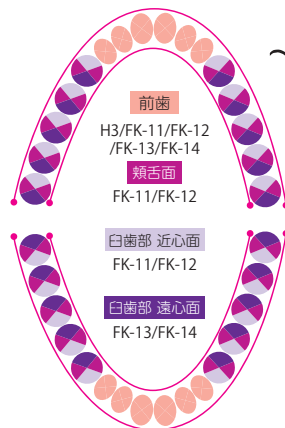

キュレットチップは
シャープニングもできます！



超音波グレーシーチップの動画はこちら

1. グレーシーチップ基本操作

上記グレーシーの操作方法をご参考にチップを選択しましょう。
ブロックごとの操作を行い、遠心→近心でチップを替えると効率的です。(1歯ずつ行わない)

2. チップ3本で効率UP

初めにH3チップを用いて出来るところは全て行います。次にグレーシー11/12チップを用いて頬舌(唇側・口蓋側)面・近心を行います。
遠心(H3)→頬舌(口蓋唇側)近心(グレーシー11/12)