

医療汚染機器の洗浄・消毒は

ミーレ ジェット ウォッシャー におまかせ!

ミーレジェット
ウォッシャー



を使う

ケガも防げるね!



4つのメリット

歯科衛生士
本来の業務に
集中できる!



スタッフの 感染リスクを低減。

洗浄前の予備洗浄が不要

清潔だから
患者さんも安心!



時間を効率的に 使える。

約25人分の基本セットの
洗浄と消毒が可能



見えない汚れも 隅々まで洗浄・消毒。


毎分500Lのお水を
循環させて強力洗浄
93℃の熱湯で高水準の消毒



節水できて さらに経済的。

使用水量が手洗いの約1/6
コストは手洗いの約1/7

環境にも
やさしいね!

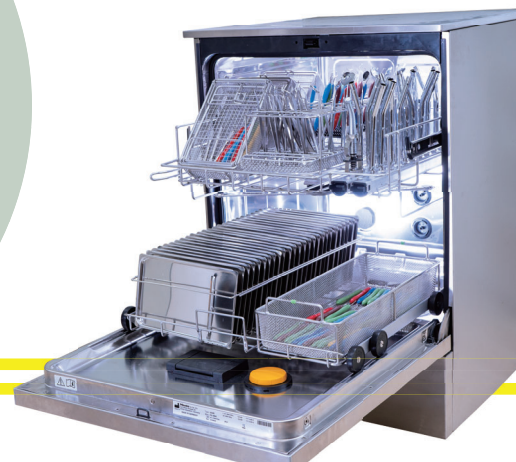



節水できてさらに経済的。

手洗い洗浄はすすぎの際に多量の水が必要ですが、ミーレ ジェットウォッシャーを使用することで、水の使用量を抑えて洗浄・消毒を行うことが可能です。

また、ミーレ ジェットウォッシャーのランニングコストは1サイクル当たり約240円と経済的です。

ミーレ ジェットウォッシャーなら、手洗いの約

1/6

の水で洗えます

1回分の使用量



約 **69** L/回



手洗いの約1/6

ミーレ ジェットウォッシャーを使用した場合

1回分の使用量



約 **420** L/回

※4の最小値で計算



手洗いの場合

1サイクルあたりのコスト

約 **¥240**



コスト内訳

上下水道料金… ¥50
洗剤…………… ¥114
すすぎ剤………… ¥10
電気代…………… ¥60～¥70

ミーレジェットウォッシャーの

Vario TDプログラムを使用した場合

年間のトータルコスト

1日2回、年間240日で計算

約 **¥690,000** の節約

1サイクルあたりのコスト

約 **¥1,680**



コスト内訳

人件費…………… ¥959 ※1
上下水道料金… ¥319
その他…………… ¥400 ※2
(洗浄剤等)

歯科衛生士が

手洗いを35分間行った場合

■ 上下水道の価格

水道料金…………… ¥0.2/L ※3
水道使用量… 12～40L/分 ※4
下水道料金… ¥0.56/L ※5

※1：厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」を元に計算
※2：メーカーカタログを元に計算
※3：厚生労働省「知りたい水道-日本の水道を考える」より抜粋
※4：厚生労働省「給水装置標準計画-施工方法」より抜粋
※5：東京都の水道基本料金を元に計算（2023年12月現在）



スタッフの
感染リスクを低減。

手洗い洗浄には何かとリスクを伴います。
先端が尖っている物が多い歯科用医療機器で
誤って負傷する危険も…
ミーレ ジェットウォッシャーは、自動で洗浄と消毒
を行います。洗浄後の拭き上げ作業が不要なため、
乾燥の手間を省くことができます。



時間を効率的に
使える。

大容量のミーレ ジェットウォッシャーでは、
約25人分の診療セット(トレイ・バキューム・ミラーなど)を
まとめて洗浄・消毒が可能です。
歯科用医療機器を本体にセットしてスイッチを押す
だけ。洗浄にかかる時間を有効活用いただけます。

▶手洗い

浸漬 用手洗浄 / 超音波洗浄 すすぎ 消毒 すすぎ 乾燥

▶ミーレ ジェットウォッシャー

本体にセット 洗浄・消毒・乾燥まで
ミーレ ジェットウォッシャーにおまかせ!

※ミーレ ジェットウォッシャーの所用時間: 約1時間20分 (VarioTD)



見えない汚れも
隅々まで洗浄・消毒。

ミーレ ジェットウォッシャーは落ちにくい血液などの
タンパク質の汚れもしっかり洗浄します。
また、3つの洗浄ノズルで高圧洗浄を行うため、
水を強い力で直接被洗浄物に当てることで優れた
洗浄効果を得ることができます。
ミーレ ジェットウォッシャーはISO15883で規定
されたAo=3,000の基準をクリアした高水準消毒
を実現します。



Miele

500L / 分の循環水量による
強力な洗浄力!



PG8591

ドライ
プラス
ホットエア
乾燥機能



PG8581

エコ
ドライ
余熱乾燥
機能

パワフル
高性能
大容量

器具除染用洗浄器

ミーレ ジェットウォッシャー

医療機器届出番号 13B2X10362000016/13B2X10362000017 一般管理機器



製品情報は
こちら

洗浄力

循環水量 500L / 分と様々な
モニタリング機能による確実な洗浄

ハンドピース内部の洗浄・水分除去

ハンドピース内部の洗浄とホットエア
による乾燥機能 (PG8591)

ISO 規格適合

ウォッシャーディズインフェクターに関する
ISO 規格「ISO15883/1」「ISO15883/2」に適合



HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西郷屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2024.05.P2,000 K19 Ver.1.2.1