

## LM LiftOut luxating instruments

### LM リフトアウト

抜歯時の組織への損傷を  
最小限に抑える



## LM TwistOut elevators

### LM ツイストアウト

強い力が必要な抜歯時に —

## LM SlimLift luxating instruments

### LM スリムリフト

挿入しやすいスリムなブレード



LM SlimLift

## Feel the Difference

- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっかり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-DuraGradeMAXスーパースチール製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートクレープで滅菌可能



標準価格 1本 ¥18,000  
(カセット付)

# LM LiftOut


## LM リフトアウト

歯科用剥離子

組織損傷を最小限に抑え  
力に頼らない抜歯が可能

一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020223044

LM リフトアウト、LM スリムリフトは極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治療が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

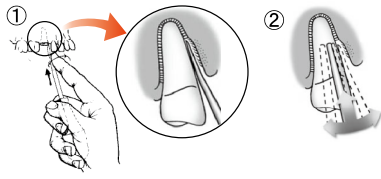

ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靱帯を切断します。

# LM SlimLift

## LM スリムリフト

歯科用剥離子

ブレードが非常に薄く  
歯根膜に挿入しやすい

一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020225034



**注意!**

LMリフトアウト、LMスリムリフトは適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特に薄くなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やデコの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

# LM TwistOut

## LM ツイストアウト

歯科用エレベータ

強い力や捻りが必要な  
ケースに使用

一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020223043

LM ツイストアウトは抜歯時に、強い力や捻りが必要な際に使用します。



## 形状・サイズ

00233150・・・LM リフトアウト S2 **ストレート**  
2.5mm (ブレード幅)



00233151・・・LM リフトアウト S3 **ストレート**  
3mm (ブレード幅)



00233153・・・LM リフトアウト S4 **ストレート**  
4mm (ブレード幅)



00233152・・・LM リフトアウト S5 **ストレート**  
5mm (ブレード幅)



00233155・・・LM リフトアウト C3 **カーブ**  
3mm (ブレード幅)



00233157・・・LM リフトアウト C4 **カーブ**  
4mm (ブレード幅)



00233156・・・LM リフトアウト C5 **カーブ**  
5mm (ブレード幅)



00233130・・・LM スリムリフト S3 **ストレート**  
3mm (ブレード幅)



00233131・・・LM スリムリフト S4 **ストレート**  
4mm (ブレード幅)



00233132・・・LM スリムリフト S5 **ストレート**  
5mm (ブレード幅)



00233135・・・LM スリムリフト C3 **カーブ**  
3mm (ブレード幅)



00233136・・・LM スリムリフト C4 **カーブ**  
4mm (ブレード幅)



00233137・・・LM スリムリフト C5 **カーブ**  
5mm (ブレード幅)



00233160・・・LM ツイストアウト S3 **ストレート**  
3mm (ブレード幅)



00233162・・・LM ツイストアウト S4 **ストレート**  
4mm (ブレード幅)



00233161・・・LM ツイストアウト S5 **ストレート**  
5mm (ブレード幅)



00233165・・・LM ツイストアウト C3 **カーブ**  
3mm (ブレード幅)



00233167・・・LM ツイストアウト C4 **カーブ**  
4mm (ブレード幅)



00233166・・・LM ツイストアウト C5 **カーブ**  
5mm (ブレード幅)



## 関連商品

### LMリフトアウト、LMスリムリフト、LMツイストアウト 専用シャープニングストーン

専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。



[00233170] 標準価格 1個 ¥5,200

### 残根除去用エレベータ LM ルートアウト

- 残根の除去に適しています
- 人間工学に基づいた把持しやすいグリップ



[00233176] 標準価格 1本 ¥18,000

### 残根除去用インスツルメント LM ルート チップピック

- 残根の除去に適しています



[00233175] 標準価格 1本 ¥8,400

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020225033

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020224016

記載の価格は2025年9月現在のものです。[税別]

LM feel the difference

LMインスツルメンツ社  
(フィンランド)

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814  
関東 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951  
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618  
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877  
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400  
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870  
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618  
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.09.P1,000 B14 Ver.1.2.1