

ふわ
ふわ

フッ素塗布器

DENTGUARD

デントガード

一度にやさしく包み込む



～それはやさしさから生まれました～

大きく口を開けられない子にも
全顎のフッ素  塗布を一度に



特殊な方法によって発泡状態に製作したプラスチック・スポンジ製フッ素塗布器（学名スポンジ・マウスピース）であって、これに※う蝕予防剤を適量浸潤させて患者さんに適用します。永久歯列弓の完成した児童及び成人用には、この片面または両面に歯列溝がつけてあります。綿球によるフッ素塗布法と異なり、唾液分泌の盛んな小児の場合でも口腔及び歯牙の防湿処理を要せず、唇面、舌面隣接面に容易且つ十分にフッ素塗布ができて、同時に全顎塗布が可能です。従って術者の作業量を飛躍的に増加し、学童等の集団塗布に最も適しています。

※う蝕予防フッ化物歯面塗布剤

製品番号	推奨年齢	個数
#1	2～4才用	20ケ
#2	4～6才用	20ケ
#3	6～8才用	20ケ
#4	8～10才用	20ケ
#5	10才以上用	20ケ
アソート	#1～#5	各4ケ

やわらかいスポンジだから
舌側側にもしっかりと密着塗布

お使いになるには



① ていねいに歯面清掃を行う



② 3～5cm挿入して、口角部にそって挿入しつつ、指先で左右の頬粘膜を少し押し広げる



③ 上下顎の咬合状態をみながらゆっくりと噛ませ、つまんだ指の加減であわせる



④ 挿入できたら、ゆっくりと、よく噛ませる



⑤ 唾液がでてきたら、ティッシュか紙コップで受けとめる



⑥ 各フッ化物製品取扱メーカーの推奨時間が経てばつまんで、ゆっくりと取り出す



⑦ フッ素剤を、できるだけ多く吐きださせる

よくお確かめください



透明のガイドシールは基本的に外さずにご使用ください。舌側にフッ素剤が行き渡るようにする為のものです


※ 塗布後約30分間は洗口させないで唾液を吐かせる程度にとどめてください

しみこませるには

液体



包装袋を少し切り、フッ素塗布する液体をもみこむように、全体にしみこませる

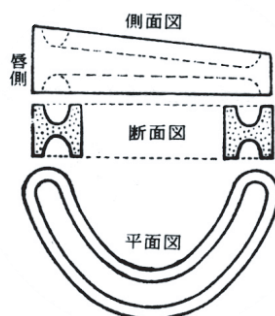

御 考 案
故・山賀礼一教授
(大阪大学 工学)




患者さんにお渡しできる記録用紙つき
「フッ素塗布カード」
(20枚入)

ハートみたいで
かわいい

みんなできるよ！

ふわふわ。
がまんできる

ジェル/泡

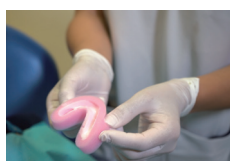

デントガードの上下にジェル/泡をのせた後、もみこむように、全体にしみこませる

たのしいブラッシングを



関連製品

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.10.P1,000 A03 Ver2.1.2