

implantmed

インプラントモーター

インプラントメッド SI-1010

**Safe, simple,  
flexible.**

Respects your needs.  
Today and tomorrow.



# わかりやすく簡単な操作で



大型タッチパネルは  
清掃が簡単

カラータッチスクリーン表面は  
清掃が容易なガラス製で衛生的  
です。



操作が簡単

ユーザーフレンドリーなメニュー  
構成なので画面にタッチして直感的  
に操作を行うことができます。



複数のユーザーでの  
使用に最適

複数のユーザーで使用する為の  
カスタマイズが可能です。



洗練された  
フットコントローラー

ワイヤレスフットコントローラーを  
使用するとコードを気にすること  
なく操作しやすい位置に自由に  
移動させることができます。

## 見やすく大きな操作パネル



ワイヤレス  
フットコントローラー  
(コード無し)

- — 正逆回転の切換え
- — プログラムの切換え
- — 注水ポンプのオン/オフ



モーターのオン/オフおよび予め選択した  
最大速度までモーターをスムーズに加速

フットコントローラー  
(コード有り)


## 安定したインプラント埋入を実現

### スレッドカッター




自動スレッドカッター機能は、硬い骨にインプラントを挿入するときにサポートします。骨の圧迫を防ぎます。

### 自動トルクコントロール

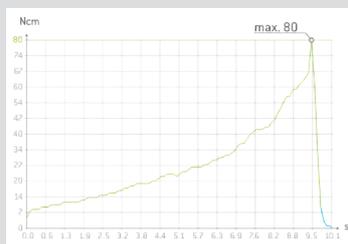

精密な自動トルクコントロールが安定した  
施術をサポート。5~80Ncmの範囲で  
調整可能です。

### ドキュメンテーションの保存管理

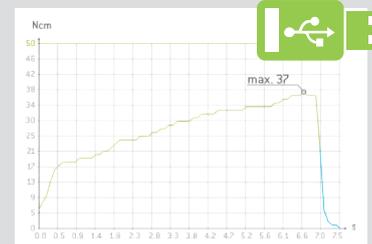

治療に関する情報をUSBメモリに保存して  
管理することができます。

※USBメモリーは製品に含まれていません。

# インプラントメッドは使い易い インターフェイスによって、 治療のプロセスをシンプルにします。



※ハンドピースは別売



## 注水チューブの 取り付けも簡単

注水チューブの取り付けが簡単  
にできるため、機器のセッティ  
ングがスムーズに行えます。



## 自然光に近い照明

誰もが認めるLEDテクノロジーの  
リーダーとして、ハイコントラスト  
で自然光に近い照明が可能なミニ  
LEDを採用したサージカルコント  
ラアングルを開発しました。

## プログラム

インプラントメッドSI-1010には、3つの初期設定がプリセットされています。(Implantology 1、Implantology 2、Oral Surgery)  
また、アプリケーションやプログラムは、自由に追加・カスタマイズをすることが可能です。  
画面には必要な情報のみを表示し、設定のカスタマイズはシンプルで簡単です。

### 初期設定(工場設定)①

#### Implantology 1

スタンダードな  
インプラント用  
プログラム

	P1	P2	P3	P5	P5
ギア比	1 : 1	WS-75[20 : 1]	WS-75[20 : 1]	WS-75[20 : 1]	WS-75[20 : 1]
バーの回転数(初期設定) [rpm]	35,000	1,200	800	15	15
バーの回転数の設定範囲 [rpm]	200~40,000	10~2,000	10~2,000	10~50	10~50
モーターの回転方向	正回転	正回転	正回転	正回転	逆回転
注水ポンプ	オン	オン	オン	オフ	オフ
トルク [Ncm]	100%	100%	100%	20	50
トルク設定範囲	-	-	-	5~80	5~80

### 初期設定(工場設定)②

#### Implantology 2

スレッドカッティング  
機能を含む  
インプラント用  
プログラム

	P1	P2	P3	P4	P4	P5	P5
ギア比	1 : 1	WS-75[20 : 1]					
バーの回転数(初期設定) [rpm]	35,000	1,200	800	20	20	15	15
バーの回転数の設定範囲 [rpm]	200~40,000	10~2,000	10~2,000	10~50	10~50	10~50	10~50
モーターの回転方向	正回転	正回転	正回転	正回転	逆回転	正回転	逆回転
注水ポンプ	オン	オン	オン	オン	オン	オフ	オフ
トルク [Ncm]	100%	100%	100%	20	60	20	50
トルク設定範囲	-	-	-	5~80	5~80	5~80	5~80

### 初期設定(工場設定)③

#### Oral Surgery

大臼歯抜歯など  
外科処理用  
プログラム

	P1	P2	P3
ギア比	1 : 1	1 : 1	1 : 2.7
バーの回転数(初期設定) [rpm]	35,000	10,000	108,000
バーの回転数の設定範囲 [rpm]	200~40,000	200~40,000	540~108,000
モーターの回転方向	正回転	正回転	正回転
注水ポンプ	オン	オン	オン
トルク [Ncm]	100%	100%	100%

## 動画

### インプラントメッド 組み立て方法



### パネル操作方法



### 記録方法



### オートリバース機能



サージカル  
コントラングル  
&  
ストレート  
ハンドピース



	WS-56	WS-56LG	WS-56L	WS-75	WS-75LG	WS-75L	WS-91	WS-91LG	WS-91L
商品コード	00668200	00668201	00668222	00668202	00668203	00668223	00668204	00668205	00668224
ギア比	1 : 1	1 : 1	1 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 2.7
カラーコード	青	青	青	緑	緑	緑	オレンジ	オレンジ	オレンジ
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※	※	※	※	※	※	※2	※	※
ライト	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+
使用可能なバーの最長の長さ	34mm	34mm	34mm	45mm	45mm	45mm	25mm	25mm	25mm
モーターの最大回転数	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm
スプレー穴数	1	1	1	1	1	1	3	3	3

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm



	WS-92	WS-92LG	WS-92L	S-11	S-11LG	S-11L	S-15
商品コード	00668206	00668207	00668225	00668208	00668209	00668226	00668210
ギア比	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
カラーコード	オレンジ	オレンジ	オレンジ	青	青	青	青
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※2	※2	※2	※	※	※	※
ライト	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—
使用可能なバーの最長の長さ	25mm	25mm	25mm	45mm	45mm	45mm	45mm
モーターの最大回転数	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	30,000rpm
スプレー穴数	3	3	3	1	1	1	1

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm

インプラントメッドに  
おすすめ！  
サージカルハンドピース  
WS-75L



標準  
モデル



仕様

販売名 :	インプラントメッド SI-1010	モーターの最大トルク :	6.2Ncm
電源電圧 :	AC100V	公称電圧範囲内のモーター回転数 :	200-40,000rpm
周波数 :	50/60Hz	最大注水量 :	90mL/分以上
ヒューズ定格 :	250V-T1.6AH	本体サイズ :	幅262 x 奥行291 x 高さ100mm
最大出力 :	80W	本体重量 :	3.5kg

セット内容

- インプラントメッド SI-1010 本体
- 電源コード(100V用)
- ケーブル付モーター
- フットコントローラー(コード有りまたはコード無し)
- 付属品 : 輸液容器用スタンド、モーターホルダ、注水チューブ(3本入)

フットコントローラーは  
コード有りかコード無し  
の選択が可能です

ワイヤレス フットコントローラー  
(コード無し)



フットコントローラー  
(コード有り)



※ハンドピースは別売

医療機器認証番号 230ALBZX00004000 / 226ALBZX00018000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814  
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951  
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618  
 名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877  
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400  
 広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870  
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618  
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.02.P1,000 E22 Ver.1.2.1