

アーテックス プリント&クリック

ご使用方法を
動画でチェック!



カチツと装着!

模型作成から装着まで、
もっとスピーディーに!



簡単で早い




マグネット固定で工具不要
10mm ディスタンスプレートにより、模型の位置決めが簡単

経済的



プレートが再利用可能のため、
プリント材料や時間の節約ができる

高精度

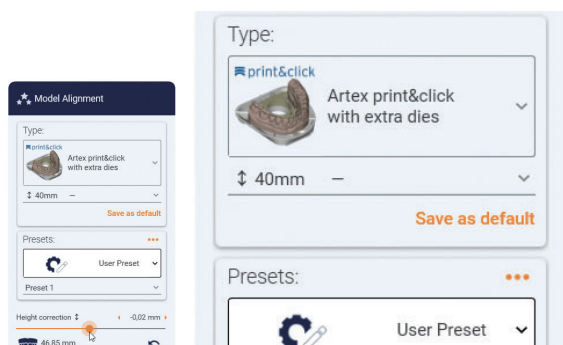

高精度な適合性とソフトウェアによる
正確な模型装置を実現

オープンで高い汎用性



多種高精度型プリンター、幅広い症例に対応

簡単な操作!

マグネット固定により、4つのシンプルなステップでスピーディーかつ正確に模型をセットできます。



マグネットを挿入します。



模型をモデルプレートに固定します。



完成模型をディスタンスプレートに装着します。




パッケージを咬合器にセットします。

既存の咬合器との高い互換性

新しい咬合採得が得られた際も、最初からマウントをし直す必要はありません。Splitex カウンタープレートと標準マグネットを活用することで、片側の模型だけをスピーディーかつ精密に再マウントできます。

異なる症例でも、基準線は常に一定

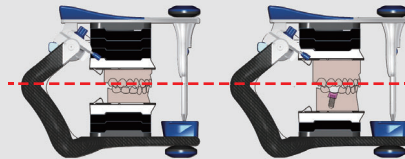

インプラント体（アバットメント）の有無や症例の難易度に関わらず、咬合平面の高さは常に正確に維持されます。

主要な歯科用 CAD ソフトと連携

ceramill® m-build




Model Creator Modul

Dental CAD Add-on Modul

ceramill m-build(ver.4.8.2 以上) と
アーテックス プリント&クリックライブラリ
(ver.1.1.45.0 以上) に対応。
Exocad Model Creator でも設計可能
(対応状況は Exocad のバージョンによる)
デジタルワークフローにシームレスに統合可能。

あらゆる模型の組み合わせに対応

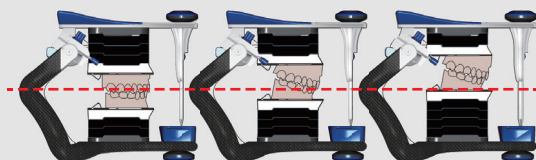

上顎・下顎のみの単独症例から上下顎の咬合症例まで、どのような組み合わせでも垂直的な位置関係がズレることはありません。

ラインアップ

アーテックス プリント&クリック セット



商品コード：92216400
標準価格：¥64,500

×2
×10
×5

〔セット内容〕
・モデルプレート2枚
・ディスタンスプレート5枚
・マグネット10個

アーテックス プリント&クリック モデルプレート (10 枚)



商品コード：92216410
標準価格：¥85,500

×10

アーテックス プリント&クリック ディスタンスプレート (10 枚)



商品コード：92216411
標準価格：¥96,500

×10

関連商品

アーテックスAR タイプCR	アーテックスAR タイプCPR	アーテックスNK タイプCT	アーテックスNK タイプCN	アーテックスBN
半調節性咬合器		平均値咬合器		
アルコン型		コンダイラー型 (ノンアルコン型)		
商品コード：92218760 標準価格：¥390,000	商品コード：92218750 標準価格：¥290,000	商品コード：92217320 標準価格：¥170,000	商品コード：92217310 標準価格：¥120,000	商品コード：92218770 標準価格：¥85,000

気泡の混入が少ない
石膏や埋没材が練りできる!

スマートミックス X2
500mL 羽根/ボウル付き
商品コード：92320002
標準価格：¥490,000
スマートミックス X2
250/500mL 羽根/ボウル付き
商品コード：92321002
標準価格：¥542,000
スマートミックス X2
500mL 羽根/ボウル/スタンド付き
商品コード：92322002
標準価格：¥560,000



高精度な模型を
かんたんに!

ジロフォーム ビンドリル
スターターキット付



商品コード：83176791
標準価格：¥650,000

医療機器届出番号 27B1X00020220065 一般医療機器

医療機器届出番号 27B1X00020221153 一般医療機器

記載内容は 2026 年 7 月現在のもので、価格はすべて税別です。

AMANN GIRRBACH

アマンギルバッハ社
(オーストリア)

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス212階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.07 P1,000 F04 ver1.1.1